

3M Science.
Applied to Life.™




3M Hälsovård

Tegaderm™ Alginate

Alginatförband

Tegaderm™ Alginate är
ett högabsorberande
kalciumalginatförband som är
avsett att användas vid måttligt till
kraftigt vätskande sår.

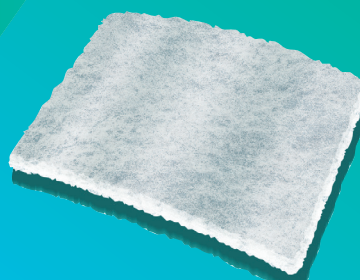

Tegaderm™ Alginate

Alginatförband

Egenskaper

Tegaderm™ Alginate är ett högabsorberande kalciumalginatförband som är avsett att användas vid måttligt till kraftigt vätskande sår.

Förbandet består av ett non-woven material utvunnet från brunalger. När förbandet kommer i kontakt med sårvätska sker ett jonutbyte och alginatfibrerna bildar en fuktighetsbevarande och skyddande gel. Förbandet absorberar sårvätska och håller den kvar i förbandet. Förbandet har en mycket god förmåga att bibehålla sårvätska och absorbera under längre tid. Förbandet ger en fuktig sår läkningsmiljö vilket främjar sår läkning.

När förbandet absorberar sväller det inte utan det bibehåller sin struktur. Förbandet har en hög integritet dvs faller inte isär och är lätt att avlägsna ur såret vid förbandsbyte.

Tegaderm™ Alginate innehåller mycket kalcium vilket ger en blodstillande effekt i såret.

Applicering

Välj en förbandsstorlek anpassad efter såret. Tegaderm™ Alginate går att klippa för att anpassa storleken. Förbandet bör inte gå längre ut än 0,5 cm utanför sårkanten.

Applicera förbandet i sår botten. Packa djupa sår löst, genom att "fluffa" ner tamponaden eller kompressen. Täck förbandet med ett lämpligt täckförband, tex Tegaderm™ Film. Tegaderm™ Film tillåter inspektion genom förbandet och skyddar mot bakterier och vatten och är duschbart. Låt täckförbandet gå ca 2,5 cm utanför sårkanten.

Indikation

Måttligt till kraftigt vätskande del- och fullhudsskador

- Trycksår
- Fotsår hos diabetiker
- Venösa och arteriella sår
- Postoperativa sår/kirurgiska sår
- Infekterade sår
- Blödande sår
- Tagställen



- Hög absorptionskapacitet
- Bildar en fuktighetsbevarande gel
- Blodstillande effekt

Beställningsinformation			
3M art nr	Storlek	Ant/fp	Fp/lev fp
90110	5 × 5 cm	10	10
90112	10 × 10 cm	10	5
90114	10 × 20 cm	5	4
90120	30,4 × 2 cm	5	4



3M Hälsovård
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna

Tel 08-92 21 00
Fax 08-92 22 89
Email kundservice@mmm.com
Web www.3M.se/healthcare

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige © 3M 2015.
Alla rättigheter förbehålls. LL53 0039-1 SE 150909