


3M Science.
Applied to Life.™

3M Hälsovård

Tegaderm™ Hydrocolloid

Den moderna hydrokolloiden.

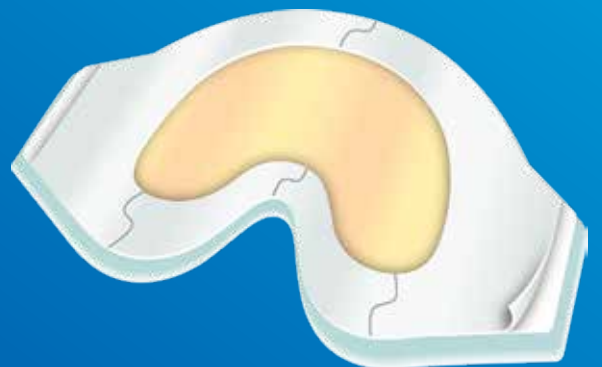

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid

Hydrokolloidalt förband för lätt till måttligt vätskande sår



Tegaderm Hydrocolloid finns i tre olika former – sakralt, ovalt och fyrkantigt. De ovala och fyrkantiga förbanden finns i två olika tjocklekar – standard och tunn.

Förstärkt skydd – lång användartid

De ovala storlekarna och den sakralformade modellen är täckta med Tegaderm Film, som bildar en ram runt plattan. Ramen förhindrar att kanterna lossnar och skyddar förbandet mot eventuellt inläckage av urin och avföring. Appliceringen förenklas då ingen extra fixering behövs runt förbandet. Polyuretanfilmen är vattentät och skyddar såret mot kroppsvätskor och bakterier. Det går att duscha med förbandet.

Optimal absorbtion

Förbandet har en snabb absorbtion av sårvätska utan att smälta och lämna rester i såret. Vid den fortsatta absorbtionen avdunstar fukt från såret via filmen på ovansidan av förbandet. Förbandets genomsläpplighet av fukt minskar risken för maceration av huden.

Fuktig sårhämningsmiljö

Vid kontakt med sårvätskan blir den hydrokolloida delen i förbandet som en gel vilket skapar en fuktig sårhämningsmiljö som främjar sårhämningsmiljön.



Såret kan inspekteras genom förbandet.



Bibehållen form och integritet:

Förbandet smälter inte och lämnar inte rester i såret.

Oval design:

Design för bättre passform på kroppskonturer där trycksår lätt kan uppstå, ex. häl, höft och sakrum.

Hudvänliga:

Hudvänligt häftämne. Innehåller inte latex eller kolofonium.

Referenser:

DeKeyser G, Pelemans N, "3M Tegaderm Thin Dressing – A Study comparing two thin hydrocolloid dressings on dry and lightly exuding pressure sores." 6th European Conference on advances in Wound Management, Amsterdam 1996. Banks V, Hagelstein S, Thomas N, Bale S, Harding KG, "Comparing hydrocolloid dressings in management of exuding wounds." British Journal of Nursing 1999; 8(10).

Den moderna hydrokolloiden – brett sortiment



Tegaderm™ Hydrocolloid Thin

Mycket tunn hydrokolloid del, som gör att såret kan inspekteras genom förbandet. Den ovala formen i kombination med att den är tunn och smidig gör den lämplig att applicera på t.ex. höfter, i sakrum samt på hälar. Tegadermfilmen bildar en ram runt plattan vilket förhindrar att kanterna lossnar samt förhindrar inläckage av t.ex. urin eller avföring. Finns även i fyrkantig modell utan ram.

Indikation:

- Lätt till måttligt vätskande sår
- Trycksår
- Venösa bensår
- Ocklusiv behandling med steroider vid psoriasis (förskrivningsprodukt)*

Tegaderm™ Hydrocolloid

Standard hydrokolloid med mycket god absorptionskapacitet. Finns både i oval och fyrkantig modell.

Indikation:

- Måttligt vätskande sår
- Trycksår
- Venösa bensår




Tegaderm™ Hydrocolloid Sacral

Sakralformat förband som gör det enkelt att applicera på det sakrala området. Sitter bra och länge och ger utmärkt skydd mot bakterier och smuts. Tegadermfilmen bildar en ram runt plattan vilket förhindrar att kanterna lossnar samt förhindrar inläckage av urin eller feaces.

- Ger en utmärkt fixering i det svårapplicerade sakrala området.
- Kostnadseffektiv då ramen säkrar fixeringen
- Ramen runt förbandet skyddar mot avföring och urin
- Lätt att applicera med ramsystem.

Indikation:

- Lätt till måttligt vätskande sår i sakrum
- Trycksår i sakrum

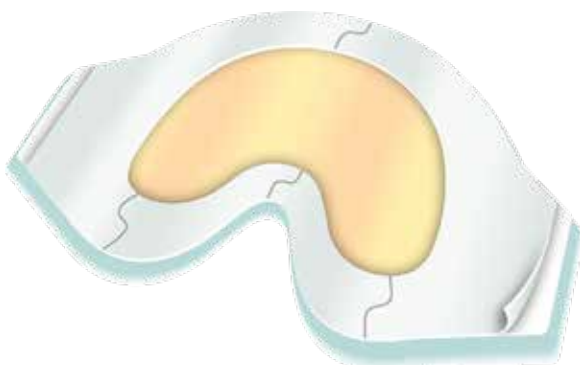

Innovativ design – lätt att applicera

Applicering av Tegaderm™ Hydrocolloid Sacral



1. Vik förbandet till hälften och "veck" det på mitten.



4. Då förbandet fästs i klyftan, tryck försiktigt inifrån och ut. På detta sätt undviks att förbandet skrynklas och man får en slät och fin applicering. Undvik att sträcka förbandet eller huden.



2. Håll i båda flikarna med ena handen för att undvika att handskarna fastnar i förbandet. Avlägsna det tryckta skyddet på den ena sidan av förbandet tills häftämnet är synligt. Fortsätt avlägsna det tryckta skyddet från den andra sidan av förbandet på samma sätt.



5. Avlägsna förbandsramen, börja uppfifrån och arbeta nedåt. Tryck på och släta ut filmkanterna från mitten och utåt. Fortsätt nedför den ena sidan. Upprepa metoden på den andra sidan tills alla delarna av ramen har avlägsnats.



3. Håll i båda flikarna, positionera förbandet över såret, samtidigt som förbandet vinklas mot det anala området. Särå på skinkorna för att få en bättre placering.



6. Noggrann applicering resulterar i en god vidhäftning av förbandet och ett slätt förband som sitter längre.

Borttagande av förbandet



1. Tag försiktigt tag i kanten på förbandet och håll i mot huden. Lossa försiktigt genom att "stretcha" loss förbandet.



3. Tag försiktigt bort förbandet och dra i den eventuella hårväxtens riktning.



2. Om det är svårt att få tag i kanten, sätt fast en bit Micropore™ tejp på förbandskanten och lyft upp kanten av förbandet med den.

Observera:

Tegaderm™ Hydrocolloid ska inte användas på infekterade sår, trycksår grad 4 eller sår som involverar ben och senor.

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid

Beställningsinformation

3M art nr	Beskrivning	Storlek	Ant/fp	Ant fp/ lev fp
Tegaderm™ Hydrocolloid Thin				
90021*	Oval	10 × 12 cm	10	20
90023*	Oval	13 × 15 cm	10	6
90022	Fyrkantigt	10 × 10 cm	5	20



3M art nr	Beskrivning	Storlek	Ant/fp	Ant fp/ lev fp
Tegaderm™ Hydrocolloid				
90001	Oval	10 × 10 cm	5	20
90003	Oval	13 × 10 cm	5	12
90002	Fyrkantigt	10 × 10 cm	5	20
90007	Sakralformat	17,1 × 16,1 cm	6	4



Appliceringstips

Före applicering av förbandet:

1. Avlägsna ev. hår för ökad patientkomfort och bättre fixering.
2. Rengör huden och såret ordentligt enligt lokala rutiner.
3. Låt huden torka före applicering av förbandet.
4. Om patientens hud är skör eller om dräneringen av såret förväntas spridas utanför sårkanten är det lämpligt att applicera 3M™ Cavilon™ No Sting.



Cavilon™ No Sting hudbarriärfilm

Efter rengöring och torkning av såret, applicera 3M™ Cavilon™ No Sting runt området. Denna alkoholfria barriärfilm hjälper till att förhindra hudskador p.g.a. inkontinens och häftämnen samt skyddar skadad hud från ytterligare påverkan. Mer information finner du på www.cavilon.se



*Får förskrivas vid ocklusivbehandling med steroider:

3M Art nr	Apotekets varunr
90021	201332
90022	201331



3M Svenska AB
3M Hälsovård

Bollstanäsvägen 3
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 29 100
kundservice@mmm.com
www.3M.se/healthcare

3M och Cavidon är varumärken som tillhör 3M Company.
Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige.
©3M 2015. Alla rättigheter förbehålles. BR530100-2SE160324