



Instruções de Uso
3M ESPE Clinpro Prophy Paste

Informações Gerais

3M™ ESPE™ Clinpro™ Prophy Paste, pasta profilática com flúor, é uma pasta de profilaxia e polimento que contém perlita, uma partícula abrasiva exclusiva. O abrasivo de perlita se transforma de partículas grossas a finas durante o uso, transformando a pasta profilática em uma pasta de polimento. Clinpro Prophy Paste contém fluoreto de sódio a 1,23% de íons de flúor. Clinpro Prophy Paste é fornecida em doses individuais; cada uma contendo 2 gramas de pasta profilática, em quantidade suficiente para um único procedimento de profilaxia.

Indicações

Para procedimentos de profilaxia e polimento, como parte de um tratamento de profilaxia, realizada em consultório pelo profissional.

Informações de precauções para os pacientes

A ingestão excessiva de flúor pode causar náusea. Clinpro Prophy Paste deve ser removida da boca do paciente e **NÃO DEVE SER INGERIDA**. Se houver ingestão acidental de grandes quantidades de pasta profilática, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), e em caso de indisposição, procure atendimento médico.

A FISQ da 3M ESPE pode ser obtida no website www.3M.com.br ou entre em contato com a sua subsidiária local.

Instruções de Uso

NOTA: Clinpro Prophy Paste deve ser usada somente por profissionais treinados para desempenhar uma profilaxia dentária. **Para atingir os melhores resultados com a exclusiva fórmula de pasta da Clinpro Pasta profilática, pode ser necessária uma pequena modificação da técnica de aplicação.** Siga as instruções de uso listadas abaixo:

1. Abra a embalagem.
2. Para aplicar a Clinpro Prophy Paste nos dentes, use qualquer contraângulo comercialmente disponível com uma taça de borracha. Para preencher a taça de borracha, pressione a frente da taça de borracha na pasta profilática, e, ao mesmo tempo, mova o contraângulo lentamente.
3. Realize a profilaxia em uma pequena quantidade de dentes (2-3) com uma porção de pasta profilática na taça de borracha. Logo após iniciado o tratamento, a capacidade de limpeza e abrasividade da pasta diminuirá, ao passo que a capacidade de polimento aumentará.
4. Se estiver tratando pacientes com raízes expostas ou áreas de dentina:
 - a. Inicie a profilaxia na superfície em esmalte com a pasta pura, que é mais abrasiva.
 - b. Passe para as superfícies de raiz exposta ou dentina com pasta utilizada, que é menos abrasiva.
5. Pegue uma nova porção de pasta profilática e realize o procedimento nos próximos 2-3 dentes, da mesma forma. Repita até que todos os dentes tenham sido tratados.
6. Quaisquer manchas deixadas na superfície do dente deve ser tratada com uma porção pura de pasta.
7. Durante todo o procedimento, deve ser mantida uma quantidade de pasta suficiente na taça de borracha, para evitar superaquecimento da superfície do dente.
8. Durante o procedimento de polimento, enxágue periodicamente a pasta profilática da superfície dos dentes. É recomendada a remoção da saliva, para evitar a diluição excessiva e ingestão da pasta.
9. Descarte a taça de borracha após o uso, de acordo com os regulamentos federais, estaduais e municipais.



3M do Brasil
Via Anhanguera, km 110
13181-900 – Sumaré – SP
Fone (19) 3838.7543

Armazenagem e Uso

Este produto foi desenvolvido para ser utilizado à temperatura ambiente. Se armazenado sob refrigeração, deixe que o produto atinja a temperatura ambiente antes de utilizá-lo. A vida útil em temperatura ambiente é de 24 meses. Temperatura ambiente frequentemente superior a 27°C pode reduzir a vida útil. Veja a data de vencimento na parte externa da embalagem.

Descarte

Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) disponível em www.3M.com.br ou a subsidiária mais próxima para informações sobre o descarte.

Informação ao cliente

Nenhuma pessoa está autorizada a fornecer qualquer informação diferente das apresentadas neste folheto de instruções.

Cuidado: A Lei Federal do Brasil restringe a venda ou utilização deste produto sob prescrição de um Cirurgião-Dentista.

Composição: perlita, octaetilenoglicol, álcool palmítico, fluoreto de sódio, dióxido de titânio, óleo de rícino etoxilado, flavorizante, sacarina sódica.

Vencimento e lote: impressos na embalagem.

Registro ANVISA: 80284930334

Farm. Resp.: Roberta F. F. Marsaioli CRF/SP 15.095 (Matriz)

Farm. Resp.: Camila M. Mariano CRF/SP 40.894 (Filial V)

CRC 3M ESPE: 0800-0155150

www.3MESPE.com.br

e-mail: falecoma3m@mmm.com

Fabricado por:

- 3M Company 3M ESPE Dental Products

2111 McGaw Avenue, Irvine, Califórnia CA 92614 EUA;

St. Paul, MN 55144-1000 EUA;

- 3M do Brasil Ltda.

Matriz: Rod. Anhanguera, Km 110, Sumaré/SP;

Filial V: Av. Gerassina Tavares, 750, São José do Rio Preto/SP.

Distribuído por: 3M do Brasil Ltda.

Matriz: Rod. Anhanguera, Km 110, Sumaré/SP

CNPJ: 45.985.371/0001-08 – Ind. Brasileira;

Filial V: Av. Gerassina Tavares, 750, São José do Rio Preto/SP

CNPJ: 45.985.371/0106-85 – Ind. Brasileira.