

# Modalità di applicazione

3M™ Bair Hugger™ Coperta Upperbody Multiposizione modello 62200



## 1. Posizionamento

Dopo aver completato il posizionamento del paziente, applicare la coperta. Il lato traforato della coperta deve essere a contatto con il paziente.



## 2. Applicazione

Modellare la coperta intorno al paziente in modo da coprire la maggior area possibile del corpo.



## 3. Rimozione

Rimuovere il liner delle strisce adesive.



## 4. Adesione

Far aderire la coperta alla cute del paziente nella zona desiderata.



## 5. Fissaggio

Utilizzare le strisce e/o le fettucce per fissare la coperta se necessario.



## 6. Copertura

Coprire la testa del paziente intubato con l'apposito telo trasparente.



## 7. Connessione

Connettere il tubo alla coperta utilizzando l'apposita porta.\*



## 8. Aggancio

Fissare il tubo ad un sopporto, utilizzando il gancio di sicurezza in dotazione.



## 9. Insufflazione

Accendere l'unità di riscaldamento per cominciare la terapia di riscaldamento.



Applicazione in posizione Beach Chair.



Applicazione in posizione laterale per spalla.