


3M™ Cavilon™ Protocol voor optimale huidzorg

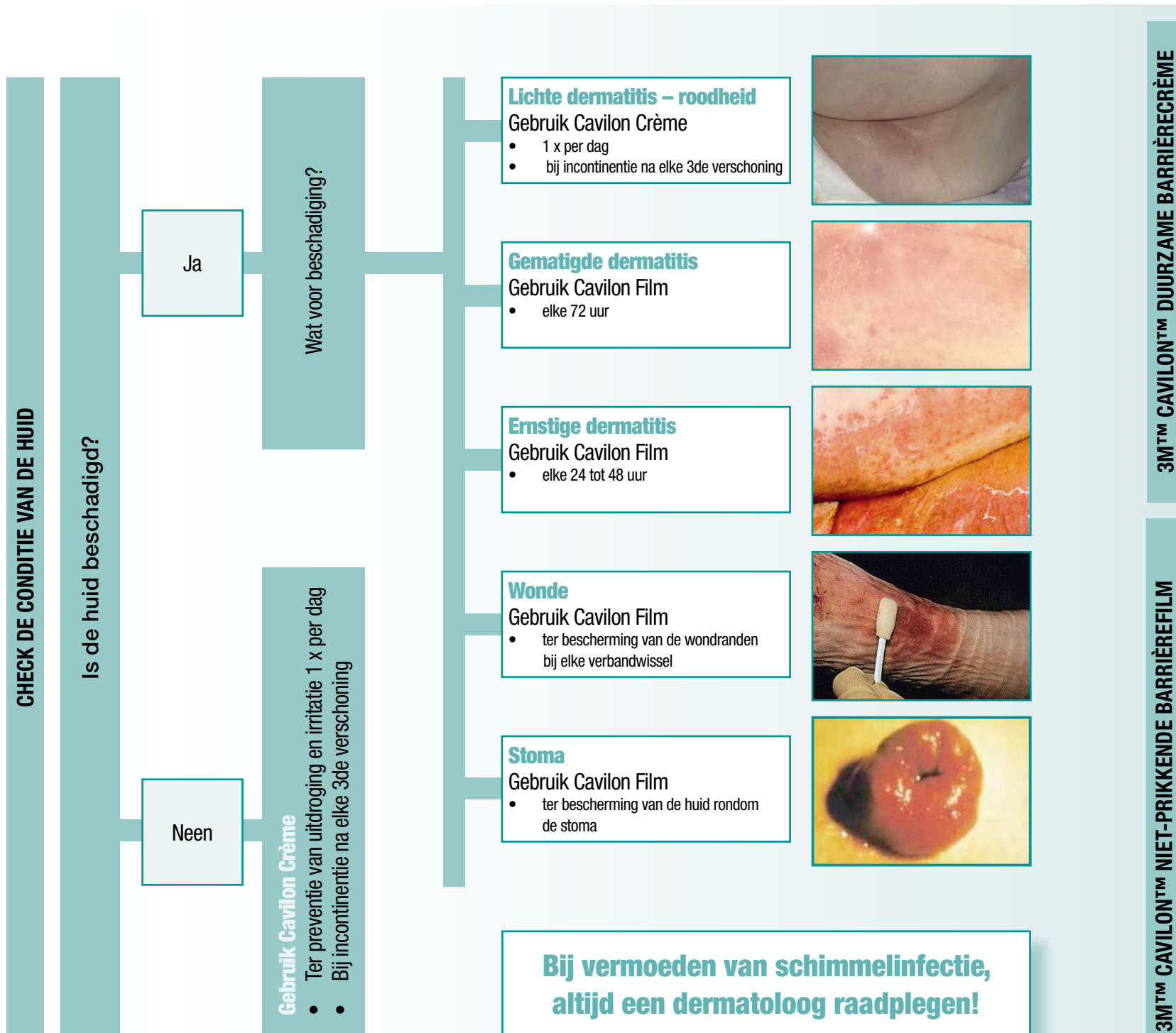

3M™ CAVILON™ DUURZAME BARRIÈRECRÈME

3M™ Cavilon™ Duurzame Barrièrecrème

voorziet in een unieke, langdurige bescherming tegen lichaamsvloeistoffen en hydrateert tevens de huid. Het wordt aanbevolen bij een intacte of droge huid, ter voorkoming van huidbeschadigingen. De geconcentreerde samenstelling zorgt ervoor dat maar weinig crème nodig is om de huid optimaal te beschermen gedurende 48 uur. De crème is verkrijgbaar in een 92g tube, 28g tube of handige 2g zakjes voor een enkele behandeling.



Gebruiksaanwijzing:

- Reinig de huid met water en een neutrale zeep
- Goed laten drogen
- Breng een kleine hoeveelheid aan (druppel ter grootte van de vingertop volstaat meestal)
- De crème goed inwrijven en minstens 30 seconden laten drogen
- Als de huid na het aanbrengen vettig aanvoelt, heeft u teveel gebruikt



3M™ Cavilon™ Niet-prikkende Barrièrefilm

is een alcoholvrije, transparante barrièrefilm welke een ademende barrièrelaag op de huid vormt. Cavilon Film beschermt de huid tegen het binnendringen van vocht, zoals urine, feces en andere lichaamsvloeistoffen en voorkomt huidbeschadigingen door kleeflagen en frictie. Het is verkrijgbaar in drie eenvoudig toepasbare toedieningsvormen: 1ml swab, 3ml swab of 28ml spray. Cavilon bevat geen alcohol en prikt dus niet, zelfs niet op een beschadigde huid en biedt tot 72 uur bescherming.



Gebruiksaanwijzing:

- Reinig de huid met water en een neutrale zeep
- Goed laten drogen
- In geval van huidplooien de huid goed openspreiden
- De spuitkop van de spray op 10 tot 15 cm van de huid houden
- Minstens 30 seconden laten drogen alvorens de huid terug in de oorspronkelijke positie te brengen, of alvorens een verband aan te brengen
- Verwijderen is niet nodig



Consulteer de nieuwe Cavilon website op www.cavilon.be, voor meer uitleg, brochures en tools.