



# Applikations- und Entfernungsanleitung

## Applikation



1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Tegaderm™ CHG Verband. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche des Verbandes ab. Drehen Sie den Verband, damit die Klebefläche zur Hautoberfläche zeigt.




2. Legen Sie das CHG-Gelpad mittig auf die Kathetereintrittsstelle und modellieren Sie es um den Katheter und – wenn vorhanden – Nahtplatte an.



3. Kleben Sie die verstärkten Flügel des Verbandes eng um den Katheter und leicht überlappend fest.



4. Streichen Sie den Tegaderm™ CHG Verband von der Mitte nach außen mit sorgfältigem Druck fest. Ziehen Sie danach den Applikations-Papierrahmen in flachem Winkel vom Verband ab.

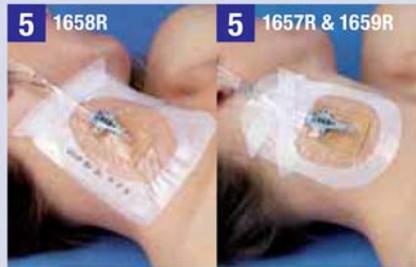

5. Fixieren Sie den Katheter, indem Sie einen Pflasterstreifen unter und einen über den Schlauch aufkleben. Tegaderm™ CHG 1658R enthält nur einen Pflasterstreifen, der unter den Schlauch geklebt wird, um den Katheter zu sichern.



6. Tragen Sie auf dem Dokumentationsstreifen den Verbandwechsel gemäß Ihren hausinternen Vorschriften ein. Kleben Sie den Dokumentationstreifen auf den Verband. Sichern Sie Katheterschläuche oder -verlängerungen.

## Hinweise zur Entfernung



1. Entfernen Sie die Pflasterstreifen von den Schläuchen.



2. Ziehen Sie langsam und vorsichtig eine Seite des Tegaderm™ CHG Verbandes in Richtung der Kathetereintrittsstelle oder in Haarwuchsrichtung von der Haut ab. Zur leichteren Entfernung kann ein medizinisches Klebstofflösendemittel verwendet werden, was jedoch im Regelfall nicht notwendig ist.



3. Fassen Sie beim Abziehen des Verbandes das Gelpad mit dem Daumen oder Zeigefinger. Der Verband sollte ohne Beschädigung des Gelpads abgezogen werden. Ziehen Sie den Verband in Richtung der Kathetereintrittsstelle und halten Sie Haut und Katheter fest, damit der Katheter nicht verrutscht. Ziehen Sie den Verband nicht senkrecht von der Haut ab, da dies zu Hautverletzungen führen kann.