

Aftryksløsninger

Imprint™ 4 Preliminary

A-silikone aftryksmateriale



Dine alginat indikationer
fortjener det bedste!

3M ESPE

Imprint™ 4 Preliminary

A-silikone materiale til alginatindikationer

På tide at droppe de støvede vaner

Imprint™ 4 Preliminary giver tandlæger mulighed for at tage aftryk med et A-silikone materiale, hvor de ellers ville have anvendt et alginat materiale.

Du får et aftryk, som er meget præcist og dimensionsstabilt og som derfor kan gemmes og udstøbes flere gange.

Samtidig er den automatiske dosering med Pentamix™ 3 eller Pentamix™ Lite hurtig og hygiejnisk/reng.

		Maksimal arbejdstid (23 °C)	Intraoral afbindingstid (37 °C)
HURTIG	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick	1:00	1:30
REGULAR	Imprint™ 4 Preliminary Penta™	1:30	2:00

Indikationer:

- Aftryk til fremstilling af provisorier
- Aftryk af antagonist
- Aftryk til studiemodeller
- Ortodontiske aftryk
- Aftryk til individuelle skinner

Fordele ved Imprint™ 4 Preliminary A-silikone materiale:

- ▶ **Tidsbesparende og renlig automix dosering**
Hurtig, nem blanding med ensartet kvalitet sikrer præcise aftryk.
- ▶ **Aftryk kan opbevares længe og udstøbes, når det ønskes**
Giver fleksibilitet og effektivitet.
- ▶ **Kan udstøbes flere gange uden at præcisionen forringes**
Gør eventuel omlavning af modeller nemmere.
- ▶ **Hydrofilt materiale**
Gør udstøbning nemmere, kræver ikke forudgående overfladebehandling og sikrer en høj kvalitet af modellen.
- ▶ **Nem og grundig desinfektion**
Optimal hygiejne.
- ▶ **Frisk farve og mulighed for at scanne aftryk**
Nem kontrol af aftryk og adgang til digitalt workflow.
- ▶ **Mint smag**
Behageligere for patienten.



minary

Bedre end alginat

Imprint™ 4 Preliminary A-silikone materiale

Ingen håndblanding og efterfølgende rengøring

Ved tryk på en knap doserer Pentamix™ systemet en fuldstændig homogen og blærefri blanding i nøjagtig den ønskede mængde.

Aftryk kan opbevares længe og udstøbes, når det ønskes

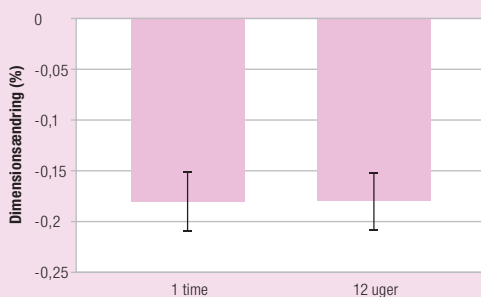


Fig. 1: Dimensionsændring for aftryk taget med Imprint™ 4 Preliminary A-silikone materiale efter 1 time og 12 uger. Kilde: 3M ESPE interne data

Aftryk viste så godt som ingen dimensionsændring i en periode på 3 måneder og kan udstøbes, når det er nødvendigt. Desuden kan aftrykket udstøbes flere gange, hvilket gør det nemmere at omlave modeller og provisorier.

Optimal hygiejne

Aftryk kan desinficeres grundigt uden risiko for fejl på grund af dimensionsændringer. Ingen problemer med kontaminerede aftryk.

Alginater

- Adskillige arbejdsstrin
- Støvet håndblanding
- Ikke homogen blandingskvalitet

Alginat aftryk skal udstøbes med det samme på grund af skrumpning og kan kun udstøbes én gang.

Alginat aftryk kan ikke desinficeres optimalt. Samtidig kan desinficeringen medføre dimensionsændring.

Passer perfekt sammen: Imprint 4 Preliminary A-silikone materiale &

Protemp™ 4 provisorisk materiale

Det ultimative materiale til alle aftryksbaserede provisorier

Et stærkt team til fremstilling af provisorier med god pasform, reduceret iltinhiberingslag og en glat overflade, så de nemt kan fjernes fra aftrykket.

Du og dine patienter vil få glæde af et stærkt og æstetisk provisorie.



Gør et valg for at øge effektiviteten i din praksis

HURTIGSTE OG SMALLESTE MASKINE PÅ MARKEDET!

Pentamix™ 3 automatisk blandemaskine: 3M ESPE's topmodel indenfor blandemaskiner.



LET OG BÆRBAR BLANDEMASKINE!

Pentamix™ Lite automatisk blandemaskine: Den enkle model med lidt langsommere doseringshastighed.

3M™ ESPE™ Impression Tray

Skeadhæsv er ikke nødvendigt! Engangsskeen **3M ESPE Impression Tray** er klar til brug og sparer tid: Vælg en passende skestørrelse (S, M eller L) og fyld den direkte fra blandemaskinen.



Bestillingsinformation

Varenr.	Beskrivelse
	Value Packs
71523	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ 6 stk. base a 300 ml, 6 stk. katalysator a 60 ml
71524	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick 6 stk. base a 300 ml, 6 stk. katalysator a 60 ml
	Refiller
71521	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
71522	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick 2 stk. 300 ml base, 2 stk. 60 ml katalysator
	3M™ ESPE™ Impression Tray refiller (indhold: 10 skeer)
71615	Størrelse S, overkæbe
71616	Størrelse M, overkæbe
71617	Størrelse L, overkæbe
71618	Størrelse S, underkæbe
71619	Størrelse M, underkæbe
71620	Størrelse L, underkæbe
	Pentamix™ – Automatisk blandemaskine
77903	Pentamix™ Lite automatisk blandemaskine – 230 V/50 Hz inkl. 1 stk. Penta™ materialebeholder
77871	Pentamix™ 3 automatisk blandemaskine – 230 V

Varenr.	Beskrivelse
	Tilbehør
71525	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ materialebeholder til Pentamix™ 2
71526	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick materialebeholder til Pentamix™ 2
71527	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ materialebeholder til Pentamix™ 3
71528	Imprint™ 4 Preliminary Penta™ Super Quick materialebeholder til Pentamix™ 3
77944	1 stk. Penta™ materialebeholder til Pentamix™ Lite
77949	50 stk. røde Penta™ blandespidser
	Protemp™ 4 provisorisk materiale
46953	Introsæt - farve A2 1 stk. magasin a 50 ml farve A2; 16 stk. Garant™ blandespidser - blå; 1 stk. Garant™ pistol 10:1
	Refiller (indh. 1 stk. magasin a 50 ml og 16 stk. Garant™ blandespidser - blå)
46959	Bleach
46954	A1
46956	A2
46957	A3
46972	A3,5
46960	B3

Imprint™ 4 Preliminary A-silikone aftryksmateriale er en del af Imprint™ 4 familien. **Prøv også det alsidige udvalg af Imprint™ 4 A-silikone aftryksmaterialer til dine daglige aftryk samt bidregistreringsmaterialet Imprint™ 4 Bite.**



3M ESPE

3M ESPE Dentalprodukter
3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tel: 43 48 01 00
Fax: 43 20 15 65
e-mail: dkdental@mmm.com
www.3MESPE.dk

3M, ESPE, Garant, Imprint, Penta og Pentamix er varemærker hos 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Anvendes under licens i Canada.

Alla andre varemærker tilhører andre firmaer.

©2014, 3M. Alle rettigheder forbeholdes.

BR61/000204-1