



器械润滑防锈剂


——专业的器械润滑解决方案






器械灭菌操作程序指南

- 常规操作

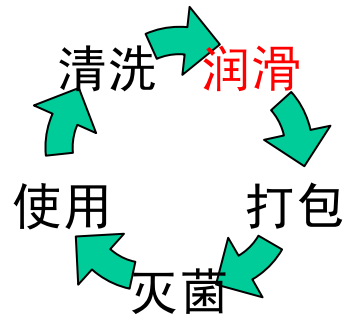

- 器械表面有明显锈斑

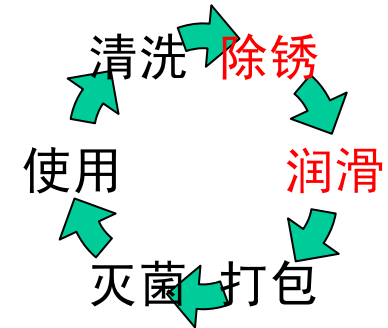

强调专业清洗，润滑，无需次次除锈





器械润滑防锈剂的特性

- 器械润滑防锈剂含有天然抗锈蚀剂和特有润滑成分
- 使用后在器械的表面形成一层可被灭菌剂穿透的保护膜
- 润滑防锈同步，有效延长器械使用寿命





器械润滑防锈剂

特性 (Feature)	好处 (Benefit)
水溶性润滑剂配方	灭菌剂有效穿透，保证灭菌效果
在器械表面形成保护膜	抗锈蚀，延长器械使用寿命
配方中特有抗锈蚀成分	润滑防锈同步，防止腐蚀，杜绝生锈
由温和无害的成分构成	保护器械和使用人员能安全使用
水溶性可有效浸泡器械	有效松解关节部位，使关节灵活
本品为浓缩液，稀释使用	经济实用，使用方便





使用指导

- 稀释比率：

手工润滑建议用1：6清水稀释

（有条件可使用软化水或去离子水）

自动清洗机常用1：400—500稀释；

- 润滑操作频率：

手工润滑—每次清洗后

清洗机—每次

- 稀释液不用时候请遮盖

- 手工润滑时稀释液每天更换

3M

天然配方的锈蚀抑制剂/润滑油
3M外科器械润滑油
保护外科器械和一般金属器械安全有效

1加仑(3.8L)

特点	好处
防止腐蚀	防锈物成分防止生锈
润滑作用	减少摩擦降低磨损
基本设备维护	延长设备使用寿命, 减少维护成本
机械零件清洁	保持器械设备清洁度
易于使用	安全无毒物质, 操作简便

使用指导

- ◎手工润滑建议用1:6清水稀释, 自动清洗机建议按照1:500使用, 稀释后应为均匀光亮的液体。
- ◎手工润滑请将清洗干净的设备置于稀释的溶液中浸泡30-60秒钟。
- ◎取出设备后晾干, 注意不要用水冲洗或者擦拭润滑后的设备, 这会破坏表面的保护膜。
- ◎打包后进行灭菌。
- ◎稀释液不用时候请遮盖。
- ◎手工润滑时建议每2-3天更换一次稀释液。

警告: 请勿使用到皮肤和黏膜部位。

3M 微创外科器械有限公司制造, 微创外科器械(上海)国际贸易有限公司
联系地址: 上海微创外科器械有限公司 电话: 86-21-42752525 邮编: 200233