

Port adéquat du respirateur

Port du respirateur à bords repliables



1 Retirer le respirateur de son emballage et le tenir courroies vers le haut. Placer la courroie inférieure sous les rabats centraux près du message de mise en garde.



2 Ouvrir complètement les rabats supérieur et inférieur, en pliant la pince nasale autour du pouce au centre de la pièce en mousse. Les courroies devraient se séparer lorsque l'on ouvre les rabats. S'assurer que le rabat inférieur est déplié et complètement ouvert.



3 Placer le respirateur sur le visage de manière que la pièce en mousse soit appuyée contre le nez et que le rabat inférieur soit bien placé sous le menton.



4 Faire passer la courroie supérieure par-dessus la tête et la placer sur le dessus de la tête. Faire passer la courroie inférieure par-dessus la tête et la placer autour du cou, sous les oreilles.



5 Placer le respirateur de manière à obtenir un ajustement confortable en tirant le rabat supérieur vers la racine du nez et en plaçant le rabat inférieur sous le menton.



6 Placer les doigts des deux mains en haut du nez et modeler la pince nasale de manière à obtenir un bon ajustement.



Respirateur à bords repliables sans soupape



Respirateur à bords repliables avec soupape

Vérifier l'ajustement du respirateur à bords repliables au moment de chaque utilisation.

1a **Respirateurs sans soupape** Placer une ou les deux mains de manière à recouvrir complètement la partie centrale. *Inhaler et expirer profondément.* Si l'on détecte des fuites d'air au niveau du nez, ajuster à nouveau la pince nasale comme le décrit l'étape n° 6. Si l'on détecte des fuites au niveau des extrémités du respirateur, ajuster les rabats et les courroies. Si l'on ne peut obtenir un bon ajustement, ne pas pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son superviseur



1b **Respirateur avec soupape** Placer une ou les deux mains de manière à recouvrir complètement la partie centrale et *inhaler* profondément. Si l'on détecte des fuites d'air au niveau du nez, ajuster à nouveau la pince nasale comme le décrit l'étape n° 6. Si l'on détecte des fuites au niveau des extrémités du respirateur, ajuster les rabats et les courroies. Si l'on ne peut obtenir un bon ajustement, ne pas pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son superviseur.

