

Ayudándole a Usarlo Correctamente

Cómo usar su respirador de pieza facial filtrante con bandas ajustables y válvula de exhalación

1



Coloque el respirador cubriendo su boca y nariz. Asegúrese que el clip metálico quede arriba.

2



Lleve la banda inferior por arriba de su cabeza hasta colocarla debajo de sus orejas, en la parte trasera de su cuello.

3



Lleve la banda superior por arriba de su cabeza, hasta apoyarla en la corona de la cabeza, por encima de sus orejas.

4



Sin quitar el respirador, ajuste las bandas hasta que lo sienta seguro. Para ajustar el respirador tire suavemente de los extremos de las bandas. Para aflojar el respirador, presione en la parte de atrás de la hebilla.

5



Utilizando los dedos índice y medio de las dos manos, empezando por la parte superior, moldee el clip metálico alrededor de la nariz para asegurar un ajuste seguro.



Respirador pieza facial filtrante con bandas ajustables con hebilla y válvula de exhalación

6

6 Pruebe el sello de su respirador de pieza facial filtrante con válvula cada vez que se coloca el respirador.



Para probar el sello entre el respirador y la cara coloque ambas manos completamente sobre el respirador e inhale profundo y rápidamente. Tenga cuidado de no alterar la posición del respirador. Debe sentir una presión negativa leve dentro del respirador. Si alguna fuga de aire es detectada, reajuste la posición del respirador siguiendo los pasos #4 y #5. Si usted **NO PUEDE** lograr un sello apropiado, **NO ENTRE** al área contaminada. Hable con su supervisor.



ADVERTENCIA

Estos respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertas partículas presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario tiene que leer y entender las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Se tiene que implementar un programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos del estándar OSHA 1910.134 y debe incluir entrenamiento, pruebas de ajuste y evaluación médica. En Canadá, se tiene que cumplir con los requerimientos del estándar CSA Z94.4 y/o los requerimientos jurisdiccionales aplicables, según sea apropiado. **El mal uso puede dar como resultado enfermedad o muerte.** Para un uso adecuado, vea las instrucciones del empaque, vea a su supervisor o llame al Servicio Técnico de 3M en los Estados Unidos al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.