

Daumenschiene mit 3M™ Primacast



- 1 Primacast Schiene 5,1 x 25,4 cm oder
1 Primacast Schiene 7,6 x 30,5 cm
- 1 Rolle Polsterwatte
- 30 cm Stockinette, 5 cm
- 10 cm Stockinette, 2,5 cm
- 1 Rolle 3M Coban 5 cm



1
Hand und Daumen in die richtige Position bringen und Stockinette (5 cm) um den Unterarm anlegen. Die zweite Stockinette (2,5 cm) über den Daumen ziehen.



2
Daumen, Hand und Unterarm mit Polsterwatte umwickeln.



3
Die leicht gefächerte Primacast Schiene kurz in kaltes Wasser tauchen und anschließend gut auswringen. Die Primacast Schiene nun über den Unterarm an- und unter dem Daumen durchlegen.

Daumenschiene mit 3M™ Primacast



4 Stockinette am Daumen, Hand und Unterarm zurückschlagen.



5 Angelegte Primacast Schiene mit einer evtl. farbigen Binde (z.B. 3M Coban) anwickeln



6 Ansicht des fertigen Verbandes.

3M

3M Medica

Hammfelddamm 11

41453 Neuss

Info-Hotline 08 00 - 1 00 38 30