



Der Daumenverband mit 3M™ SoftCast™



- 1 Rolle SoftCast, 2,5 cm
- 1 Stockinette MS01, 5 cm
- 1 Stockinette MS02, 15 cm
- Klettostar flausch, klebend, 5 cm
- Klettostar haft, klebend, 5 cm



1 Stockinette MS02 über die Hand ziehen, Stockinette MS01 über den Daumen ziehen.



2 SoftCast an der lateralen Seite der Hand ansetzen und schräg unter dem Daumen hindurch wickeln.



3 Anschließend Tour zwischen Daumen und Zeigefinger hindurch wickeln.



4 Dann um den Daumen herumwickeln.



5 Mit einer halbüberlappenden Tour die Hand und den Daumen komplett umwickeln.



6 Klettostar (flausch und haft etwas versetzt aufeinander) auf die dorsale Seite der Hand aufkleben.



7 Mit der restlichen SoftCast-Binde die Hand nochmals komplett umwickeln.



8 Mit nasser Idealbinde den gesamten Verband zum besseren Anmodellieren und schnellerer Aushärtung für ca. 3 bis 4 Minuten umwickeln.



9 Ausmodellieren des Verbandes.



10 Aufschneiden der oberen Lagen des Verbandes an der dorsalen Seite, zwischen den versetzten Klettverschlüssen.



11 Aufklappen des Klettverschlusses ...



Der Daumenverband mit 3M™ SoftCast™



12 ... und untere Lagen des Verbandes aufschneiden



13 Kanten mit der Schere zurechtschneiden.



14 Verband wieder anlegen.



15 Fertiger Verband.

3M

3M Medica

Hammfelddamm 11, 41453 Neuss
Info-Hotline 08 00 - 1 00 38 30