

Schiene mit 3M™ Primacast bei Humerus-Frakturen



- 1 Primacast Schiene 10.1 x 76,2 cm
- 1 – 2 Rolle/n Polsterwatte
- 60 cm Stockinette, 7,5 cm
- 1 Mull- oder Idealbinde
- 1 Rolle 3M Coban 7,6 cm



1 Stockinette längs auf einer Länge von ca. 30 cm einschneiden, über den Oberarm ziehen und um den Hals an der gegenüberliegenden Seite festknoten.



2 Polsterwatte um den Oberarm einschließlich des Ellenbogens wickeln.



3 Polsterwatte an der Schulter hoch genug (über die Schulterkappe) anwickeln.




4 Primacast Schiene etwas gefächert auslegen.



5 Primacast Schiene kurz in kaltes Wasser tauchen, gut auswringen und in der Achselhöhle ansetzen

Schiene mit 3M™ Primacast bei Humerus-Frakturen

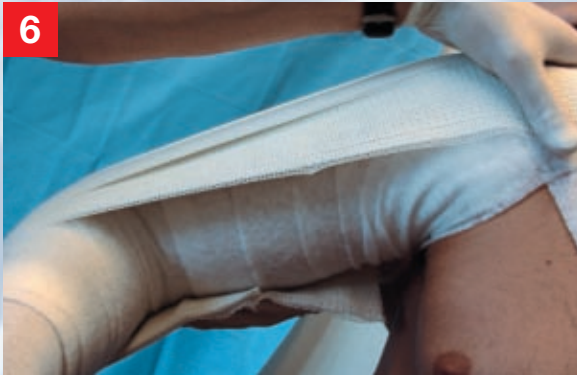

6

... über dem Ellenbogen bis zur Schulterkappe ...



7

... und mit einer Mull- oder Idealbinde anwickeln.



8

Primacast Schiene an den Kanten zurechtschneiden.



9

Primacast Schiene mit der Mullbinde weiter anwickeln und an der Schulterkappe gut anmodellieren.



10

Am Hals verknötete Stockinette losschneiden und über die Kante der Primacast Schiene schlagen.



11

Anschließend den Oberarm mit einer kohäsiven Binde (z.B. 3M Coban) umwickeln. Ansicht des fertigen Verbandes.

3M

3M Medica

Hammfelddamm 11, 41453 Neuss, Info-Hotline 08 00 - 1 00 38 30