

Pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}
Directives d'application et de retrait

Pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC}



Pour mettre à profit le
pouvoir de l'argent

Nouveau pansement de la gamme
réputée de pansements Tegaderm^{MC}

3M

Pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Directives d'application et de retrait



Indications

Le pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} s'utilise comme pansement primaire pour le traitement de plaies d'épaisseur partielle à complète avec exsudat modéré à abondant, notamment celles ci-dessous.

- Plaies postopératoires
- Plaies traumatiques (lésions cutanées, blessures traumatiques ou incisions)
- Ulcères de jambes
- Plaies de pression
- Ulcères diabétiques
- Sites donneurs et zones de greffe cutanée
- Brûlures au premier et au deuxième degré (superficielles et profondes)

Le pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} peut être appliqué sous des bandages compressifs.

Contre-indications

Le pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} est déconseillé dans les cas ci-dessous.

- Personnes présentant une sensibilité connue aux alginates ou à l'argent.
- Utilisation comme éponge chirurgicale ou pour une implantation chirurgicale
- Maîtrise d'un saignement abondant
- Application directe sur des plaies sèches ou produisant une faible quantité d'exsudat.

Précautions et considérations

- Lorsqu'une plaie est infectée, envisager une thérapie antimicrobienne systémique. Le pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} peut être utilisé, sous surveillance médicale, de pair avec des antibiotiques systémiques.
- Le pansement peut adhérer à des plaies sèches ou produisant une très faible quantité d'exsudat. Si le pansement s'enlève difficilement, l'humecter avec une solution saline stérile avant de le retirer.
- Il se peut que la quantité d'exsudat produite par la plaie diminue rapidement pendant l'utilisation. Si le pansement adhère à la plaie ou au site parce qu'il a séché, son retrait peut en provoquer le

déchirement. Lorsqu'il utilise le pansement, le professionnel de la santé peut augmenter la fréquence des changements du pansement pour en maintenir le taux d'humidité et pour observer l'état de la plaie ou du site.

- Les onguents à base de pétrole peuvent diminuer le rendement du pansement.
- Enlever le pansement avant les séances d'IRM (imagerie par résonance magnétique).
- Ne pas utiliser si la pochette individuelle est ouverte ou endommagée.

Directives à suivre avant d'appliquer le pansement

Remarque : Suivre les directives de l'établissement en matière de prévention des infections.

Avant d'appliquer le pansement


1. L'utilisation d'un pansement antimicrobien devrait faire partie d'un programme de soins destiné à la préparation du lit de la plaie.
2. Si l'on prévoit utiliser un pansement secondaire adhésif, couper les poils superflus autour de la plaie.

Remarque : Si la peau entourant la plaie s'irrite facilement ou si l'on s'attend à un écoulement au-delà des bords de la plaie, on peut appliquer un protecteur cutané, tel que le protecteur cutané


non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC}. Le cas échéant, laisser sécher le protecteur cutané avant de poursuivre.

3. Examiner la plaie et choisir un pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} dont la superficie est légèrement supérieure à celle de la plaie.
4. Choisir un pansement secondaire qui convient à la quantité d'exsudat produite par la plaie, comme par exemple le pansement en mousse adhésif Tegaderm^{MC} 3M^{MC} ou le pansement en mousse Tegaderm^{MC} 3M^{MC} (non adhésif). S'assurer que le pansement secondaire choisi dépasse les bords de la plaie d'au moins 2,54 cm (1 po).


Application du pansement plat

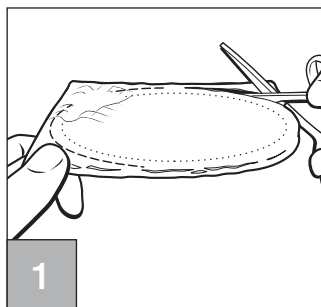

Pour les plaies superficielles, couper ou plier le pansement de manière à ce qu'il convienne à la taille de la plaie et en veillant à ce qu'il dépasse les bords de celle-ci d'au plus 3,175 mm (1/8 po), puisque le pansement rétrécira légèrement à mesure qu'il absorbera l'exsudat.

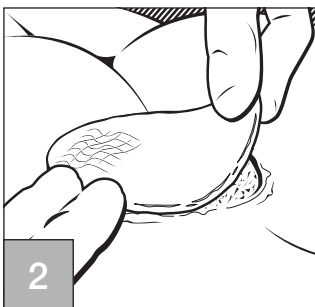


Appliquer le pansement sur le lit de la plaie. Pour les plaies profondes, placer le pansement dans la plaie sans le comprimer, en s'assurant qu'il ne chevauche pas la marge de la plaie et la peau l'entourant.

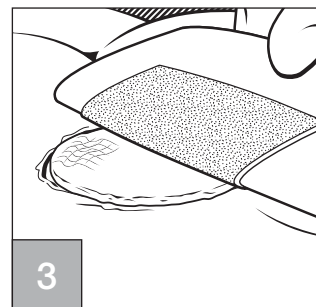


Assujettir le pansement à l'aide d'un pansement secondaire. Mettre au rebut la partie de pansement non utilisée.


Application du pansement en forme de cordon

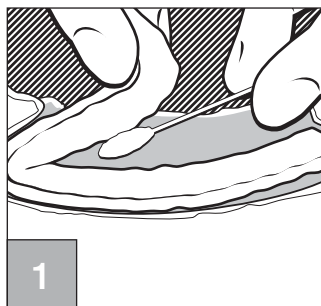

À l'aide d'un coton-tige stérile ou d'un doigt ganté, placer doucement le pansement en forme de cordon dans la plaie.

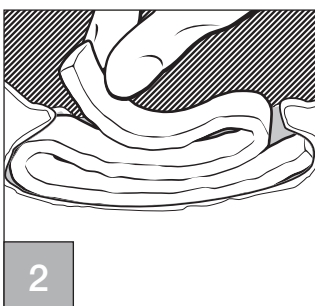


S'assurer que le pansement recouvre toute la surface de la plaie, dont les zones de décollement ou de tunnellisation.

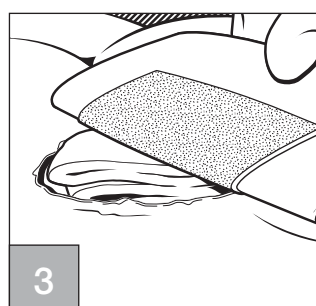


Assujettir le pansement à l'aide d'un pansement secondaire. Mettre au rebut la partie de pansement non utilisée.


Retrait du pansement plat ou en forme de cordon

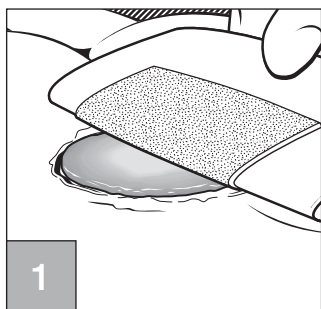

Retirer doucement le pansement secondaire.

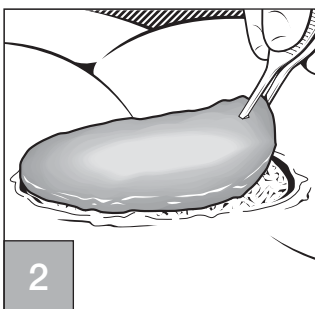


Retirer doucement le pansement de la plaie.

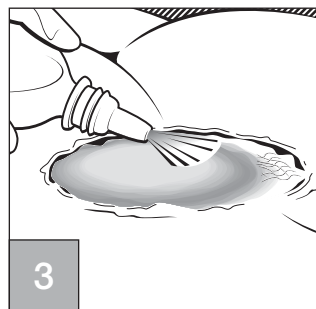

Si le pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} 3M^{MC} semble sec ou adhère au lit de la plaie, le saturer d'une solution saline stérile ou d'un nettoyant pour les plaies avant de le retirer. Mettre le pansement au rebut.

Pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm 3M

Renseignements pour commander

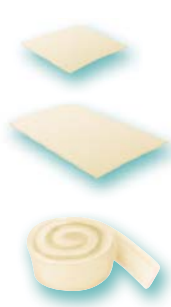

Numéro de référence	Description	Pansements/boîte	Boîtes/caisse
90301	Pansement d'alginate aux ions d'argent 5,08 x 5,08 cm (2 x 2 po)	10	4
90303	Pansement d'alginate aux ions d'argent 10,16 x 12,7 cm (4 x 5 po)	10	4
90307	Pansement d'alginate aux ions d'argent en forme de cordon 2,54 x 30,48 cm (1 x 12 po)	5	4

Produits compatibles

Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC}

Pansements d'interface Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansements hydrocolloïdes Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansements absorbants en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Pansements en mousse Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 3M^{MC}

Pansements
Tegaderm^{MC} 3M^{MC} SIMPLÉS. FIABLES. RÉPUTÉS.

Pour en savoir plus sur les pansements d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC}, visitez le site www.3m.com/Tegaderm-AlginateAg.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre gamme de produits de soins de la peau et des plaies, visitez le site www.3M.com/skinhealth ou communiquez avec le représentant de la Division des soins de la peau et des plaies de 3M de votre région ou le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.



**Division des soins de la peau
et des plaies**

Compagnie 3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

Canada

1 800 364-3577

www.3m.com/HealthCare

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.

© 3M, 2009. Tous droits réservés.

3M, Tegaderm, Cavilon et Coban sont des marques de commerce de la Compagnie 3M, utilisées sous licence au Canada.

0910-07543F