

# Pour une vie active

### Compression moulante fiable

# Compressothérapie idéale pour les clients de toute taille et de toute forme ainsi que pour divers styles de mode de vie

Trois trousses pratiques qui facilitent la compressothérapie pour le clinicien et le client.

L'efficacité clinique du système de bandage compressif à deux couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> a été démontrée dans le cadre de deux études avec répartition aléatoire contrôlée<sup>1,2</sup>.

- Compression modérée ou élevée en fonction des besoins du client.
- Procure une compression soutenue pour une période allant jusqu'à sept jours².
- L'application s'enseigne et s'apprend rapidement et facilement<sup>4</sup>.
- Crée un manchon mince, léger et perméable à l'air qui permet aux clients de porter leurs propres chaussures et de reprendre ainsi leurs activités quotidiennes.

### Compression thérapeutique conçue pour le confort de tous les jours



#### Système de bandage compressif à deux couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Le système de bandage compressif à deux couches Coban<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>, qui se présente dans l'emballage violet, offre une compression élevée (35 à 40 mm Hg). Il est idéal pour la majorité des clients souffrant d'ulcères veineux de jambe, de lymphædème et d'autres affections pour lesquelles la compressothérapie est appropriée.

Tout indiqué pour les clients qui présentent un IPCB  $\geq 0.8$ .

La trousse de bandage de 10 cm (4 po) est surtout utilisée pour bander la jambe, du pied jusque sous le genou. La trousse de bandage de 15 cm (6 po) est surtout utilisée pour bander le genou et la cuisse. Elle sert également à bander une jambe forte sous le genou.

**2094** 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,5 v) **20096** 15 cm x 3,5 m (6 po x 3,8 v)

### Système de bandage compressif à deux couches Coban<sup>MC</sup> Lite 3M<sup>MC</sup>

Le système de bandage compressif à deux couches Coban<sup>MC</sup> Lite  $3M^{MC}$ , qui se présente dans l'emballage vert offre une compression modérée (30 à 35 mm Hg). Il convient aux clients moins tolérants à la compressothérapie³, y compris ceux atteints d'un ulcère d'étiologie mixte avec un IPCB  $\geq 0.5$ , aux nouveaux clients en compressothérapie, à ceux dont la tolérance est inconnue et à ceux qui sont frêles ou moins mobiles.

**2794** 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,5 v)





## Pour visionner les vidéos d'application et télécharger les documents de référence, veuillez consulter le site www.3m.ca/Coban2Layer.

Renseignements pour commander : Système de bandage compressif à deux couches Coban <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>			
	Système de bandage compressif à deux couches Coban <sup>MC</sup> Lite 3M <sup>MC</sup>	Système de bandage compressif à deux couches Coban <sup>MC</sup> 3M <sup>MC</sup>	
N° de référence	2794	2094	20096
Dimensions	10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 v)	10 cm x 2,7 m (4 po x 2,5 v)	15 cm x 3,5 m (6 po x 3,8 v)
Rouleaux/boîte	2 rouleaux (1 de chaque couche)	2 rouleaux (1 de chaque couche)	2 rouleaux (1 de chaque couche)
Boîtes/caisse	8	8	8

#### Bibliographie

- MOFFATT, C., L. Edwards, M. Collier, T. Treadwell, M. Miller, L. Shafer, R.G. Sibbald, A. Brassard, A. McIntosh, A. Reyzelman, P. Price, S.M. Kraus, S.A. Walters et K. Harding, « A randomized controlled 8-week crossover clinical evaluation of the 3M™ Coban™ 2 Layer Compression System versus Profore™ to evaluate the product performance in patients with venous leg ulcers », Int. Wound. J., vol. 5, n° 2 (2008), pp. 267 à 279.
- 2. MOSTI, G., A. Crespi et V. Mattaliano, « Comparison Between a New, Two-component Compression System With Zinc Paste Bandages for Leg Ulcer Healing: A Prospective, Multicenter, Randomized, Controlled Trial Monitoring Sub-bandage Pressures », Wounds, vol. 23, n° 5 (2011), pp. 126 à 134.
- 3. JUNGER, M., H. Haase, A. Ladwig, L. Schwenke, J. Bichel et J. Schuren, Compression therapy in patients with peripheral arterial occlusive disease: A prospective clinical study with the 3M™ Coban™ 2 Layer Lite Compression System for ABPI ≥ 0.5, données disponibles auprès de 3M, 2010.
- 4. COLLIER, M. et J. Schuren, « Ease of use and reproducibility of five compression systems », Journal of Wound Care, supplément de 3M (2007), pp. 8 à 10.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site <a href="https://www.3M.ca/coban2layer">www.3M.ca/coban2layer</a>, communiquer avec le représentant de la Division des produits de soins de la peau et de traitement des plaies de 3M de votre région ou avec le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé de 3M au 1 800 228-3957.



#### Offert au Canada par la:

Division des solutions pour soins aigus et continus Compagnie 3M Canada C.P. 5757 London (Ontario) N6A 4T1 Canada 1 800 364-3577 www.3m.ca/coban2layer 3M Deutschland GmbH Secteur soins de santé Carl-Schurz-Str.1 41453 Neuss, Allemagne Profore est une marque de commerce de Smith & Nephew. 3M et Coban sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada. © 2015, 3M. Tous droits réservés. 1506-01601 F