




3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced 1680 & 1682 –
Fixierverbände für die Pädiatrie

Applikationsanleitung

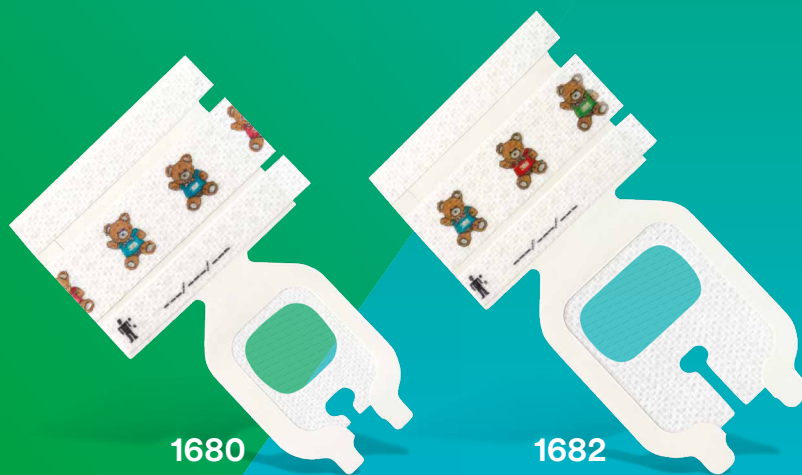

1680

1682

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced 1680 & 1682 – Fixierverbände für die Pädiatrie

Applikation



1. Legen Sie die I.V.-Kanüle entsprechend der jeweiligen Gebrauchsanweisung.



2. Halten Sie den Verband mit einer Hand an der klebstofffreien Haltetasche, so dass der Schlitz in Richtung Patientenfinger zeigt.



3. Positionieren Sie den transparenten Teil des Verbandes so über der Einstichstelle, dass der ausgestanzte Teil am Konus anlegt.



4. Modellieren Sie den abgelegten Verband mit leichtem Druck über der Einstichstelle und dem Konus an. Heben Sie den Katheterschlauch vorsichtig an und modellieren Sie den darunter liegenden Verband an.



5. Entfernen Sie nun den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an. Legen Sie den Rahmen für den späteren Gebrauch beiseite.



6. Modellieren Sie den Verband von der Mitte ausgehend mit leichtem Druck für eine bessere Haftung an.



7. Befestigen Sie den breiten Fixationsstreifen über dem Konus und modellieren Sie diesen an.



8. Mit dem schmalen Fixationsstreifen befestigen Sie nun das distale Verbandende unterhalb des Konus.



9. Mit dem ausgefüllten Dokumentations- und Fixationsstreifen beenden Sie die Verbandanlage über der noch freien Stelle am Konus. Modellieren Sie abschließend alles gut an.

Entfernen



1. Entfernen Sie zuerst die Fixationsstreifen.



2. Danach können Sie den Verband in flachem Winkel entfernen.



3. Stabilisieren Sie dabei die Kanüle mit der anderen Hand.



4. Entfernen Sie den Verband immer in Richtung der Einstichstelle.



3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11 · 41460 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-48 18 · Fax: 0 81 52 / 700 24 68
www.3MMedica.de · www.tegaderm.de

3M und Tegaderm sind eingetragene
Warenzeichen der 3M.
© 3M 2015. Alle Rechte vorbehalten.
4315417 09/15