

3M Soluções para Cuidados Crítico e Crônico

3M Steri-Strip™

Segurança e Praticidade

além das aparências

e ponto final

3M

3M Steri-Strip™

Suturas Cutâneas Adesivas Reforçadas

Fechar cortes cirúrgicos com mais segurança e conforto para o paciente, reduzindo a formação de cicatrizes e obtendo resultados esteticamente melhores agora é fácil e rápido com as Suturas Cutâneas Adesivas Reforçadas Steri-Strip™ da 3M.



UMA PODEROSA FERRAMENTA DE CONTROLE DAS INFECÇÕES DO SÍTIO CIRÚRGICO.

As infecções adquiridas durante ou após cirurgias são a segunda forma mais comum de contaminação no ambiente hospitalar, atingindo até 20% dos pacientes internados*. Com as Suturas Cutâneas Adesivas Reforçadas Steri-Strip™ você tem uma opção eficiente e econômica para prevenir as infecções de sítio cirúrgico em seu hospital, com significativas vantagens para o paciente.

* Klevens RM, Edwards JR, et al. Estimating health-care associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002. Public Health Reports 2007;122:160-166

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Suturas adesivas para fechamento da pele, que aumentam resistência à tensão da ferida ^{1,2 e 3}.
- Reduz a formação de cicatrizes e o risco de infecções, além de proporcionar melhor resultado estético quando comparado com suturas ou grampos ^{1 e 4}.
- Dorso poroso, sensível à pressão e reforçado por filamentos de poliéster para maior resistência.
- Cobertura adesiva hipoalergênica, livre de látex e confortável para o paciente.
- Mais econômico que adesivos cutâneos, suturas ou grampos ¹.
- Permite a remoção antecipada de grampos e suturas ^{1,2 e 3}.

1. Pepicello J, Yavorek H.: Experiência de cinco anos no fechamento de feridas abdominais com fitas adesivas. SG&O, 169:310-314,1989.

2. Chao T-C, Tsaez F-Y.: Fita de papel no fechamento de feridas abdominais. SG&O, 171; 65-67,1990.

3. Forrester JC.: A lei de Wolff em relação à cicatrização de feridas na pele. J Trauma, 10:770-779,1970.

4. Hirshman HP, Schuman, DJ, Kajiyama, G.: Penetração de Staphylococcus aureus em feridas suturadas. J Ortho Res, 2:269-271,1984.



Sutura Convencional

A sutura convencional frequentemente deixa uma cicatriz com aparência muito visível.

Steri-Strip™ 3M


A cicatrização com Steri-Strip™ é mais rápida e tem resultado esteticamente melhor.



CONFIRA AS ETAPAS DE APLICAÇÃO DAS SUTURAS ADESIVAS 3M STERI-STRIP™



1 Limpe e seque completamente a pele em uma área de no mínimo 5 cm ao redor da ferida.

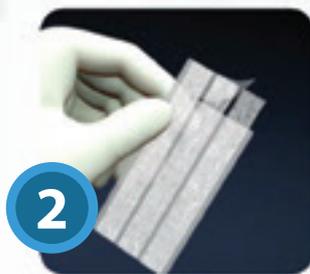

2 Abra a embalagem, retire a lâmina com as suturas e desprenda a lingueta de proteção.



3 Retire uma sutura da embalagem com luvas ou pinças estéreis por cima, em um ângulo de 90°.



4 Aplique a metade da sutura sobre a pele, no ponto médio da ferida, e pressione para alisar.




5 Aproxime as bordas da ferida o máximo possível e aplique a outra metade, alisando em seguida.



6 Feche o restante da ferida com quantas suturas adicionais forem necessárias, com espaço de 3 mm entre cada uma.

As suturas adesivas Steri-Strip™ estão disponíveis em vários tamanhos. Confira.

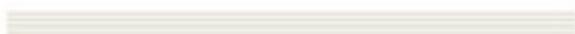

1540 • 0,3 cm x 7,5 cm (Tamanho Real)




1542 • 0,6 cm x 3,8 cm (Tamanho Real)




1541 • 0,6 cm x 7,5 cm (Tamanho Real)



1546 • 0,6 cm x 10 cm (Tamanho Real)

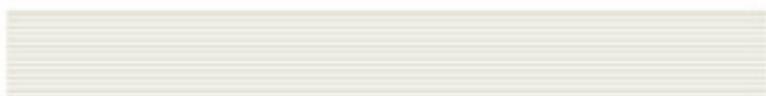

1547 • 1,2 cm x 10 cm (Tamanho Real)

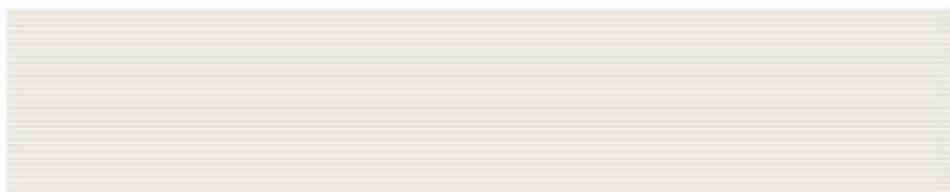

1548 • 2,5 cm x 12,5 cm (Tamanho Real)

Apresentação Comercial:

CÓDIGO	TAMANHO DO CURATIVO	SUTURAS POR ENVELOPE	ENVELOPES POR CAIXA
1540	0,3 cm x 7,5 cm	05	50
1541	0,6 cm x 7,5 cm	03	50
1542	0,6 cm x 3,8 cm	06	50
1546	0,6 cm x 10 cm	10	50
1547	1,2 cm x 10 cm	06	50
1548	2,5 cm x 12,5 cm	04	25

Fale com a 3M

0800-0132333

www.3M.com.br/assistenciaopaciente
3msolucoesparaenfermagem@mmm.com



facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem



youtube.com/3mSolucoesEnfermagem

