



# Cobertura Estéril e Visualização no Cateter Periférico

## Novo Tegaderm™ Basic 1620BR

Visualização e inspeção diária do ponto de inserção, possibilitando o diagnóstico precoce de complicações.



# Tegaderm™ Basic 1620BR

A fixação inadequada de cateteres pode gerar complicações que, além de ocupar um tempo precioso dos profissionais de enfermagem, colocam em risco a segurança do paciente. Por isso, escolher uma forma adequada e de acordo com as recomendações e práticas baseadas em evidências, é responsabilidade de quem sabe como é importante ser referência em tratamento de qualidade.

## As punções venosas periféricas:

- Ocorrem em **80%** dos pacientes atendidos nos hospitais
- São realizadas por **81%** dos profissionais de enfermagem
- Ocupam **75%** do tempo de trabalho da enfermagem

**CE** COBERTURA ESTÉRIL + **VI** VISUALIZAÇÃO

A 3M acaba de lançar mais um sucesso para fixação de cateteres periféricos: **Tegaderm™ Basic 1620BR**. Um fixador desenvolvido no Brasil e aprovado por enfermeiros brasileiros com o exclusivo sistema de Fixação Fácil e Guia Centralizador, Fita para Anotações, além da Cobertura Estéril transparente que permite a Visualização do ponto de inserção do cateter, a um preço realmente acessível.

## Veja como é fácil de aplicar:



**1.** Após a inserção do cateter, retire os papéis protetores do Tegaderm™ Basic 1620BR até que as fitas laterais comecem a aparecer.



**2.** Posicione o centro do filme transparente (marcado pelo guia centralizador) bem em cima do cateter. Com cuidado, fixe-o em cima do cateter e ao redor.



**3.** Termine de retirar os papéis protetores das fitas laterais, fixando-as. Faça as anotações necessárias nas fitas laterais (nome do profissional e data da aplicação do fixador).

## Características do

### Tegaderm™ Basic 1620BR

- Filme transparente estéril
- Visualização do ponto de inserção
- Guia centralizador de cateter
- Fitas laterais para sustentação e inclusão de data e nome do enfermeiro
- Barreira viral e bacteriana
- Hipoalergênico
- Resistente à água

## Vantagens em usar o

### Tegaderm™ Basic 1620BR

- Sistema de Fixação Fácil
- Baixo custo para o hospital
- Agilidade para tomada de decisões
- Maior permanência do cateter com até 72 horas de proteção
- Menos manipulação
- Permite a troca de vapores orgânicos e técnica asséptica

Centro de Relacionamento com o Consumidor

Help Line 3M: 0800-0556903

www.3m.com.br

e-mail: helplinehospitalar@mmm.com

