

Tegaderm™ Pad



Cobertura
com Segurança
e Praticidade




Tegaderm™ Pad

Curativo transparente com almofada não aderente

O Curativo Estéril Tegaderm™ Pad composto por uma almofada não aderente e absorvente em dorso de filme transparente e com adesivo hipoalergênico que não contém látex. É à prova de água e possui barreira contra bactérias e vírus*.

COBRINDO TODAS AS SUAS NECESSIDADES DE PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES DO CENTRO CIRÚRGICO

Proteger seus pacientes e sua instituição das infecções do sítio cirúrgico (ISC) não se restringe a um único fator. Por isso o Curativo Transparente Tegaderm™ Pad garante três características avançadas de desempenho. Todas elas com o objetivo de ajudar a reduzir o risco das infecções do sítio cirúrgico, em uma única etapa.

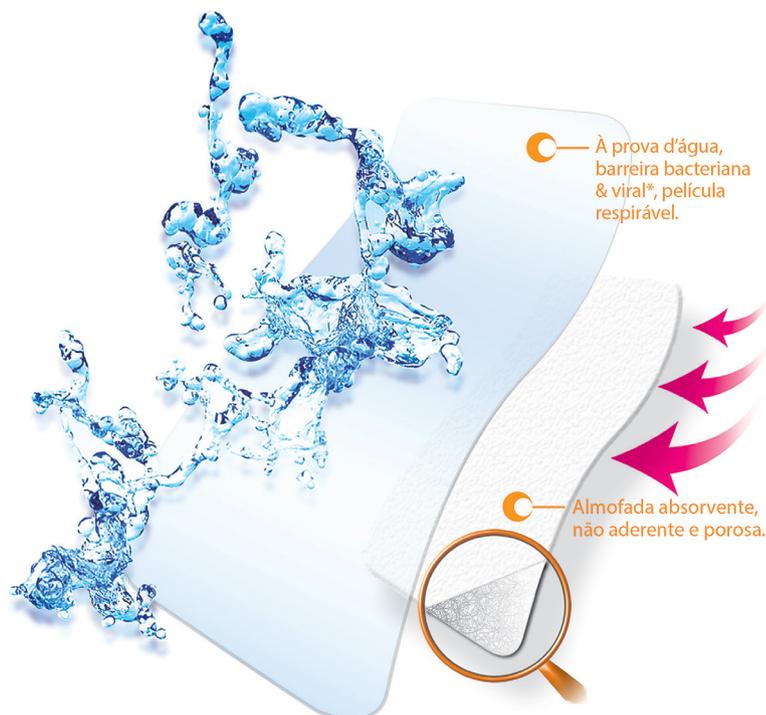

✓ SIMPLICIDADE

Facilidade aos profissionais:

- Presença de moldura, facilitando aplicação e evitando perdas.
- Adesivo sensível à pressão.

Conforto e segurança para o paciente:

- Conformável aos contornos do corpo.
- Adesivo com fácil remoção, assegurando a integridade da pele.
- Composição da almofada garante a não adesão ao leito da ferida, diminuindo a dor durante a retirada.
- Hipoalergênico.
- Livre de látex.

Flexibilidade:

- Variedade de tamanhos e formatos assegura uma rápida e precisa aplicação, de acordo com a necessidade de aplicação.

✓ DIFERENÇA TRANSPARENTE


Ao contrário dos curativos com gaze e fita, o filme transparente é **impermeável à água e permeável a vapores**, permitindo as funções normais da pele.

✓ BARREIRA COM DUPLA PROTEÇÃO

Barreira bacteriana: mesmo contra os organismos mais comumente associados à ISC: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.

Barreira viral: contra o HIV-1 e HBV e outros fluidos corpóreos potencialmente infecciosos enquanto os curativos permanecerem intactos e sem extravasamento*.

* Testes in vitro realizados no Nelson Laboratories mostram que o filme transparente dos curativos Tegaderm™ constitui uma barreira viral para vírus com diâmetro de 27 nm ou maiores enquanto o curativo permanecer intacto e sem vazamentos.

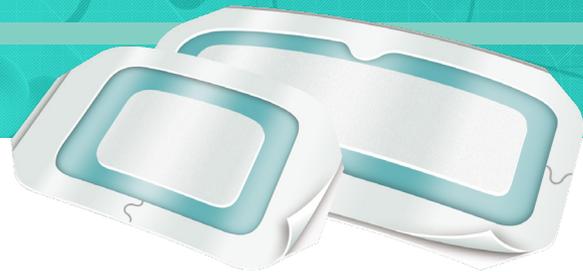

APLICAÇÕES SUGERIDAS

- Feridas pós-cirúrgicas.
- Feridas agudas (abrasões, lacerações, queimaduras).
- Feridas com drenagem leve a moderada.
- Feridas superficiais e de espessura parcial.

"Tratamento pós-cirúrgico da incisão: Após a cirurgia proteger a incisão com fechamento primário com curativo estéril durante 24 a 48 horas"

- Categoria IB

Fonte: CDC, 1999

IMPACTO DAS INFECÇÕES DO SÍTIO CIRÚRGICO


As infecções do sítio cirúrgico (ISCs) são a **2ª maior** causa de infecção hospitalar¹, chegando a custar **\$29 mil dólares** dependendo do patógeno e do procedimento². Os pacientes que desenvolvem ISC após a alta hospitalar têm probabilidade **5 vezes** maior de serem readmitidos no hospital e têm chance **2 vezes** maior de morrer do que os que não adquirem ISC³.

CURATIVOS DE GAZE NÃO POSSUEM BARREIRA PARA BACTÉRIAS

Estudos clínicos mostraram taxas de infecção mais elevadas em feridas em que se utilizaram curativos de gaze em comparação a feridas tratadas com curativos de filme transparente⁴. Os curativos de gaze não possuem barreiras contra bactérias e um estudo in vitro demonstrou que as bactérias podem atravessar até **64 camadas** de gaze seco. Após o umedecimento a gaze pode ser ainda menos eficiente como barreira contra bactérias⁵.

Você Sabia?

As bactérias podem penetrar até 64 camadas de gaze seca.

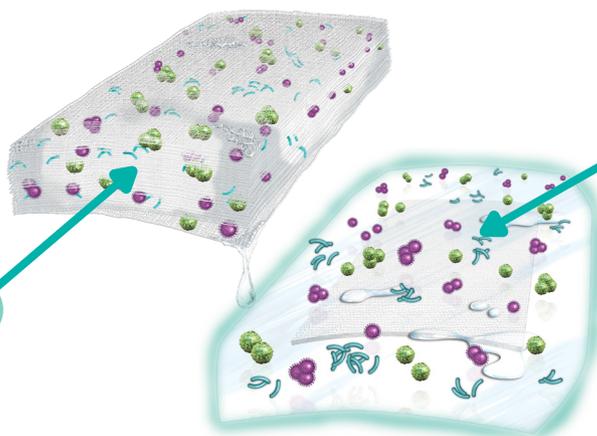

Tegaderm Pad

Os curativos constituem uma barreira para bactérias e vírus*.

* Testes in vitro realizados no Nelson Laboratories mostram que o filme transparente dos curativos Tegaderm™ constitui uma barreira viral para vírus com diâmetro de 27 nm ou maiores enquanto o curativo permanecer intacto e sem vazamentos.

APLICAÇÃO



1
Abra a embalagem e retire o curativo estéril.



2
Remova o liner do curativo na moldura de papel expondo a superfície do adesivo.



3
Posicione o curativo sobre o sítio da ferida e retire a moldura.



4
Alise o curativo e pressione com firmeza as bordas.

REMOÇÃO:

Segure com delicadeza uma borda e puxe lentamente o curativo da pele no sentido do crescimento dos pelos. Evite traumatizar a pele, o que pode ser causado puxando o curativo da pele para trás em vez de para cima.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	TAMANHO DO CURATIVO	TAMANHO DA ALMOFADA	CURATIVOS POR CAIXA
3582 BR	5 CM X 7 CM	2,5 CM X 4 CM	50
3584	6 CM X 10 CM	2,5 CM X 6 CM	50
3586 BR	9 CM X 10 CM	4,5 CM X 6 CM	25
3591	9 CM X 25 CM	4,5 CM X 20 CM	25
3593	9 CM X 35 CM	4,5 CM X 30 CM	25

REFERÊNCIAS

1. Klevens RM, Edwards JR, et al. Estimating health care-associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002. Public Health Reports 2007;122:160-166.
2. Surgical Site Infection Toolkit, Berrio-Torres, CDC Division of Healthcare Quality Products, 2009.
3. Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL, et al. The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:725-730.
4. Hanging wet-to-dry dressings out-to-dry. Ovington LG. Advances in Skin and Wound Care 15(2):79-84, March-April 2002.
5. Dressings and wound infection. Lawrence JC. Am J Surg; 1994;167:(Suppl 1A):21S-24S.

CRC Centro de Relacionamento com o Consumidor

Helpline: 0800 013 6336

www.3m.com.br/assistenciaaopaciente

Curta nossa fan page [WWW.FACEBOOK.COM.BR/3MSOLUCOESPARAENFERMAGEM](https://www.facebook.com/3msolucoesparaenferragem)

