

3M Tegaderm™ Rolo BR

Filme Transparente Não Estéril


O Filme Transparente Tegaderm™ Rolo BR 3M é constituído por poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico, é semipermeável e proporciona uma cobertura protetora sobre a pele, contribuindo para impedir que a pele intacta seja danificada por fricção e fluidos corporais. Conforma-se facilmente sobre tubos e outros dispositivos e acompanha os contornos do corpo, permitindo movimentos livres sem causar desconforto à pele.

Escala de Medidas

Possibilita medir o comprimento desejado e modelar o formato necessário.

Borda de Segurança

Borda extra sem adesivo que permite a aplicação mesmo com as mãos enluvasadas sem grudar, mantendo a adesão por mais tempo.

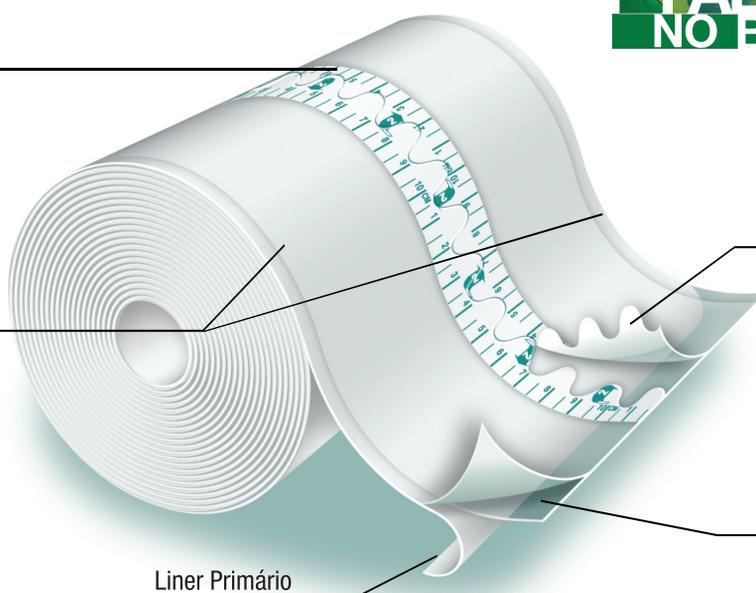

**FABRICADO
NO BRASIL**

Liner Secundário
Transparente

Filme de
Poliuretano

À prova d'água, com barreira bacteriana e viral, ajuda a prevenir contaminação externa do local.

Liner Primário

INDICAÇÕES DE USO:

- Proteção da pele sob risco de úlcera por pressão;
- Prevenção de lesões de pele sob risco (fricção);
- Cobertura secundária de curativos;
- Fixação de tubos de infusão e drenagem;
- Proteção da pele com demarcações usadas na radioterapia.



Proteção do Calcâneo



Fixação de Tubos




Cobertura Secundária


● TÉCNICA DE APLICAÇÃO:




Corte o comprimento do filme no tamanho desejado e retire o liner protetor branco;

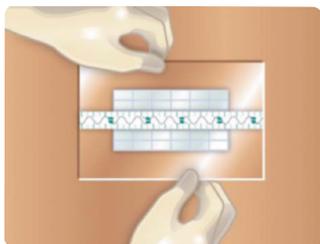

Segure o filme pelas laterais sem adesivo (borda de segurança) e centralize-o sobre a área desejada e aplique-o sem esticar;

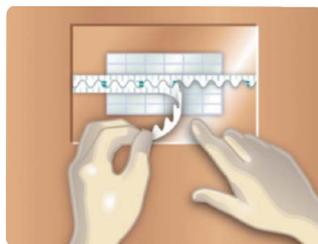

Em seguida, retire os dois liners transparentes ao mesmo tempo em que alisa o filme para melhorar a adesão em toda a superfície requerida;

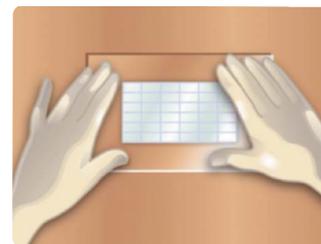

Certifique-se de que ele foi totalmente aderido e sem bolhas ou enrugamento nas bordas.

● TÉCNICA DE APLICAÇÃO EM ÁREAS CURVAS COMO JOELHO, COTOVELO E CALCÂNEO:



Faça dois cortes, iniciando nas laterais até bem próximo à escala de medidas, sem desprender totalmente a parte central;



Retire o liner branco de apenas uma das partes e aplique no local desejado. Em seguida, retire o liner transparente da mesma parte e alise o filme gentilmente. Repita o procedimento com a parte restante fazendo sobreposição com a anterior;



Alise gentilmente o filme após cada aplicação para assegurar uma perfeita adesão nas bordas.

TÉCNICA DE REMOÇÃO:



Aplique um pedaço de fita adesiva em uma das bordas do filme para desprendê-lo da pele. Sustente a pele com uma das mãos e vá esticando o filme até desprender totalmente.

Código do produto	Medidas
16005-10 Tegaderm Rolo BR	5x10m
16010-10 Tegaderm Rolo BR	10x10m
16015-10 Tegaderm Rolo BR	15x10m
16005-1 Tegaderm Rolo BR	5x1m
16010-1 Tegaderm Rolo BR	10x1m
16015-1 Tegaderm Rolo BR	15x1m

Novos tamanhos com 1 metro:
A medida ideal para a
proteção de um paciente.

CRC Centro de Relacionamento com o Cliente

Help Line 3M: 0800-0556903

www.3m.com.br/assistenciaaopaciente

[f /3MSolucoesparaEnfermagem](https://www.facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem)

e-mail: saudedapele3m@mmm.com

3M