

**Produto:** Fita Hipoalergênica Micropore

**Descrição/Características:**

Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex.

Fita não oclusiva permitindo a transpiração da pele.

Adesivo resistente a umidade, mas não impermeável.

**Benefícios:**

- Porosa: Ajuda a manter a função e a integridade da pele
- Aumenta a adesividade progressivamente, permanecendo mais tempo aderida a superfície da pele.
- Mantém boa adesão mesmo quando molhada
- Facilidade de uso
- Devido a hipoalergenicidade, ideal para peles frágeis

**Indicações de Uso:**

- Peles frágeis e sensíveis
- Curativos cirúrgicos
- Curativos em Geral

**Precauções de uso:**

- Não aplicar sobre Tensão
- Não aplicar substâncias químicas sobre a pele com o objetivo de aumentar a adesividade do produto
- Não utilizar benjoim, éter, benzina, álcool ou outros solventes para remoção da fita. Se necessário, use vaselina. Em caso de irritação, descontinue o uso.

Maria Clara G. Nasimoto  
Serviços Profissionais  
3M do Brasil Ltda.