

3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™

Las soluciones de temporalización de 3M Cuidado Oral

Un método sencillo para brillar siempre



Pentamix™ Lite

Unidad de Automezcla

1

Cuando esté listo para tomar la impresión preliminar, inicie simplemente presionando un botón.



¡Use SOLO las originales!

Use siempre las puntas mezcladoras Penta™ rojas en su dispositivo Pentamix, para asegurarse de obtener resultados óptimos de mezcla e impresión.

Comience la automezcla y tome el control

Prepárese para la mezcla automática y todos sus beneficios:

MEZCLA HOMOGÉNEA Y SIN BURBUJAS, de calidad reproducible.

RÁPIDA, se activa pulsando un solo botón.

ECONÓMICA, dispensa la cantidad exacta de material que usted necesita.

HIGIÉNICA, llenado directo en el portaimpresiones o jeringa, sin riesgo de contaminación cruzada.

UN PROCESO MÁS EFICIENTE que incrementa la productividad.

Express™ XT Penta™

Materiales de Impresión VPS

2

Tome el control libre de estrés, con impresiones de estabilidad dimensional superior y sin sensibilidad a la humedad en comparación con los alginatos.



Material Express™ XT Penta™ H



Material Express™ XT Penta™ Putty VPS:
Auténtica consistencia de masilla que se mezcla automáticamente.

Automezclable, ¡aunque es una masilla!

Con Express™ XT Penta™ Putty VPS usted obtiene las ventajas de las masillas de mezcla manual, junto con los beneficios de las masillas de mezcla automática.



Tras 24 horas, la impresión en alginato se ha encogido, presenta fracturas y se ha separado del portaimpresiones.



La impresión de Express™ XT Penta™ Putty no muestra prácticamente ningún cambio después 24 horas.

Una copia de seguridad para su tranquilidad

Fuente: Datos internos de 3M Cuidado Oral, disponibles mediante solicitud. Vea al reverso para información de contacto.

Las impresiones no muestran prácticamente ningún cambio dimensional, inclusive después de un periodo largo. Por su resistencia a la humedad y elevada estabilidad dimensional, las impresiones hechas con material Express™ XT Penta™ Putty VPS pueden almacenarse por meses. Esto permite rehacer fácilmente los provisionales, si fuera necesario.

Protemp™ 4

Material para Temporalización

3



Obtenga brillo fácilmente cada vez que realice un provisional Protemp™ 4 con una matriz de material VPS Express™ XT Penta™ Putty.

Usted y sus pacientes se beneficiarán con una restauración provisional resistente y confiable que luce sin necesidad de pulido ni glaseado. Simplemente frote con alcohol y obtendrá un brillo de apariencia natural.



Dureza que bate récords en provisionales de corto plazo. Disponible en seis tonos.



RelyX™ Temp NE

Cemento Temporal (sin eugenol)

4



El cemento temporal sin eugenol RelyX™ Temp NE asegura una fuerte adhesión y un ajuste óptimo, gracias a su espesor de película extremadamente delgado, de tan solo 3 µm.

3M Cuidado Oral hace fácil la creación de provisionales precisos con resultados brillantes siempre

Es tan simple como 1, 2, 3 y 4:


Fotos intraorales cortesía del Dr. Gunnar Reich, Múnich, Alemania.



- 1** Realice la impresión preliminar con el material VPS Express™ XT Penta™ de su elección.



- 2** Rellene la impresión preliminar con material Protemp™ 4 y colóquela nuevamente en la boca. Manténgala firmemente en su lugar.

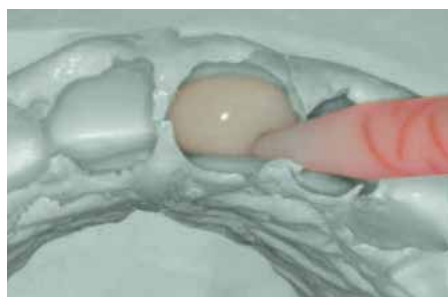

- 3** Para garantizar una superficie lisa y brillante, deje el material en la matriz por 5 minutos. No requiere pulirse. Solo frote con alcohol para que surja el brillo.



- 4** Y para lograr una fuerte adhesión con óptimo ajuste, utilice RelyX™ Temp NE, el cemento temporal sin eugenol que permite también una fácil remoción del temporal.

Información para pedidos

Pentamix™ Lite Unidad de Automezcla y accesorios	
Nº de catálogo	Información de producto
77903	Pentamix™ Lite Unidad de Automezcla – 230 V/50 Hz (INT) Incluye: 1 cartucho Penta™ para Pentamix™ Lite
77907	Pentamix™ Lite Unidad de Automezcla – 120 V/60 Hz Incluye: 1 cartucho Penta™ para Pentamix™ Lite
77944	1 cartucho Penta™ para Pentamix™ Lite
77919	30 puntas mezcladoras Penta™ rojas 30 puntas mezcladoras
77949	50 puntas mezcladoras Penta™ rojas 50 puntas mezcladoras

Express™ XT Penta™ Putty Materiales de Impresión VPS	
Nº de catálogo	Información de producto
36892	Express™ XT Penta™ Putty Individual Incluye: 1 pasta base de 300 ml; 1 catalizador de 60 ml
36898	Express™ XT Penta™ Putty Económico Incluye: 4 pastas base de 300 ml c/u; 4 catalizadores de 60 ml c/u

Express™ XT Penta™ H Materiales de Impresión VPS	
Nº de catálogo	Información de producto
36999	Kit de Introducción – Express™ XT Penta™ H Incluye: 1 pasta base de 300 ml; 1 catalizador de 60 ml; 1 cartucho Express™ XT Penta™; 10 puntas de mezcla Penta™; 1 Express™ XT Light Body; 1 cartucho Express™ XT Regular regular de 50 ml; 10 puntas de mezcla de cartucho, amarillas; 10 puntas intraorales de cartucho, amarillas; 1 adhesivo de cubeta VHP; 1 ficha técnica
36994	Repuesto Express™ XT Penta™ H Incluye: 2 pastas base de 300 ml; 2 catalizadores de 60 ml
36981	Cartucho Express™ XT Penta™ H Incluye: 1 cartucho Penta™ H

Protemp™ 4 Material para Temporalización	
Nº de catálogo	Información de producto
46953	Kit de Introducción – Tono A2 Incluye: 1 cartucho de 50 ml Tono A2; 16 puntas mezcladoras Garant™ azules; 1 dispensador Garant™ 10:1
Repuestos	
46959	Protemp™ 4 Material para Provisionales – Tono Blanqueamiento Incluye: 1 cartucho Tono Blanqueamiento de 50 ml; 16 puntas mezcladoras Garant™ azules
46954	Protemp™ 4 Material para Provisionales – Tono A1 Incluye: 1 cartucho Tono A1 de 50 ml; 16 puntas mezcladoras Garant™ azules
46956	Protemp™ 4 Material para Provisionales – Tono A2 Incluye: 1 cartucho Tono A2 de 50 ml; 16 puntas mezcladoras Garant™ azules
46957	Protemp™ 4 Material para Provisionales – Tono A3 Incluye: 1 cartucho Tono A3 de 50 ml; 16 puntas mezcladoras Garant™ azules
46972	Protemp™ 4 Material para Provisionales – Tono A3.5 Incluye: 1 cartucho Tono A3.5 de 50 ml; 16 puntas mezcladoras Garant™ azules
46960	Protemp™ 4 Material para Provisionales – Tono B3 Incluye: 1 cartucho Tono B3 de 50 ml; 16 puntas mezcladoras Garant™ azules
71453	Repuesto de puntas mezcladoras Garant™ azules 50 puntas mezcladoras

Relyx™ Temp NE Cemento Temporal (sin eugenol)	
Nº de catálogo	Información de producto
56660	Kit de Cemento Temporal RelyX™ Temp NE (sin eugenol): Incluye: 1 base de 36 g; 1 catalizador de 16 g, 1 activador de 18 g y accesorios

www.3MESPE.com



Cuidado Oral

2510 Conway Avenue
St. Paul, MN
55144-1000 EUA
1-800-634-2249

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Alemania

Por favor, recicle.
Impreso en (PAÍS).

3M, Ciencia. Aplicada a la Vida., ESPE, Express, Garant, Penta, Pentamix, Protemp y RelyX son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG.
© 2016, 3M. Todos los derechos reservados.