



3M Science.
Applied to Life.™

**3M's stift- og kroneopbygnings-
procedure
Gør det komplicerede enkelt**

3M's løsning til stift og kroneopbygning. Her med RelyX™ Fiber Post 3D

Til forudsigelige resultater - på kortere tid

Vi ved, at den endodontiske procedure er meget kompleks. Så jo mere enkel og pålidelig den endodontiske restaureringsprocedure er, desto bedre - for både tandlægen og patienten. 3M's løsning til stift- og kroneopbygning er et skridt frem: Med signifikant færre kliniske trin og færre produkter vil du kunne arbejde hurtigere, nemmere og mere effektivt.

Du behøver kun 4 trin


3M's løsning til stift og kroneopbygning gør ikke kun dit arbejde mere enkelt, men gør dig også i stand til at aflevere et forudsigeligt og stærkt resultat - fra rod til opbygning. Alt du har brug for er de nye RelyX™ Fiber Post 3D glasfiberstifter plus 3 andre produkter, der er nemme at anvende: RelyX™ Unicem 2 Automix Cement, Scotchbond™ Universal Adhæsiv, og Filtek™ Bulk Fill Posterior fyldningsmateriale.

Hvert af disse 4 produkter gør dit arbejde mere pålideligt og effektivt - og har et samlet formål: At gøre den samlede behandling mere enkel!


RelyX™ Fiber Post 3D glasfiberstifter fås i 4 størrelser. Farvekoder sikrer et præcist match til borene.



5 størrelser bor
(inklusive et universalbor).

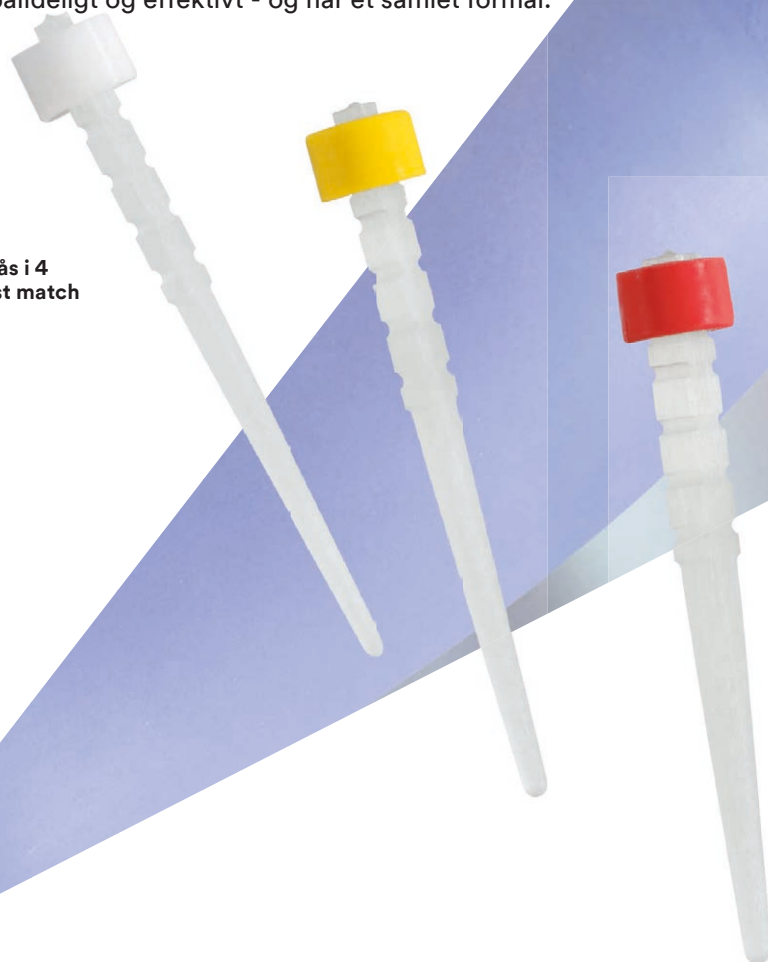

Færre kliniske trin, færre prod

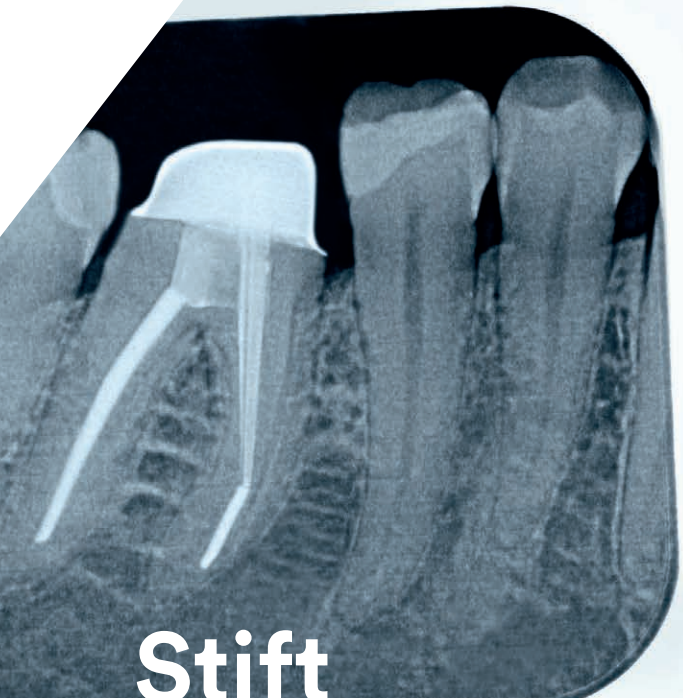

Stift

**RelyX™ Fiber Post 3D glasfiberstifter -
med et unikt 3D design for mere retention**

RelyX Fiber Post 3D bygger på mere end 8 års klinisk succes med RelyX Fiber Post. Vi har nu videreudviklet stifterne:

- Højere mekanisk retention til kroneopbygningsmaterialet pga. koronale 3D makroretentioner
- En stærk binding til rodkanalen pga. den mikroporøse overflade uden et ekstra step med silanisering
- Bedre kontrol over placering af stiften pga. den fremragende radiopacitet
- Lav risiko for rodfraktur på grund af den dentinlignende elasticitet
- Mere æstetisk end metalstifter



Cement

**RelyX™ Unicem 2 Automix
Selvadhærerende universal resincement**


RelyX Unicem 2 Automix Cement giver ikke blot en fremragende bindingsstyrke, men sparer dig også værdifuld tid, fordi du ikke behøver at ætse, prime eller bonde.

Den praktiske automix sprøjte og endospidsen gør det muligt at applicere cementen direkte i rodkanalen fra bund til top.

Med en enkelt application - og praktisk talt ingen porøsiteter.



ukter

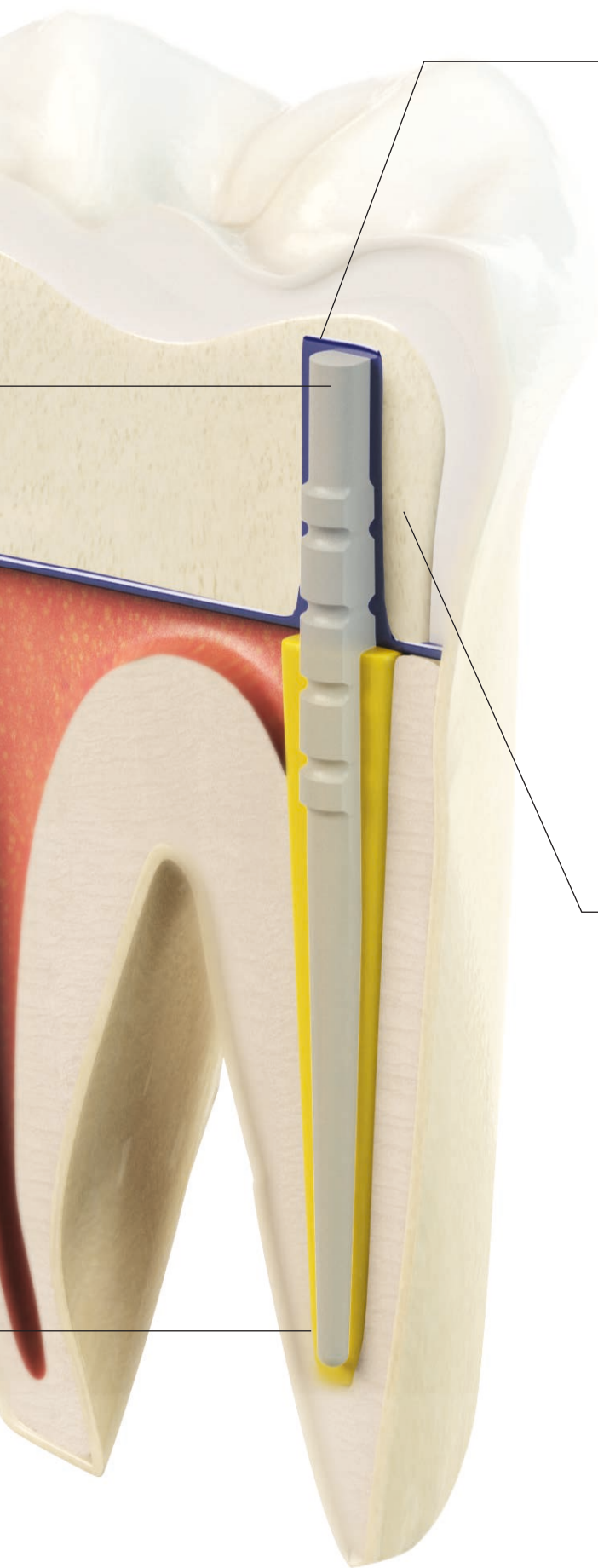

Adhæsiv

Scotchbond™ Universal adhæsiv

Scotchbond Universal adhæsiv giver en sikker binding af kroneopbygningsmaterialet til stift og tandsubstans - uden behov for en ekstra primer.

En enkelt applicering er tilstrækkelig!



Kroneopbygning

Filtek™ Bulk Fill Posterior fyldningsmateriale

Fremragende materiale- og håndteringsegenskaber gør Filtek Bulk Fill Posterior fyldningsmaterialet til et velegnet kroneopbygningsmateriale. Specielt ved større restaureringer i kombination med en stift: Det nye kapseldesign sikrer en porøsitetsfri applicering. Materialet er formbart, men også nemt at adaptere til både tandsubstans og stift. Det polymeriserede materiale er nemt at tilpasse og føles som dentin at bore i. Kroneopbygninger kan fremstilles hurtigt og nemt

Kan appliceres i et lag op til 5 mm.

Cement

RelyX™ Unicem 2 Automix cement appliceres direkte i rodkanalen med en endospids.

KLINISK TIP:

Vi anbefaler brug af 3M™ ESPE™ Astringent Retraction Paste i tilfælde, hvor der er behov for ekstra tørlægning under behandlingen.



Stift

RelyX™ Fiber Post 3D glasfiberstifter er placeret i rodkanalen. Det er ikke nødvendigt med forbehandling.

Adhæsiv


Scotchbond™ Universal adhæsiv appliceres. Der skal ikke anvendes yderligere primer.

Kroneopbygning

Med Filtek™ Bulk Fill Posterior fyldningsmateriale opbygges kroneopbygningen rundt omkring stiften.



Stift og kroneopbygning efter præparation.

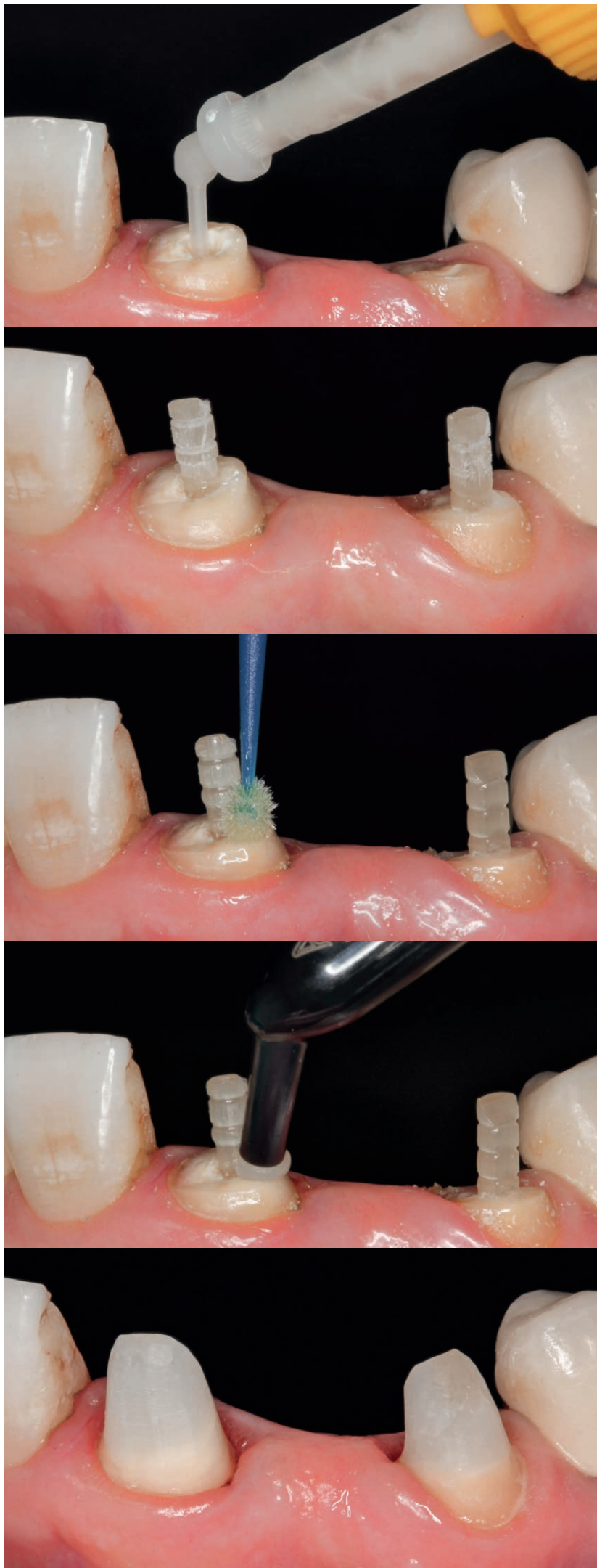

Bestillingsinformation

Varenr.	Produktinformation
RelyX™ Fiber Post 3D glasfiberstifter	
56957	Introduktionssæt 20 stifter str. 0, 1, 2, 3 (5 stifter af hver str.), 5 bor str. 0, 1, 2, 3, universal (1 bor af hver str.)
56958	Prøvesæt med RelyX™ Unicem 2 Automix cement 10 stifter str. 1, 2 (5 stifter af hver str.), 3 bor str. 1, 2, universal (1 bor af hver str.), 1 RelyX™ Unicem 2 Automix sprøjte A2 - 8,5 g, 10 blandespidser, 10 endospidser
56960	Stift og kroneopbygningssæt med RelyX™ Unicem 2 Automix cement 1 prøvesæt RelyX™ Fiber Post 3D/RelyX™ Unicem 2 Automix cement, 20 kapsler Filtek™ Bulk Fill Posterior fyldningsmateriale A3 a 0,2 g, 1 flaske Scotchbond™ Universal adhæsiv - 5 ml
Refiller stifter og bor	
56948	10 stifter, str. 0 (1,1 mm diameter), hvid
56949	10 stifter, str. 1 (1,3 mm diameter), gul
56950	10 stifter, str. 2 (1,6 mm diameter), rød
56951	10 stifter, str. 3 (1,9 mm diameter), blå
56873	1 bor, str. 0 (1,1 mm diameter), hvid
56864	1 bor, str. 1 (1,3 mm diameter), gul
56865	1 bor, str. 2 (1,6 mm diameter), rød
56866	1 bor, str. 3 (1,9 mm diameter), blå
56867	1 universalbor
RelyX™ Unicem 2 Automix selvadhærende resincement	
Refiller	
56846	Farve A2 universal 1 sprøjte - 8,5 g, 15 blandespidser (almindelige), 5 blandespidser (brede), 5 endospidser
56847	Farve A3 opak 1 sprøjte - 8,5 g, 15 blandespidser (almindelige), 5 blandespidser (brede), 5 endospidser
56848	Farve transparent 1 sprøjte - 8,5 g, 15 blandespidser (almindelige), 5 blandespidser (brede), 5 endospidser
Value pakker	
56849	Farve A2 universal 3 sprøjter a 8,5 g, 30 blandespidser (almindelige), 20 blandespidser (brede), 15 endospidser, 5 intraorale spidser
56857	Farve A3 opak 3 sprøjter a 8,5 g, 30 blandespidser (almindelige), 20 blandespidser (brede), 15 endospidser, 5 intraorale spidser
56858	Farve transparent 3 sprøjter a 8,5 g, 30 blandespidser (almindelige), 20 blandespidser (brede), 15 endospidser, 5 intraorale spidser
Tilbehør	
56851	30 blandespidser (almindelige)
56918	15 blandespidser (brede) og 15 intraorale spidser
56919	15 blandespidser (brede) og 15 endospidser

Varenr.	Produktinformation
Scotchbond™ Universal adhæsiv	
41254	Introduktionssæt 1 flaske Scotchbond Universal adhæsiv a 5 ml, 50 stk. engangsblendeskåle, 50 stk. engangsapplikatorer, 1 stk. fosforsyre i sprøjte a 3 ml, 25 stk. appliceringsspidser til fosforsyre
41258	Refill 1 flaske Scotchbond™ Universal adhæsiv - 5 ml
Filtek™ Bulk Fill Posterior fyldningsmateriale	
Refill	Varenr.
Farve	Sprøjter
	1 sprøjte a 4 g
A1	4863A1
A2	4863A2
A3	4863A3
B1	4863B1
C2	4863C2
Filtek™ Bulk Fill Flow materiale	
Refill	Varenr.
Farve	Sprøjter
	2 sprøjter a 2 g, 20 sprøjtespidser
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U
3740T	20 sprøjtespidser 19 gauge
3M™ ESPE™ Astrigent Retraction Paste	
56944	Refill: 25 kapsler
56945	Value pakke: 100 kapsler
Elipar™ DeepCure-S LED polymeriseringslampe	
76975	1 lampe med håndstykke i rustfrit stål (ledningsfri), ladeenhed (230 V), lithium-ion batteri, 10 mm lysleder, lysbeskyttelsesskjold
Elipar™ DeepCure-L LED polymeriseringslampe	
76973	1 letvægts håndstykke (indbygget lithium-ion batteri), universal strømforsyning med 5 adaptere, 10 mm lysleder, lysbeskyttelsesskjold, 3 hærdeskiver



3M a/s
3M Oral Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
e-mail: dkdental@mmm.com

www.3M.dk

3M, ESPE, Elipar, Filtek, RelyX, Scotchbond og
Sof-Lex er varemærker fra 3M Company eller 3M
Deutschland GmbH. Benyttes under licens i Cana-
da. Alle øvrige varemærker er ejet af andre firmaer.
© 3M 2016. All rights reserved.