


A perfeição

em estética para facetas laminadas

RelyX™ Veneer

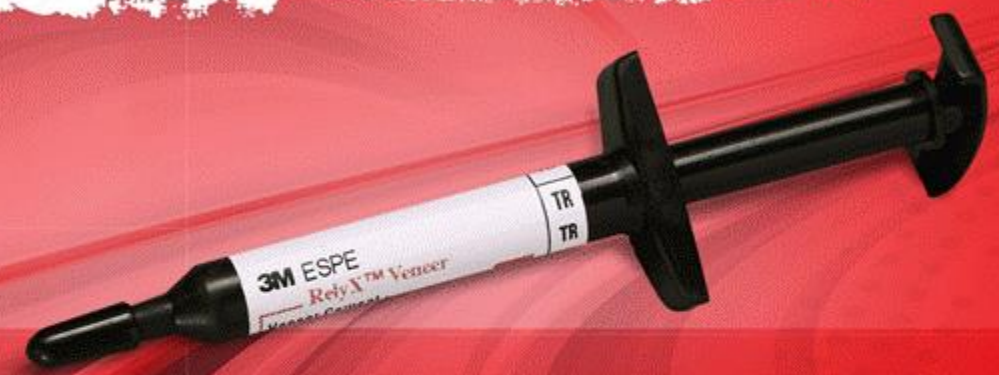

Família RelyX™. Líder em cimentos odontológicos no Brasil.

3M ESPE

RelyX Veneer

Cimento Exclusivo para Facetas



Cimentação definitiva de:

Facetas laminadas e Fragmentos em cerâmica ou resina composta.



Benefícios:

- O adesivo não precisa ser fotoativado separadamente (Sistema patenteado);
- Excelente manuseio, escoamento somente sob pressão (Polímeros patenteados);
- Alta resistência de união em dentina e esmalte;
- Melhor adaptação da faceta: baixa espessura de película (5 a 10µm);
- A pasta de prova RelyX™ Try-In possui a mesma cor do cimento fotoativado para a perfeita seleção da cor do cimento antes da cimentação definitiva;
- • Sistema de cor baseado na escala Vita Classical;
- • Cores disponíveis: TR, A1, A3, B0,5 e WO;
- • Rende em torno de 20 cimentações.

Pré tratamento da Restauração Indireta – Single Bond Universal

CERÂMICA CONDICIONÁVEL (FELDSPÁTICA E REFORÇADAS POR CRISTAIS)

Pré tratamento das Facetas Laminadas:

- Condicionamento com ácido fluorídrico pelo tempo recomendado pelo fabricante da cerâmica;
- Lavar por 15 segundos;
- Secar.



Aplicar 1 camada de Single Bond Universal




Aplicar jato de ar



Não fotoativar

RelyX Veneer e Single Bond Universal

DENTE

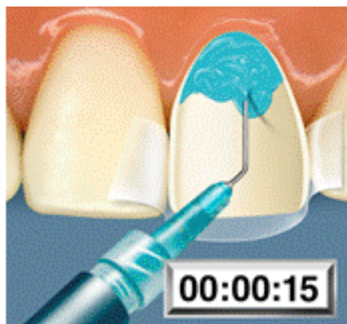


Aplicar ácido fosfórico e aguardar 15 segundos



Lavar com água em abundância




Aplicar leve jato de ar ou remover excesso de umidade com uma bolinha de algodão

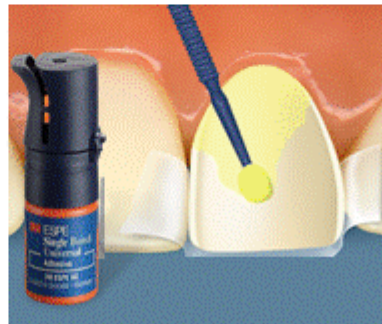

Aplicar 1 camada de Single Bond Universal de forma ativa por 20 segundos



Aplicar leve jato de ar por 5 segundos

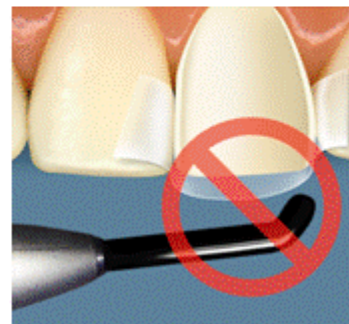


Não fotoativar


CIMENTO



Dispensar o cimento diretamente no interior da faceta

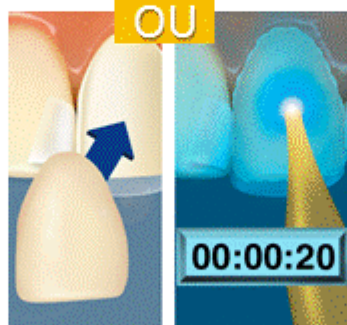

Assentar a faceta, remover excessos com um aplicador descartável ou fazer uma fotoativação rápida, de 20 segundos bem no centro da faceta para remover os excessos na fase gel

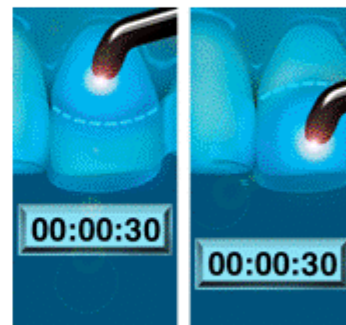

Faça a fotoativação por 30 segundos em toda a face da faceta

Para outros tipos de cimentação, escolha o cimento ideal



	RelyX™ Ultimate + Single Bond Universal	RelyX™ U200	RelyX™ Luting 2	RelyX™ Veneer	RelyX™ ARC + Single Bond 2
Metal/Metalocerâmica					
<i>Inlays/Onlays</i>	+	++	+	-	+
Coroas/Prótese fixa	+	++	++	-	+
Pino endodôntico	+	++	++	-	+
Prótese fixa adesiva tipo Maryland	++	+	-	-	+
Cerâmicas Vitreas (ex.: Emax, Vita Mark 2)					
<i>Inlays/Onlays</i>	++	+	-	-	++
Coroas/Prótese fixa	++	++	-	-	++
Prótese fixa adesiva tipo Maryland	++	+	-	-	++
Facetas laminadas	+	-	-	++	-
Zircônia e Alumina (ex.: Lava Zircônia)					
Coroas/Prótese fixa	+	++	+	-	-
Pino endodôntico	+	++	+	-	-
Prótese fixa adesiva tipo Maryland	++	+	-	-	-
Abutment de implante	+	++	+	-	-
Resina Nano Cerâmica (Lava Ultimate)					
<i>Inlays/Onlays</i>	++	-	-	-	+
Coroas/Prótese fixa	++	-	-	-	+
Facetas laminadas	+	-	-	++	-
Resinas Compostas					
<i>Inlays/Onlays</i>	++	+	-	-	+
Coroas/Prótese fixa	++	+	-	-	+
Pino endodôntico	+	++	-	-	+
Facetas laminadas	+	-	-	++	-

++ Altamente recomendado

+ Recomendado

- Não é indicado