

# Afastamento gengival de forma simples e eficaz?

Conheça a inovadora  
Pasta Adstringente  
de Afastamento Gengival



**3M**

Visando tornar a moldagem um passo cada vez mais simples e com alta definição, a 3M desenvolveu a inovadora Pasta Adstringente de Afastamento gengival, uma alternativa mais conveniente e rápida que o fio retrator.

## INDICAÇÕES

Afastamento temporário do tecido gengival marginal, nas situações clínicas:

- Moldagens Finais (convencional ou digital);
- Cimentação de restaurações provisórias e definitivas;
- Preparo para restaurações tipo Classe II ou V.



Sua composição, à base de Cloreto de Alumínio de 15% em pasta, age afastando o tecido gengival do dente e promove hemostasia, permitindo a captura da margem para uma moldagem rica em detalhes.

## BENEFÍCIOS

- Menor risco de sangramento após a remoção, quando comparado ao fio retrator;
- Economia de tempo e conveniência: aplicação 50% mais rápida do que o fio retrator;
- Maior conforto para o paciente;
- Mais higiênico: cápsulas unidose para até 4 dentes;
- Afastamento efetivo com sulco seco e livre de sangramento.

# O primeiro passo para uma moldagem perfeita

Veja como é fácil fazer o afastamento gengival



1

Encaixe a cápsula em um aplicador universal (ex.: Centrix), dispense uma pequena quantidade em um bloco de mistura e descarte.



2

Insira a ponta aplicadora da cápsula dentro do sulco gengival. Há uma linha de referência (cinza) para visualizar a profundidade de aplicação da pasta.

Lançamento



3

Mova a ponta aplicadora de forma lenta e regular, aplicando a pasta dentro do sulco gengival. Preencha completamente o sulco gengival.




3



4

Deixe a pasta de afastamento no sulco gengival por, **no mínimo, 2 min.** O tempo de permanência depende das características da gengiva.

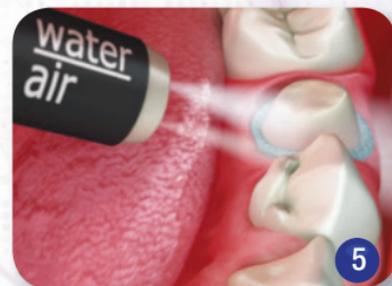

5

Lave com abundância para a completa remoção da pasta de afastamento, utilizando spray de água/ar e sucção. Inicie a moldagem.

**OPÇÃO:** para maximizar o afastamento gengival, utilize inicialmente um fio retrator fino e na sequência a pasta de afastamento.

## IMPORTANTE

- A cápsula deve ser retirada da embalagem metálica somente no momento do uso;
- A atuação da pasta é um afastamento mecânico, por isso precisa ser aplicada dentro do sulco;
- O preparo para aplicação da Pasta de Afastamento deve ser o mesmo para a aplicação de fios retratores, o campo deve estar livre de saliva e levemente seco;
- É importante lembrar que, no caso de mais elementos, o tempo de 2 minutos será contado a partir do término da aplicação no último elemento.