


# Paigaldamisjuhhis

KESKMISE suurusega kõrvatropid sobivad hästi enamusele kõrvadesse. SUURED kõrvatropid on mõeldud suurtematesse kuulmekäikudesse ja VÄIKESE suurusega kõrvatropid on mõeldud väiksematesse kuulmekäikudesse. Käed ja kõrvatropid peavad olema puhtad enne paigaldamist.

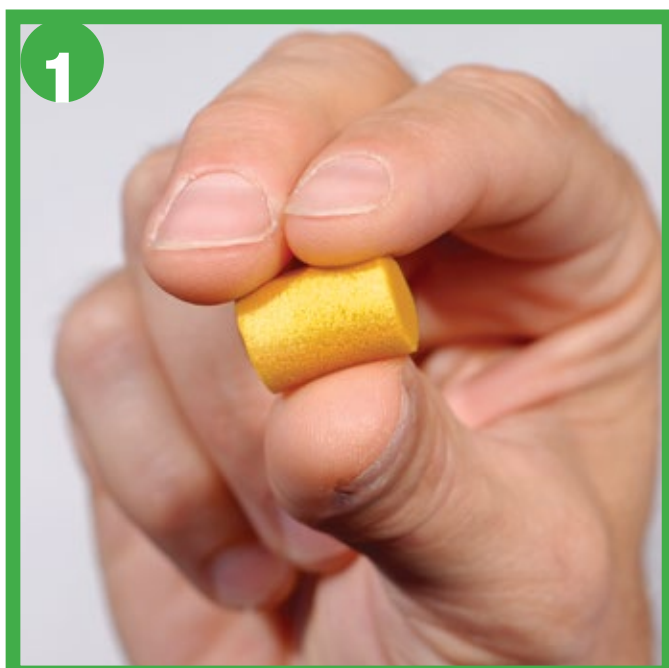


1) RULLI kõrvatropi aeglaselt pöidla ja sõrmedega. Järk-järgult suurendades survet kõrvatropi TIHENDAMISEKS kuni väga peenikese kortsuvaba silindri.



2) SISESTA tihendatud kõrvatropi hästi kuulmekäiku SAMAL AJAL tõmmates teise käega pea ümbert kõrva välja- ja ülespoole.



3) KONTROLLIGE ISTUVUST pärast kõrvatropi paisumist kõrvas: KATSUGE kõrvatropi. Sa peaksid tundma ainult kõrvatropi otsa.

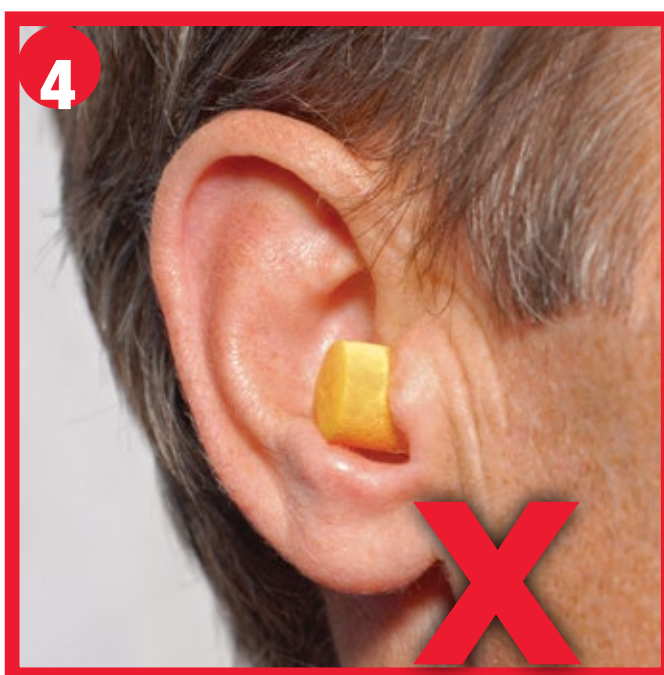

4) Kui tunned enamust kõrvatropist väljaspool kuulmekäiku, eemaldage kõrvatropi ja korrake paigaldust.

KUULA muutumatut valju müra, kõrvatropid mõlemas kõrvas. Kata kõrvad tihedalt kausikujuliseks tehtud kätega. Müra peaks kostuma umbes sama, olenemata kas kõrvad on kaetud või mitte. Kui te ei saavuta head istuvust, proovige erinevat suurust või teist tüüpi kuulmiskaitsevahendit.

**Kas teie kuulmiskaitse sobivusel on eesmärk?**

Rohkem informatsiooni  
[www.3M.eu/Cat3](http://www.3M.eu/Cat3)