

3M Science.
Applied to Life.™

3 M™ テガダーム™ ロールトランスペアレント フィルム ロール
3 M™ テガダーム™ フィルム ロール ショートロール



貼り方簡単



必要な長さにカットして使用できるロールタイプのドレッシング材です。キャリアフィルムは柔らかいので、曲部にも貼付しやすく、手袋をしたままでも簡単に剥がせる波状スリットになっています。

貼り方



1 裏側の剥離フィルム（白）を剥がします。

このマークが入っています。



2 上から押さえて皮膚に良く密着させます。



3 中央の波状スリットから端に向けてゆっくりキャリアフィルムを剥がします。

このマークが入っています。

剥がし方




本品を剥がす場合は、皮膚の負担を軽くするため、テープを約180°に折り返し、皮膚が持ち上がらないように手で押えながら、体毛の方向に逆らわずゆっくりと剥がしてください。



皮膚に負担がかかるため真上に持ち上げたり、速い速度で剥がさないようご注意ください。

摩擦を考慮したフィルム設計

摩擦が少ない表面加工を施しています

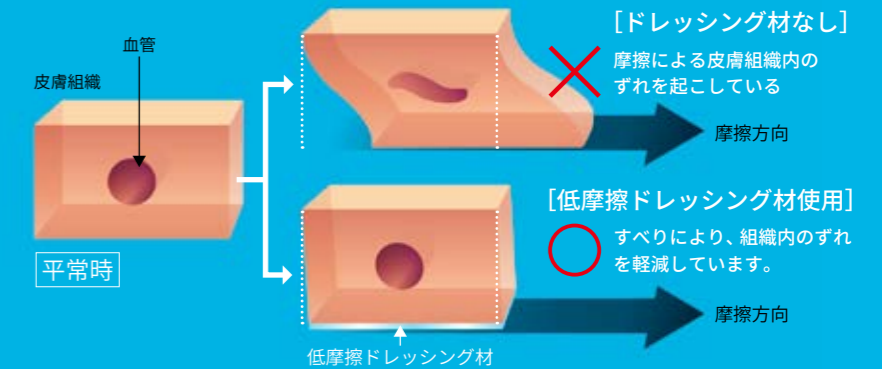



一般社団法人 日本褥瘡学会編 褥瘡予防・管理ガイドライン第4版より抜粋

Clinical Question	推奨度	推奨文
CQ8.2 高齢者の骨突出部位の褥瘡発生予防に、どのようなスキンケアを行うとよいか	B	ポリウレタンフィルムドレッシング材、すべり機能つきドレッシング材、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコンドレッシング材の貼付を勧める。
CQ8.3 仰臥位手術患者の場合、褥瘡発生予防にどのようなスキンケアを行うとよいか	C1	仙骨部にポリウレタンフィルムドレッシング材の貼付を行ってもよい。
CQ8.4 非侵襲性人工呼吸器装着患者のフェイスマスク接触による褥瘡発生予防にどのようなスキンケアを行うとよいか	C1	ポリウレタンフィルムドレッシング材、ハイドロコロイドドレッシング材の貼付を行ってもよい。

推奨度 A：十分な根拠*があり、行うよう強く勧められる
 B：根拠があり、行うよう勧められる
 C1：根拠は限られているが、行ってもよい
 C2：根拠がないので、勧められない
 D：無効ないし有害である根拠があるので、行わないよう勧められる
 ※根拠とは臨床試験や疫学研究による知見を指す。

貼る方向を選びません


3M™ テガダーム™ ロール 透明フィルムロールの平織綿布に対する動摩擦係数を1とした場合の比。

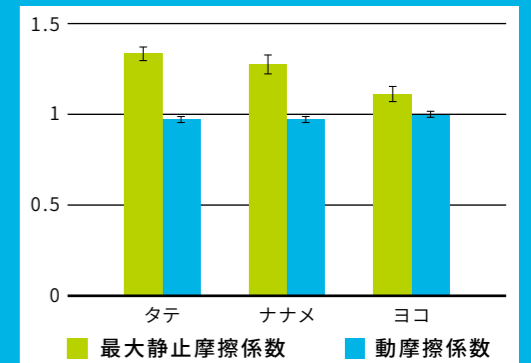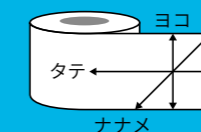

測定方法：JIS K 7125 水平法 (200g/60mmx60mm、100mm/min)

接触する素材によって摩擦は異なります

3M™ テガダーム™ ロール 透明フィルムロールの綿シートに対する動摩擦係数を1とした場合の比。

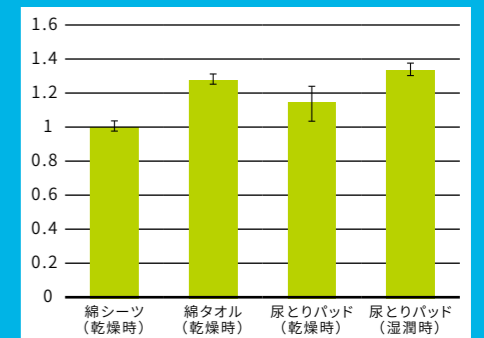

測定方法：JIS K 7125 水平法 (200g/60mmx60mm、100mm/min)


※データは参考データであり、製品の規格を保証するものではありません。

低摩擦性のポリウレタンフィルムを採用し、酸素や水蒸気の透過性にすぐれ、水、細菌やウイルスを通さないため、外部からの汚染を防ぎます。

粘着剤は天然ゴム成分を使用せず、低アレルギー性※です。

褥瘡対策や二次ドレッシング、防水用途にお使いいただけます。

※ 皮膚感作性試験済。ただし、すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。

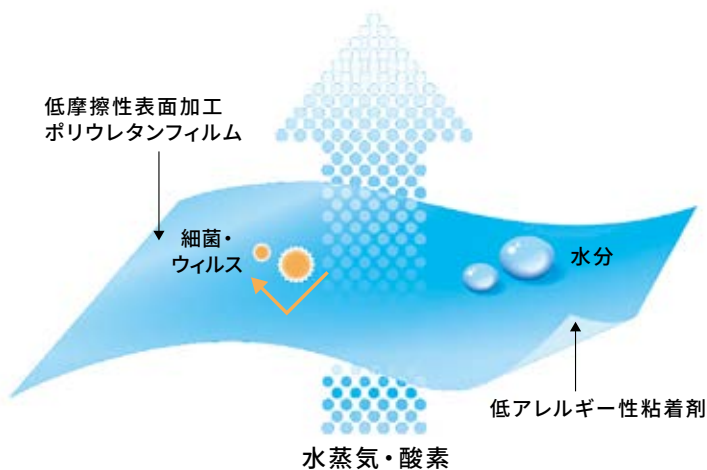

3M™ テガダーム™ ロール トランスペアレント フィルムロール

未滅菌

製品番号	フィルム幅×全長 cm×m	主な用途	入れ目	希望病院価格(税抜)
			ロール/箱	円/箱
16002	5×10	<ul style="list-style-type: none"> 創傷の二次ドレッシング 褥瘡対策などにおける皮膚の被覆 シャワーや入浴時等の防水カバー 無菌操作を必要としない用具類の固定 	1	2,700
16004	10×10			4,900
16006	15×10			6,700

3M™ テガダーム™ フィルムロール ショートロール

未滅菌

製品番号	フィルム幅×全長 cm×m	主な用途	入れ目	希望病院価格(税抜)
			ロール/箱	円/箱
16002S	5×3	<ul style="list-style-type: none"> 創傷の二次ドレッシング 褥瘡対策などにおける皮膚の被覆 シャワーや入浴時等の防水カバー 無菌操作を必要としない用具類の固定 	1	1,400
16004S	10×3			2,800
16006S	15×3			3,600

3M、Tegaderm、テガダームは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
HPM-272-F(0419)

2019年4月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます