

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング  
3M™ テガダーム™ コンフォート フィルム ドレッシング



# 「カテーテルの確かな固定」と 「肌へのやさしさ」の両立。

カテーテル固定では、留置針がしっかり固定されること、ドレッシング材が浮かず剥がれにくいこと、肌への負担が少ないことが重要です。また、フィルムドレッシングは感染対策として使用するという大前提も忘れてはなりません。

3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシングが医療従事者の皆様と一緒に患者様を支えます。

●の数字は右上の製品写真と整合しています。

## カテーテルの確かな固定

### 荷重に強くしっかり固定し、抜去リスクを低減


#### 1 荷重を分散させる切り込み

切り込みによってドレッシング材の中央で引っ張る力を分散させるため、しっかりとした固定が可能です。



#### 耐荷重データ

切り込みのないフィルムドレッシング材との耐荷重の比較。  
カテーテルを引き抜いた時の最大荷重。

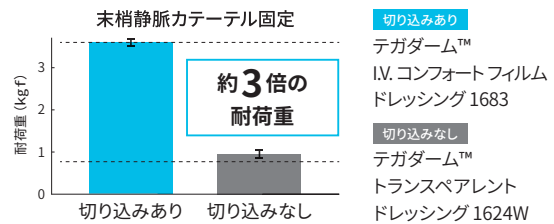

※弊社社内試験であり、当該製品の規格を保証するものではありません。

### ドレッシング材全体の浮きや剥がれを低減


#### 2 高水蒸気透過性フィルム、 パターンコーティング粘着剤

高水蒸気透過性フィルムにアクリル系粘着剤を独自の技術でパターンコーティングしました。パターンコーティングにより、粘着力を保ちつつドレッシング全体の水蒸気透過性の向上を実現しました。



#### 水蒸気透過性データ

従来のフィルムドレッシング材との水蒸気透過性の比較。  
(透明フィルム部分) JIS L 1099 Inverted Water 法 準拠

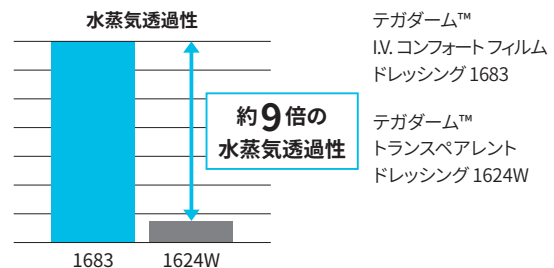

※弊社社内試験であり、当該製品の規格を保証するものではありません。

#### 3 周囲補強用 不織布テープ


ドレッシング材周囲の浮きや剥がれを低減し、貼付中の固定性を高めます。



#### 4 固定用テープ、 記録用ラベル

カテーテルやラインの固定に使用できます。滅菌されているためドレッシング材貼付前に留置針をテープで固定することも可能です。



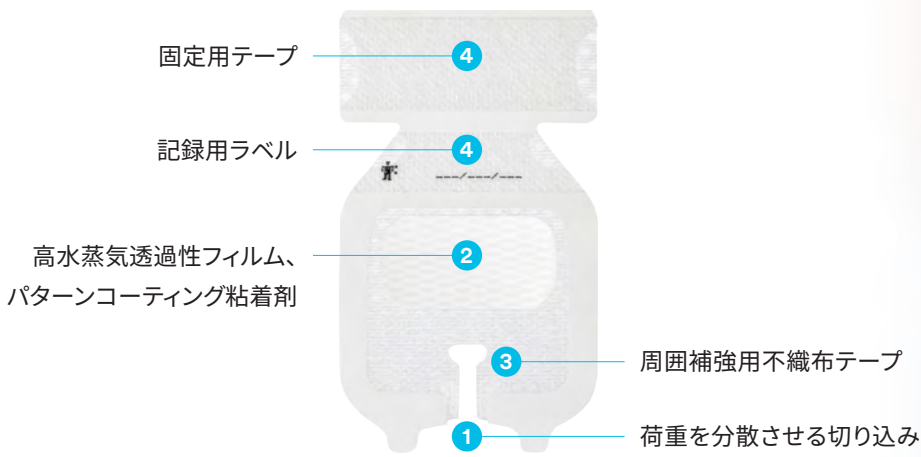


## 肌へのやさしさ

### 汗による皮膚の蒸れを抑え、剥がす際の皮膚への負担を軽減

#### ② 高水蒸気透過性フィルム、 パターンコーティング粘着剤


透明フィルムおよび周囲補強用不織布テープの粘着剤をパターンコーティングすることで肌へのやさしさを追求しました。

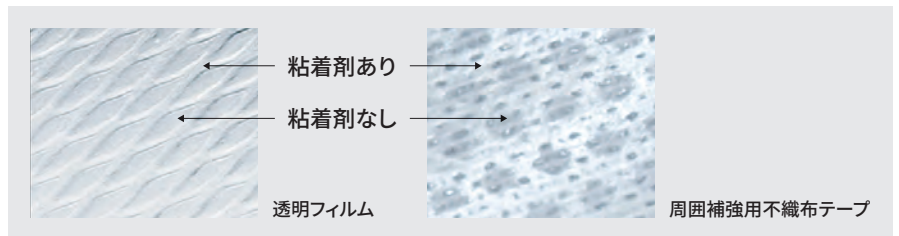

### ③ ドレッシング材貼付後の皮膚のつっぱり感を軽減

#### ③ 周囲補強用不織布テープ

周囲補強用不織布テープの外縁に細かいスリットがあるため、貼付後に皮膚の動きに追従しつっぱり感を低減します。

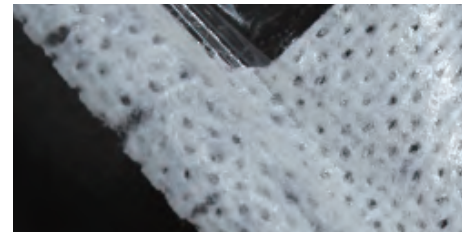

## 貼りやすさ・剥がしやすさ

### 手袋装着時でも貼付が容易



手袋装着時に粘着面に触れにくく、片手でカテーテルを保持しながら貼付できます。

### 空気を押し出しながらの貼付が容易



簡単に空気を押し出しながら貼付できるため、ドレッシングの密封性を高めることができ、浮き、はがれ、ズレ対策に繋がります。

### 補強用テープ等剥離時のストレスを軽減



ドレッシング材の表面処理によって、ドレッシング材に貼付した補強用テープ等の過度な粘着力の上昇を防ぎます。

# 3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

ガンマ線滅菌


一般医療機器 / カテーテル被覆・保護材 届出番号: 13B1X10109000232 販売名: テガダーム I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

製品番号	形状 / サイズ (cm)	主な用途	付属品	枚 / 箱
1680	 3.8×4.5	各種カテーテル固定	固定用テープ2本 記録用ラベル1枚 <span>滅菌済み</span>	100
1681	 7×8		固定用テープ2本 記録用ラベル1枚 <span>滅菌済み</span>	100
1682	 5×5.7		固定用テープ2本 記録用ラベル1枚 <span>滅菌済み</span>	100
1683	 6.5×7		固定用テープ1本 記録用ラベル1枚 <span>滅菌済み</span>	100
1685	 8.5×11.5		固定用テープ1本 記録用ラベル1枚 <span>滅菌済み</span>	50
1689	 10×15.5		固定用テープ1本 記録用ラベル1枚 <span>滅菌済み</span>	25

# 3M™ テガダーム™ コンフォート フィルム ドレッシング

ガンマ線滅菌

一般医療機器 / 救急絆創膏 (カテーテル被覆・保護材) 届出番号: 13B1X10109000233 販売名: テガダーム コンフォート フィルム ドレッシング

製品番号	形状 / サイズ (cm)	主な用途	付属品	枚 / 箱
1688	 10×12	傷の保護 各種カテーテル固定	固定用テープ1本 記録用ラベル1枚 <span>滅菌済み</span>	50

添付文書をよく読んでからご使用下さい。



## 3M™ 医療用製品 会員制サイト

院内教育に使える勉強会テキストや製品の使用手順動画など、会員限定コンテンツを多数掲載しています。勉強会資料のDVDでのご提供、WEBセミナーのレジュメダウンロード、メールマガジンでの最新情報のお知らせなど、様々な会員特典もご用意しております。

3M 医療用製品 会員制サイト 

3M、テガダーム、Tegadermは、3M社の商標です。

スリーエムヘルスケアジャパン合同会社  
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
 © 3M 2023. All Rights Reserved.  
 HPM-536-K(1123)SE

2023年11月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-000-470**

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)