

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

3M™ テガダーム™ コンフォート フィルム ドレッシング




「カテーテルの安全な固定」 「皮膚へのやさしさ」

1982年の3M™ テガダーム™ トランスペアレント ドレッシングの誕生以来、カテーテルをしっかり固定する製品、皮膚細菌の増殖を抑制する抗菌性ドレッシング製品、創傷ケア製品など、さまざまなソリューションを世界中の医療現場に提供してまいりました。

3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシングシリーズは「カテーテルの安全な固定」「皮膚へのやさしさ」を両立させるために、独自の形状とフレーム構造、粘着剤の塗布方法に至るまで、追求し、進化させ続けています。



貼り方かんたん

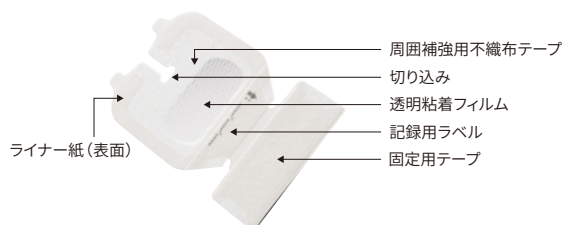

ライナー紙を剥がして



フィルムを密着



最後にフレームを剥がす

しっかり固定


引っ張る力を分散させる 切り込み



カテーテルハブを固定しやすい形状でフィルムドレッシング材にかかる引っ張る力を中央で分散させることで荷重に強くなります。

耐荷重データ

切り込みのないフィルムドレッシング材との耐荷重の比較
カテーテルを引っ張り、刺入部が1cmずれた時点での耐荷重

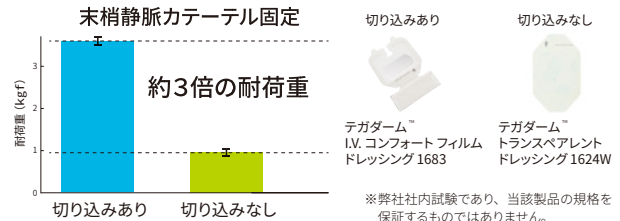


高水蒸気透過性フィルム




粘着力を保ちつつ、ドレッシング全体の水蒸気透過性の向上を実現しました。酸素・水蒸気の透過性に優れ、水・細菌の浸入を防ぎ、刺入部をしっかり保護します。透明で観察もしやすく、異常の早期発見が可能です。

周囲補強用不織布テープ

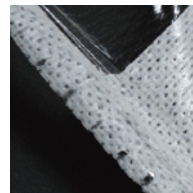

フィルムドレッシング材周囲の浮き剥がれを低減し貼付中の固定性を高めます。周囲補強用不織布テープの外縁に細かいスリットがあるので貼付後に皮膚がつっぱることを防ぎます。

固定用テープ

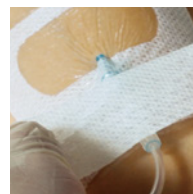


カテーテルやラインの固定に使用できます。貼付時によじれにくく、しっかり固定できます。

皮膚へのやさしさ

パターンコーティング

周囲補強用不織布テープ、固定用テープ、記録用ラベルを含めたドレッシング材全体にパターンコーティングをしています。粘着剤をパターンコーティングすることで、汗に強く、皮膚の蒸れを抑え、剥がす際の皮膚への負担も低減します。

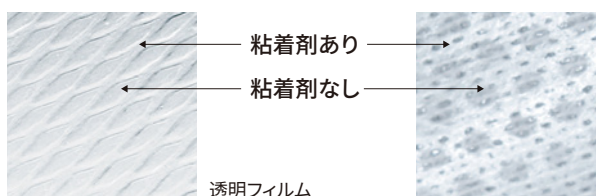




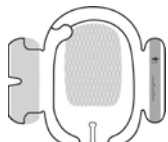


周囲補強用不織布テープ
固定用テープ
記録用ラベル

3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

ガンマ線滅菌


一般医療機器／カテーテル被覆・保護材 届出番号：13B1X10109000232 販売名：テガダーム I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

製品番号	形状／サイズ (cm)	主な用途	付属品	枚／箱
1680	 3.8×4.5	各種カテーテル固定	固定用テープ2本 記録用ラベル1枚 滅菌済み	100
1681	 7×8		固定用テープ2本 記録用ラベル1枚 滅菌済み	100
1682	 5×5.7		固定用テープ2本 記録用ラベル1枚 滅菌済み	100
1683	 6.5×7		固定用テープ1本 記録用ラベル1枚 滅菌済み	100
1685	 8.5×11.5		固定用テープ1本 記録用ラベル1枚 滅菌済み	50
1689	 10×15.5		固定用テープ1本 記録用ラベル1枚 滅菌済み	25

3M™ テガダーム™ コンフォート フィルム ドレッシング

ガンマ線滅菌

一般医療機器／救急絆創膏（カテーテル被覆・保護材） 届出番号：13B1X10109000233 販売名：テガダーム コンフォート フィルム ドレッシング

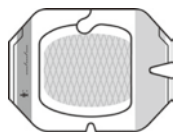製品番号	形状／サイズ (cm)	主な用途	付属品	枚／箱
1688	 10×12	傷の保護 各種カテーテル固定	固定用テープ1本 記録用ラベル1枚 滅菌済み	50

テガダーム I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
一度開封して、そのままにしておいた本品を使用しないこと。
一度使用したものを再使用しないこと。【無菌状態が保持できないため】
また、一度開封したものを再滅菌して使用しないこと。
- カテーテル刺入部位に感染徴候（発赤、発熱、疼痛、紅斑、異臭、浮腫、異常な滲出液など）がある場合には、本品を使用しないこと。【感染を憎悪させる恐れや、治療の遅延につながる恐れがあるため】

テガダーム コンフォート フィルム ドレッシング

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
一度開封して、そのままにしておいた本品を使用することや一度使用したものを再使用することはしないでください。【無菌状態が保持できないため】
また、一度開封したものを再滅菌して使用することはいけません。
- 傷やカテーテル刺入部位に感染徴候（発赤、腫、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）がある場合には本品は使用しないでください。【使用した場合、傷の悪化、感染の悪化、治療の遅延につながる恐れがあるため】
- 本品は縫合糸またはその他の縫合材の代替としては使用しないでください。
【創傷が悪化する恐れがあるため】

添付文書をよく読んでからご使用下さい。

3M、Tegaderm、テガダームは3M社の商標です。

2020年12月発行



スリーエム ジャパン株式会社
http://go.3M.com/medical-jp/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
HPM-536-I(122002)JT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-321

9:00～17:00 / 月～金（土日祝年末年始は除く）