

# Appliceringsvejledning - Inkontinensrelateret Dermatitis (IAD)


## Hudens tilstand

**Ingen IAD**  
Ingen rødme og intakthud

**Mild IAD**  
Svag rødme og intakt hud

**Moderat til svær IAD**  
Kraftig rødme og intakt/begyndende nedbrudt hud

**Svær IAD**  
Kraftig rødme og "grædende" hud med øer af sår/nedbrudt hud

	3M Cavilon™ Vaskeservietter	3M Cavilon™ Langtidsvirkende barrierecreme	3M Cavilon™ No Sting barrierefilm
			
	Anvend efter hver inkontinensepisode		
	Anvend efter hver inkontinensepisode		
	Anvend efter hver inkontinensepisode	Anvend 2 gange om dagen (morgen og aften)	
	Anvend efter hver inkontinensepisode		24 til 48 timer

## 3M Cavilon Vaskeservietter

3M Varenr.:	Beskrivelse	Størrelse	Antal/pakke	Pakker/karton
9274	Vaskeservietter till kontinenspleje	20×30 cm	8	12



## 3M Cavilon Langtidsvirkende barrierecreme

- Barriere mod irritation af kropsvæsker
- Beskyttelse af skader i forbindelse med inkontinens
- Giver fugt til meget tør hud
- Kan anvendes på både skadet og intakt hud

### Applicering

1. Huden skal være ren og tør inden Cavilon Langtidsvirkende barrierecreme appliceres.
2. Anvend kun en lille mængde (på størrelse med en ært) for at dække hele området. Gentag efter behov.
3. Hvis huden føles fedtet, er der anvendt for meget creme. Det anbefales at re-applicere efter hvert tredje inkontinensepisode.
4. For at give fugt til meget tør hud, påføres cremen dagligt eller efter behov.

3M Varenr.:	Beskrivelse	Størrelse	Antal/pakke
3391G	Langtidsvirkende barrierecreme	28g p.tube	12 tuber
3392G	Langtidsvirkende barrierecreme	92g p.tube	12 tuber
3392GS	Langtidsvirkende barrierecreme	2g p. kuvert	20 kuverter



## 3M Cavilon No Sting barrierefilm

- Primær barriere mod irritation fra kropsvæsker
- Beskyttelse mod klæbestoffer fra forbindinger og kirurgiske tapes
- Beskyttelse omkring sårkanter og eksudat
- Beskyttelse af skader forårsaget af friktion

### Applicering

1. Huden skal være ren og tør inden applicering af Cavilon No Sting barrierefilm.
2. Applicér en jævn mængde af filmen over hele behandlingsområdet. Lad filmen tørre (ca. 30 sekunder). Når sprayen anvendes, hold sprayen ca. 10 - 15 cm fra huden og applicér en jævn film over hele området.
3. Hvis der mangler et område ved første applicering, skal første applicering tørre helt (ca. 30 sekunder) inden næste lag appliceres.
4. Hvis Cavilon No Sting barrierefilm appliceres på et område med hudfolder eller hud-til-hud kontakt, skal hudområderne holdes adskilt mens barrierefilm tørres.
5. Det anbefales at påføre et nyt lag efter 48-72 timer (ved normal anvendelse) eller oftere efter behov. Ved svær inkontinens, påføres et nyt lag efter 24 timer.

3M Varenr.:	Beskrivelse	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
3343N	Appliceringspind	1 ml	25 pinde	100
3345N	Appliceringspind	3 ml	25 pinde	100
3346N	Sprayflaske	28 ml	12 flasker	1



Læs mere om Cavilon produkterne på:

[www.Cavilon.dk](http://www.Cavilon.dk)

3M a/s  
Health Care  
Hannemanns Allé 53  
2300 København S

Tlf. 43 48 01 00  
[www.3Mhealthcare.dk](http://www.3Mhealthcare.dk)

3M og Cavilon er varemærker ejet af 3M Company.  
Genbrug venligst.

© 3M 2015. Alle rettigheder forbeholdes. BR53 0050-2 DK 151209