

3M™ Coban™ 2 Lite kompresjonssystem

Utformet med *Intelligent Compression Dynamics*



Utformet for
pasienter

med lav kompresjonstoleranse



3M™ Coban™ 2 Lite kompresjonssystem er utformet for å gi terapeutisk kompresjon samtidig som den er behagelig for pasienter med lavere kompresjonstoleranse, inkludert pasienter som:

- har forskjellige årsaker til AAI (ankel-arm-indeks) lik eller høyere enn 0,5.
- ikke har forsøkt kompresjon tidligere, eller
- har usikker toleranse til kompresjon
- har redusert bevegelighet

Coban 2 Lite reduserer risikoen for skadet vev hos pasienter med lik eller høyere AAI enn 0,5 og presenterer en trygg, behagelig og effektiv løsning for behandling av venøse leggsår.

Coban 2 Lite er lateksfri.

3M

3M™ Coban™ 2 Lite kompresjonssystem

Større komfort med mindre trykk.

Coban 2 Lite fungerer like godt som den originale Coban 2, men medfører 25 % mindre hviletrykk. Bandasjen er spesielt utformet for pasienter med lavere toleranse for kompresjon.

Effektiv, terapeutisk kompresjon. Coban 2 Lite er en trygg, effektiv og behagelig løsning for behandling av venøse leggsår, lymfeødem og andre tilstander med behov for kompresjonsbehandling. Den fordeler trykket riktig for å forbedre bevegeligheten og øke tilbakestrømmen av væske, redusere ødem og bedre tilstanden til kapillærene i huden.

Skliir og krøller ikke. Materialet er utformet for å gi *Intelligent Compression Dynamics* for en effektiv, konsistent kompresjon. Det patenterte, selvheftende materialet festes til seg selv og skaper en uelastisk bandasje som sitter godt på huden og reduserer risikoen for at den skliir eller krøller seg.

Utformet for hverdagen. Den tynne, lette og pustende bandasjen gir anledning for pasienten til å bruke egne sko, slik at de raskt kan komme tilbake til sin normale hverdag.

Pasientkomfort øker bruken. Nettopp fordi den er behagelig å ha på, vil flere pasienter bruke Coban 2 Lite, og derfor øker sjansen for en mer effektiv behandling.

Enkel og hurtig å påføre. Det praktiske tolagssystemet er like enkelt å lære å legge som å lære bort.

Mer konsekvent behandling. Kompresjonslaget er utformet for å påføres helt utstrukket, slik at påføringen blir pålitelig, stabil og lik hver gang.

Kompresjon til alle pasienter

Se også 3M™ Coban™ 2-lags kompresjonssystem, katalognr. 2094, som kan anbefales til de fleste pasienter med venøse leggsår med ødem, og sørger for terapeutisk kompresjon som gjør hverdagen mer behagelig.

Vil du vite mer?

For å lære mer om 3M™ Coban™ 2 kompresjonssystem, besøk www.3M.no/helse eller kontakt din lokale 3M representant.

Utviklet for å være
trygg, behagelig og
effektiv.



Bestillingsinformasjon

3M™ Coban™ 2 Lite kompresjonssystem

3M varenummer	Produktbeskrivelse / Størrelse	Antall/eske	Eske/kartong
2794E	Rull 1 komfortlag, 10 cm x 2,7 m, ustrukket	2 ruller, 1 av hver	8
	Rull 2 kompresjonslag, 10 cm x 4,7 m, strukket, 10 cm x 3,2 m, ustrukket		



3M Norge A/S

Avd. Helseprodukter
Postboks 100, 2026 Skjetten
Telefon 0 63 84

www.3m.no/helse

3M og Coban er varemerker av 3M.
Vennligst kildesortér. Trykket i Europa.
© 3M 2010. Alle rettigheter.
1456-101-NO 07/2010