





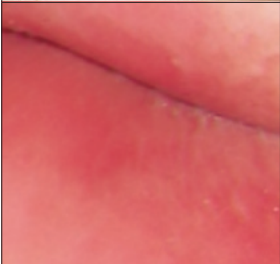
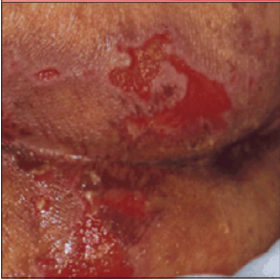
Applikeringsguide - Inkontinensassosiert dermatitt (IAD)

Hudstatus

Ingen IAD
Hel hud uten
rødhet

Kategori 1 IAD
Rød men hel hud.
Kan være
blemmer.

Kategori 2 IAD
Rød hud,
tap av hudlag

	3M™ Cavilon™ Barriereklut for inkontinenspleie	3M™ Cavilon™ Barrierekrem	3M™ Cavilon™ No Sting Barrierefilm
			
	Anbefales etter hver inkontinensepisode		Ved diarè, ny påføring hver 24. – 48. time
	Anbefales etter hver inkontinensepisode	Bruk 2 ganger pr dag	
	Anbefales etter hver inkontinensepisode		Ny påføring hver 24. til 48. time
	Rengjør Tilfører fuktighet Beskytter	Tilfører fuktighet Beskytter Behandler	Beskytter Behandler

3M™ Cavilon™ Barriereklut

Cavilon barriereklut for inkontinenspleie rengjør, tilfører fuktighet og beskytter - de viktigste faktorene i forebygging av inkontinensassosiert dermatitt (IAD).



- Alkohol-, parfyme- såpe- og parabenfri.
- Hypoallergen, lateksfri og pH-balansert.
- Biologisk nedbrytbar.
- Kan varmes i mikrobølgeovn/varmeskap.
- Produsert i et rent miljø (ISO-13485 sertifisert fabrikk) og er CE-merket (medisinsk utstyr, klasse 1).
- Kan kombineres med Cavilon Barriere krem og Cavilon No Sting Barrierefilm for ytterligere hudbeskyttelse.

3M varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal/pakke	Pakke/Kartong
9274	Barriereklut for inkontinenspleie	20 x 30 cm	8	12

3M™ Cavilon™ Barriere krem

- Barriere mot irritasjon fra inkontinens og andre kroppsvæsker
- Tilfører fuktighet til svært tørr hud
- Kan brukes på skadet og hel hud



Applikering

1. Huden skal være ren og tørr før Cavilon Barriere krem applikeres.
2. Applikér kremen sparsomt på det berørte området. Om huden føles klebrig er det påført for mye krem.
3. Applikering anbefales ved hver tredje inkontinensepisode, forebyggende mot IAD. Påvirker ikke absorberingsevne i inkontinensbind og bandasjer. Ved lett IAD applikeres kremen 2 ganger pr dag.
4. For å gjenopprette fuktighet til meget tørr hud, applikeres kremen daglig eller ved behov.

3M varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Antall/kartong
3391G	Barriere krem	28 g per tube	12 tuber
3392G	Barriere krem	92 g per tube	12 tuber
3392GS	Barriere krem	2 g sachet	20 sachets

3M Cavilon Barriere krem er tilgjengelig på blå resept ved inkontinens og stomi.

3M™ Cavilon™ No Sting Barrierefilm

- Barriere mot irritasjon fra inkontinens og andre kroppsvæsker
- Påvirker ikke absorberingsevne i inkontinensbind og bandasjer
- Reduserer friksjonsskader forårsaket av fuktig hud



Applikering

1. Huden skal være ren og tørr før applikering av Cavilon No Sting Barrierefilm.
2. Applikér jevnt over hele behandlingsområdet og la det tørke (ca 30 sekunder). Bruk spray på store og/eller smertefulle områder. Hold sprayaen 10 til 15 cm fra huden og applikér en jevn mengde over hele behandlingsområdet med en feiende bevegelse.
3. Om én del av området ikke har blitt påført film: La den første applikeringen tørke (ca 30 sekunder) før dette området også dekkes.
4. Påse at hudområdene holdes fra hverandre til filmen er tørket, når den brukes i hudfolder.
5. Det anbefales å gjenta applikeringen hver 48.-72. time (ved normal bruk) eller oftere ved behov. Ved tung inkontinens, applikér hver 24. time.

3M varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Antall/kartong
3343N	Skumapplikator	1 ml	25 skumapplikatorer
3345N	Skumapplikator	3ml	25 skumapplikatorer
3346N	Sprayflaske	28ml	12 flasker

3M Cavilon No Sting Barrierefilm er tilgjengelig på blå resept ved inkontinens og stomi.



3M Norge AS

Avd. Health Care

Hvamveien 6, 2013 Skjetten

Postboks 100, 2026 Skjetten

Tel: 0 63 84

www.3m.no/helse

www.cavilon.no

3M og Cavilon er varemerker som tilhører 3M Company.
© 3M 2016. Alle rettigheter er reservert. PL53-0122-2 160420