

Klar, absorberende bandasje

3M™ Tegaderm™ Absorbent



Produktbeskrivelse

3M™ Tegaderm™ Absorbent er en klar og absorberende bandasje for lett til moderat væskende sår. Beskytter mot væske, bakterier og virus. Den transparente sårputen gjør det enkelt å inspisere såret gjennom bandasjen.

Sikker og effektiv

- Sikker barriere mot forurensning utenfra som væske, bakterier og virus.
- Økt sikkerhet med visuell inspeksjon av såret gjennom bandasjen.
- Hypoallergen og lateksfri
- Steril

Behagelig å ha på

- Liten risiko for oppbløting av huden
- Tynn og meget formbar
- Liten friksjonsoverflate



Enkel i bruk

- Enkel å sentrere over såret og klebe fast
- Bandasjen smuldrer ikke opp
- Skånsom å fjerne
- Tåler vask, hygienen kan ivaretas
- Er designet for å sitte på over lengre tid

Enkelt å inspisere såret

- Såret kan observeres gjennom bandasjen
- Fremmer såropprensning ved autolyse
- Kan medføre færre bandasjeskift

Bruksområder

Delvis og fullt utviklede sår og hudskader som:

- Trykksår
- Kuttskader
- Hudavskrapninger og overflatiske sår
- Donorflater
- Overflatiske brannskader
- Lett til moderat væskende sår

Lagring og holdbarhet

Oppbevares ved romtemperatur. Holdbarhet er angitt med utløpsdato på pakningene.

Bestillingsinformasjon

3M Produktnr.	NAF/ RTV-nr.	Absorberende flate i cm	Totalstørrelse i cm	Antall/ eske
90800	902421	3,8 x 5,7 oval	7,6 x 9,5	5
90801	921911	6 x 7,6 oval	11,1 x 12,7	5
90802	913934	10,1x 10,1 firkantet	14,9 x 15,2	5
90803	936786	8,5 x 10,7 oval	14,2 x 15,8	5
90805	816640	14,9x 15,2 oval	20 x 20,3	5
90807	868197	11,7x 14,3 sakral	16,8x 19	5


Klar, absorberende bandasje

3M™ Tegaderm™ Absorbent


Før bandasjering

1. Klipp overflødig hår for bedre pasientkomfort.
2. Rens huden og såret grundig.
3. La huden tørke før bandasjen settes på.
4. Er pasientens hud skjør eller det er forventet væsning rundt såret bør det brukes Cavilon barrierefilm rundt sårkanten for å beskytte huden.


Applikasjon av bandasjen

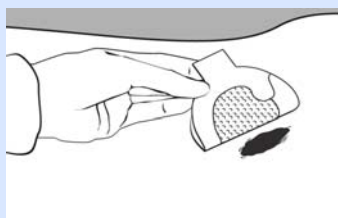

1. Hold i fliken på bandasjen og dra av beskyttelsespapiret slik at klebeflaten blir synlig. Sentrer bandasjen over såret med klebeflaten ned. Unngå å strekke bandasjen.

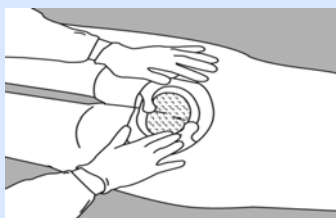


2. Press forsiktig bandasjen på plass med myke bevegelser fra midten og utover.

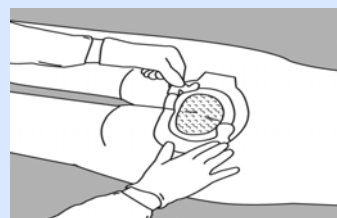


3. Fjern rammen sakte mens filmen klebes fast og gattes ut mot huden.

Spesialapplikasjoner


Bandasjen kan overlappes slik at den dekker større områder på setet eller områder med flere sår som vist på bildene nedenfor.

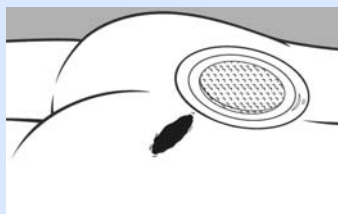

1. Velg bandasjestørrelse som dekker såret.

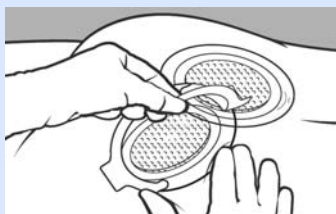


2. Neste bandasje kan overlappes og dekke andre sår.

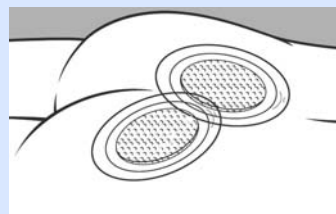

3. Slik unngås klipping i bandasjen

Vanndamp slippes ut

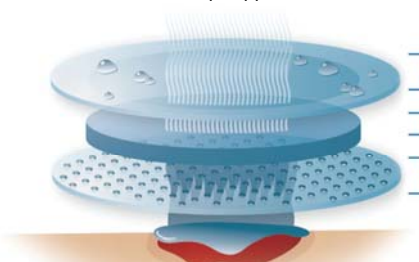

Overskudd av sårveske tas opp i bandasjen

1. Pustende Tegaderm™ Film
2. Klar akrylpolymer
3. Perforert Tegaderm™ Film med klebestoff som tar opp fuktighet

1. Tegaderm film med glatt overflate gir minimal friksjon
2. Unik, patentert, klar akrylpolymer
3. Perforert Tegaderm film tillater opptak av eksudat. Klebestoffet som tar opp fuktighet gjør at bandasjen sitter godt, men er samtidig hudvennlig.

3M Norge A/S
 Avd. Helseprodukter
 Postboks 100, 2026 Skjetten
 Tel: 0 63 84
 Faks: 63 84 17 88
www.3m.no/helse