


3M Science.
Applied to Life.



3M Hälsovård

3M™ Tegaderm™ på rulle

Säker och tillförlitlig fixering

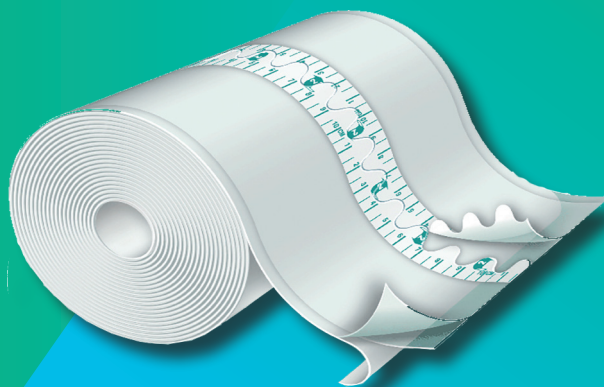

www.3M.se

Transparent Tegaderm™ film på rulle

Tegadermrullen är den icke sterila versionen av Tegaderm™ Film. Rullen ger maximal flexibilitet eftersom den lätt klipps i rätt storlek.

Egenskaper

- Släpper ej igenom vatten eller bakterier
- Andas
- Klipps enkelt i rätt storlek och form. Vid behov kan hörnen rundas
- Följsam – formas efter kroppens konturer och elasticiteten möjliggör fri rörelse utan att huden skadas
- Kan sitta i flera dagar

Indikationer

Tegaderm på rulle är mycket användarvänlig, även med handskar på. De två sidoflikarna gör att det är lätt att hålla och positionera förbandet, samtidigt som man har en perfekt överblick över området.

- Som skydd mot hudskador orsakade av friktion och kroppsvätskor (t.ex. inkontinens)
- Vattentät fixation av primärförband t.ex. kompresser, alginatförband eller polyuretanskumförband
- Vattentät fixation av medicinsk utrustning

Beställningsinformation

Art nr	Storled	Ant/fp	Fp/lev fp
16002	5 cm x 10 m	1	4
16004	10 cm x 10 m	1	4
16004S	10 cm x 2 m	1	4
16006	15 cm x 10 m	1	4



Tack vare den enkla appliceringstekniken är Tegaderm på rulle den perfekta lösningen då det behövs ett vattentätt täckförband.

Appliceringsteknik

Klipp i önskad längd och avlägsna den bakre skyddsplasten (numrerad 1). Håll förbandet i sidoflikarna och applicera det över området. Avlägsna de främre skyddsflikarna. Stryk jämnt över filmen.

Iakttag försiktighet

Detta är en icke steril produkt. Den skall ej användas på skadad hud, öppna sår eller IV infarter.



3M Svenska AB
3M Hälsovård
Bollstanäsvägen 3
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 29 100
kundservice@mmm.com
www.3M.se/healthcare

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige
© 3M 2015. Alla rättigheter förbehålles.
PL530057-1SE151112