

Filtek™ Z350 XT

Restaurador universal



Soluciones Versátiles y sencillas
con resultados estéticos.

3M ESPE

Simplicidad

Las restauraciones hermosas no tienen que ser complicadas

Si usted opta por la facilidad de la técnica de un solo tono, estará complacido con la estética incomparable del restaurador universal Filtek™ Z350 XT. Se tomó la estética que ya era reconocida e impresionante, para mejorarla en términos de retención de pulido y mejor fluorescencia para ayudar a crear restauraciones con el mejor aspecto natural.

Aunque los 8 tonos básicos satisfacen las necesidades estéticas de la mayoría de los pacientes, encontrará que la extensión de los tonos cuerpo le dará más opciones para hallar el tono único e ideal que corresponda al tono natural de sus pacientes.

Y debido a que este compuesto tiene una solidez excepcional, usted puede utilizar un compuesto tanto en los casos anteriores como en los posteriores.



La amalgama fue reemplazada por la resina universal Filtek™ Z350 XT, generando un resultado estético excepcional.

La foto es cortesía del Dr. Grant Chyz.

Filtek™ Z350 XT

Restaurador universal

Estética incomparable

- Pulido excelente y mejor retención del pulido que los microrellenos
- Amplia gama de tonos y opacidades
- Fluorescencia mejorada

Es fácil de usar

- Mejor selección de los tonos cuerpo
- Las jeringas tienen códigos de color según la opacidad
- Etiquetas en negrilla más fáciles de leer
- Excelente manipulación
- Manejo mejorado de los tonos traslúcidos

Desempeño

- Resistencia al desgaste equivalente a la del restaurador universal Filtek™ Z350
- Radio opaco
- Resistencia extraordinaria para el uso en anteriores y posteriores

Las nuevas etiquetas en negrilla son más fáciles de leer, ahorrándole tiempo en la búsqueda del color seleccionado.



Simplicidad
en su técnica de
restauración.



Ciencia

Observe porqué la nanotecnología de 3M ESPE le gusta tanto a los odontólogos.


Para entender por qué el restaurador universal Filtek™ Z350 XT proporciona resultados que ninguna otra resina puede hacer, es importante que se entienda DE QUE MANERA nuestra nanotecnología es diferente y es mejor.

Las partículas nanométricas son la razón por la cuál el restaurador Filtek™ Z350 XT tiene una mejor retención del pulido mas brillante


El brillo inicial de la mayoría de los restauradores puede ser muy impresionante.

Pero usted desea saber si su restauración va a conservar su brillo natural por años. Las pruebas demuestran que la conservación del pulido del restaurador Filtek™ Z350 XT es mejor que la de otros restauradores, y es incluso mejor que los microrellenos.

3M ESPE construye su nanocompuesto utilizando un proceso patentado que crea clusters únicos de partículas de tamaño nanométrico. Los nanoclusters se deforman con un ritmo similar al desgaste de las matrices de resina de los alrededores durante la abrasión. *Esto permite que la restauración mantenga una superficie más lisa para que haya una mayor retención del pulido.*

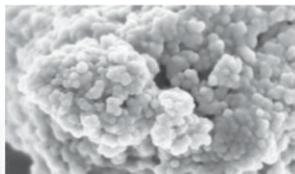

Magnificación a 100K del Nanocluster

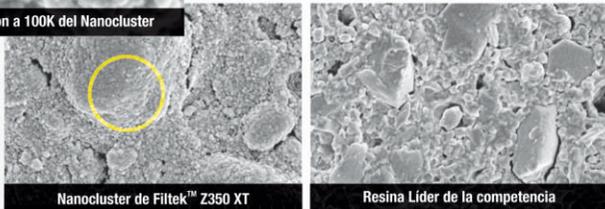

Nanocluster de Filtek™ Z350 XT

Resina Líder de la competencia

Fotos de MEV cortesía del Dr. J. Perdigao, Universidad de Minnesota.

Por el contrario, la mayoría de las resinas, incluyendo los micro y los nanohíbridos incorporan grandes partículas que contribuyen significativamente a la rugosidad de la superficie.




Resina líder de la competencia

Tonos Cuerpo del restaurador universal Filtek™ Z350XT

Tono traslúcido del restaurador universal Filtek™ Z350 XT

Pulido que se nota. Estas imágenes comparan la retención del pulido de un restaurador líder del mercado frente a Filtek™ Z350 XT después de 6000 ciclos de simulación del cepillado de los dientes con cepillo.

Retención del Pulido

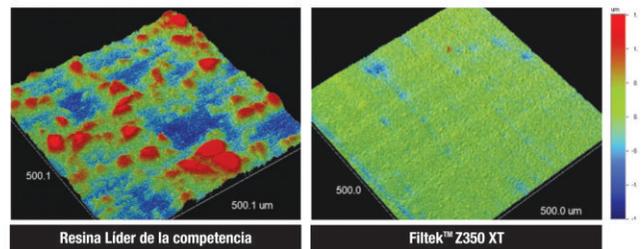

En este análisis óptico se comparan las superficies de una resina líder nano optimizada (a la izquierda) = Restaurador Universal Filtek™ Z350 XT (dentina, esmalte, cuerpo) después de la abrasión del cepillo de dientes. Fuente: Datos internos de 3M ESPE

Nuestra “verdadera” nanotecnología proporciona una resistencia al desgaste parecida a la del esmalte dental.

Un estudio clínico reciente* de 5 años que mide el “desgaste del contacto oclusal”, demuestra que no hay diferencia estadística significativa el Restaurador Universal Filtek™ Z350 XT y el esmalte. Debido a que el restaurador Filtek™ Z350 XT se obtiene con la misma nanotecnología patentada, y que los datos del laboratorio In vitro ha mostrado que tiene una resistencia equivalente al restaurador Filtek™ Z350, puede utilizarlo con confianza en cualquier parte de la boca.

* Fuente: Professor Paul Lambrechts y sus colegas, Universidad Katholieke de Lovaina, Bélgica.
* Los datos y fotos son cortesía del Dr. J. Perdigao, Universidad de Minnesota.

Versatilidad

Un sistema sencillo de tonos con posibilidades ilimitadas.

El restaurador Filtek™ Z350 ahora le ofrece una paleta de tonos diseñada para alcanzar resultados estéticos en restauraciones de un solo tono, duales o multicapa.

Haga que cada restauración sea la mejor posible.

- **Pulido sorprendente:** El restaurador es ahora más fácil de pulir y ofrece una retención del pulido mejor que la de los microrellenos.
- **Tonos traslúcidos:** Experimente un mejor manejo.
- **Resultados predecibles:** En casos anteriores o posteriores.



Versátil pero sin ser complicado.

Lo hemos hecho más fácil de usar—rápidamente encuentre el tono que necesita.

- Con códigos de color de acuerdo a la opacidad
- Etiquetas en letra negrilla fácil de leer



Restauración creada utilizando la técnica multicapas con el restaurador universal Filtek™ Z350 XT.

Foto por cortesía del Dr. Gabriel Krastl, Departamento de Periodoncia, Endodoncia y Cariología, Basilea, Suiza.

Color is as much a subjective interpretation as it is a scientific manual on shade determination and matching does not exist. visual shade product. However, a subjective protocol to others, clinical operators should then be in a position to devise individual practice. Color is too often considered the esthetic success of a restoration. However, a minor error might not be noticed if the other parameters for all components of color, it is luminosity that is most important. However, the harmony of the final result is determined in relation to the patient's smile, facial form, age and characteristics of the dental arch, as well as the determination of space, are important. A smooth surface allows one allows more different reflections can perception (e.g., a shade has the same reflection in the three-dimensional guide would be a good matching arm indicate that there is a human observer discrimination as characterized by a human observer is dependent on the relative positions of the illuminant, the object and the observer.

Esmalte

Cuerpo

Traslúcido

Dentina

Opacidades: Dentina, Cuerpo, Esmalte y Traslúcido. La Asignación hace referencia a las diferencias en las opacidades.

Belleza y
Versatilidad
que cumplen con las
necesidades
de **SU** práctica

Todos tienen su tono natural, y usted tiene una forma simple de conseguir el tono preciso para cada uno.

Como líder en la extraordinaria tecnología de los restauradores, 3M ESPE ha diseñado la siguiente generación de nanocompuestos justos para usted:

Restaurador Filtek™ Z350 XT.

Si usted nunca ha usado el Restaurador Universal Filtek™ Z350 o el Restaurador Universal Filtek™ Supreme XT usted está a punto de descubrir algo que ha impresionado a los odontólogos por años.

La verdadera nanotecnología de 3M ESPE le proporciona:

- Una Estética Incomparable
- Excelente resistencia para uso en anteriores y posteriores
- Resistencia al desgaste similar a la del esmalte dental

Si usted ya utiliza el restaurador universal Filtek™ Z350, estará feliz de saber que ha mejorado, ayudándole a obtener una estética de aspecto natural.

- Pulido Excelente y mejor retención del pulido que los micro rellenos
- Fluorescencia mejorada
- Mejor selección de los cuerpos para sus restauraciones de 1 sola capa
- Amplio rango de tonos y opacidades para restauraciones multicapa



Información para sus pedidos

Número de Item #	Información del producto
7018S	7018S Kit-jeringa de introducción de un tono individual del Restaurador Universal Filtek™ Z350XT El kit incluye: 4 - jeringas de 4g; 2 de cada tono de fondo A2 y A3; Guía técnica: instrucciones de uso.
7018D	7018D Kit-jeringa de introducción de un tono dual del Restaurador Universal Filtek™ Z350XT El kit incluye: 4 - jeringas de 4g; 1 de cada tono de dentina A3, A4, y tonos de esmalte A2, A3; 1 carrusel de selección de tonos; guía técnica; instrucciones de uso.



Las jeringas tienen códigos de color de acuerdo a la opacidad para que la selección del tono sea fácil.

Cree restauraciones de apariencia natural con la guía de colores circular de 3M ESPE.

La eficiencia lo es todo en la práctica odontológica. Nuestra guía de colores circular es fácil de usar, simplifica el proceso de selección y sirve para colocar de una a cuatro opacidades según la restauración. Con el fin de cumplir con las necesidades de los pacientes, se incluye una guía de color circular en cada uno de los kits.



TONOS DE TINTA	JERINGA	CÁPSULA
A1D	7018A1D	
A2D	7018A2D	
A3D	7018A3D	
A4D	7018A4D	
B3D	7018B3D	
C4D	7018C4D	
White	7018WD	

CUERPO	JERINGA	CÁPSULA
A1B	7018A1B	7019A1B
A2B	7018A2B	7019A2B
A3B	7018A3B	7019A3B
A3.5B	7018A3.5B	7019A3.5B
A4B	7018A4B	7019A4B
A6B	7018A6B	
B1B	7018B1B	7019B1B
B2B	7018B2B	7019B2B
B3B	7018B3B	
B5B	7018B5B	
C1B	7018C1B	
C2B	7018C2B	7019C2B
C3B	7018C3B	7019C3B
D2B	7018D2B	
D3B	7018D3B	
White	7018WB	
Extra White	7018XWB	

TONOS DE ESMALTE	JERINGA	CÁPSULA
A1e	7018A1e	
A2e	7018A2e	
A3e	7018A3e	
B1e	7018B1e	
B2e	7018B2e	
D2e	7018D2e	
White	7018We	
extra White	7018XWe	

TRANSLÚCIDO	JERINGA
Clear	7018CT
Blue	7018BT
Grey	7018GT
Amber	7018AT

LA JERINGA DE REFILL incluye 1 jeringa de 4g; CÁPSULA DE REFILL DE TONOS incluye 20 cápsulas de 0,2g; instrucciones de uso.

3M ESPE

3M Argentina
0800 333 3547
541 1 4469 8200

3M Bolivia
800 102 102
59 13 3412 195

3M Brasil
0800 155150
551 9 3838 7000

3M Chile
562 4 1037 46

3M Costa Rica
506 22771000 Fax
506 22603838

3M Colombia
01800113636
571 410 8555

3M Ecuador
593 42800 777

3M El Salvador
503 22100834

3M República Dominicana
1809 530 6560
ext 318, 322 499

3M Guatemala
502 2379 3636

3M Honduras
50 45 5187 77

3M Jamaica
87 69 37 38 5965

3M México
52 55 52 702216
52 55 52 702212
01800 700 9600

3M Nicaragua
5052 6529 88

3M Panamá
50 72 36 52 22

3M Paraguay
59521 612076

3M Perú
51 12 2427 28

3M Puerto Rico
78 76 2046 00

3M Trinidad
1868 62 38 917

3M Uruguay
59 82 4093 341 ext 228

3M Venezuela
02012 95 78 039

3M, ESPE y Filtek son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG.
Favor reciclar.
© 3M 2010.
Reservados todos los derechos.