

Sopivuuden tärkeys

Huoltovapaat hiukkassuojaimet toimivat tehokkaasti vain kun kasvojen ja suojaimen reunojen välillä on tiivis kosketus. Jos tiiviys heikkenee, suojaus vaarantuu ja raoista saattaa päästä virtaamaan epäpuhdasta ilmaa.

Seuraavia sovitusohjeita tulee noudattaa aina 3M™ Aura™ 9300+ sarjan hengityksensuojainta käytettäessä.



1. Muotoile suojain kupinmuotoiseksi pitämällä suojainta nurja puoli ylöspäin ja erota ylä- ja alaosa toisistaan leukaliuskan avulla. Taivuta hiukan nenäkappaleen keskeltä.
2. Varmista, että suojaimen molemmat avautuvat kokonaan.



- 3a. Ota suojain toiseen käteesi siten, että avoin puoli on kasvoja kohti.



- 3b. Tartu toisella kädellä molempiin nauhoihin. Pidä hengityksensuojainta leukasi alapuolella nenäpuristin ylöspäin ja vedä nauhat pääsi yli.



4. Aseta ylänauha päälleen ympäri ja alanauha korvien alapuolelle. Nauhat eivät saa jäädä kierteelle. Säädä ylä- ja alaosa istumaan mukavasti ja varmista, etteivät suojaimen osat ja leukaliuska taitu sisäänpäin.



5. Muotoile nenäkappale molemmiin käsiin nenänvarren muodon mukaiseksi tiiviin istuvuuden aikaansaamiseksi.
- ▲ Jos puristat nenäkappaleen vain yhdellä kädellä, hengityksensuojaimen teho saattaa jäädä heikommaksi. Käytä molempia käsiä.



6. Tarkasta tiiviys peittämällä hengityksensuojain edestä molemmiin käsiin varoen liikuttamasta suojainta.

Hengityksensuojain ilman uloshengityksventtiiliä: hengitä terävästi ulospäin. Hengityksensuojain uloshengityksventtiilillä: hengitä terävästi sisäänpäin.

Jos nenän kohdalla esiintyy ilmavuotoa, korjaa nenäpuristimen asentoa poistaaksesi vuodon. Tarkasta tiiviys uudelleen edellä kuvatulla tavalla. Jos ilmaa vuotaa hengityssuojaimen reunoilta, säädä nauhojen kireyttä poistaaksesi vuodon. Tarkasta tiiviys uudelleen edellä kuvatulla tavalla. Jos suojaimen asettaminen tiiviisti ei onnistu, ÄLÄ mene epäpuhtauksia sisältävälle alueelle. Ota yhteys esimieheesi.

