

# Étapes d'application

Couverture de réchauffement à positions multiples pour la partie supérieure du corps  
 Bair Hugger<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>, modèle 62200



## 1. Mettre en place

Une fois le positionnement chirurgical terminé, placer la couverture sur le patient. Les petits trous doivent être en contact avec la peau du patient.



## 2. Plier

Plier et mouler la couverture sur le patient ou autour de celui-ci, afin de couvrir le plus de peau possible.



## 3. Retirer

Retirer le support de la bande d'adhésif.



## 4. Fixer

Fixer la bande sur le patient à l'endroit souhaité (bande adhésive vers le champ opératoire).



## 5. Immobiliser

Utiliser les bandes de fixation pour immobiliser la couverture, au besoin.



## 6. Déplier

Déplier le champ pour la tête et le placer par-dessus la tête et le cou du patient intubé\*.

\*\* Puisque la bande adhésive doit toujours faire face au champ opératoire, il est impossible d'utiliser le champ pour la tête dans certaines configurations.



## 7. Raccorder

Raccorder le tuyau à la couverture à l'aide du port souhaité (jamais au-dessus de l'aîne).



## 8. Pincer

Utiliser le cordon de retenue et la pince pour fixer le tuyau.



## 9. Gonfler

Mettre le réchauffeur sous tension pour faire gonfler la couverture et commencer le réchauffement.



Application finale en position assise



Application finale latérale sur l'épaule



Application finale pour utilisation avec appareils robotisés