

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## 3M™ レストン™ 粘着フォームパッド

3M™ Reston™ Self-Adhering Foam Pad & Roll

## 3M™ レストン™ 2 コンフォーマブルパッド


3M™ Reston™ 2 Conformable Pad



# ムレにくい特殊ウレタンフォーム。 粘着剤付きで、ずれにくく、 皮膚にかかる体重・圧力を効果的に分散させます。



3M™ レストン™ 粘着フォームパッドは、気泡がつながっているため通気性があります。また、低アレルギー性粘着剤を塗布しているため、皮膚に貼ることもできます。すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。

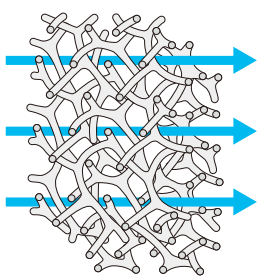

## ご使用上の注意

- 本品は直接、創傷を被覆する用途には使用できません。閉鎖していない創傷部位に直接接触しないようにしてください。
- 本品を皮膚に無理な力がかかるように貼付しないでください。
- パッドのクッション性がなくなったり、汚れたりしたら交換してください。

目的に合わせて、適切なものをお選びいただけます

## 3M™ レストン™ 粘着フォームパッド

パッドの厚さが3種類あります。




製品番号	サイズ	希望病院価格	
		入れ目 枚/袋	円/箱
1560M	20cm×30cm (厚さ約12mm)	10	6,550
1561H	20cm×30cm (厚さ約25mm)	5	5,630

製品番号	サイズ	希望病院価格	
		入れ目 巻/箱	円/箱
1563L	10cm×4.9m (厚さ約6mm)	1	5,630

- 使用方法**
- 1 貼付部周囲を清潔にし乾かします。
  - 2 創周に使用する場合はパッドを創傷の3~4倍の大きさに切り、創傷の大きさに合わせて中央に穴をあけます。
  - 3 パッドから剥離紙を剥がし、創傷部位にかからないように貼ります。

## 3M™ レストン™ 2 コンフォーマブルパッド

パッドにはあらかじめ切れ込みが入っているため、関節にもしっかりとなじみます。

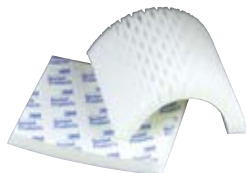

製品番号	サイズ	入れ目		希望病院価格 円/箱
		枚/袋	袋/箱	
2851H	16cm×20cm (厚さ25mm)	2	10	23,000

- 使用方法**
- 1 貼付部周囲を清潔にし乾かします。
  - 2 パッドから剥離紙を剥がし、パッドの中央に肘あるいは踵などの位置をあわせ、パッドを貼ります。

3M、Reston、レストンは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.  
HPM-497-F(1018)

2018年10月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます