

3 M™ かけるだけであったかい
保温ブランケット
KAB-1214(未滅菌)



軽く、薄いのに、あたたかい

ウィンタースポーツウェア、手袋、ブーツ、帽子、寝具にまで
広く採用されている暖かさを患者さんへ




スリーエムのテクノロジーの一つである不織布技術を活用した
3M™ シンサレート™ 高機能中綿素材を採用しています



高い保温性


その秘密は複雑に入り組んだマイクロファイバー構造

3M™ シンサレート™ 高機能中綿素材でできた“かける
だけであったかい”保温ブランケットの秘密は、複雑に
絡み合った微細な繊維の間に封じ込められた大量の
デッドエア（動かない空気）。
軽く、薄いのに毛布と同等*の温かさを提供します。

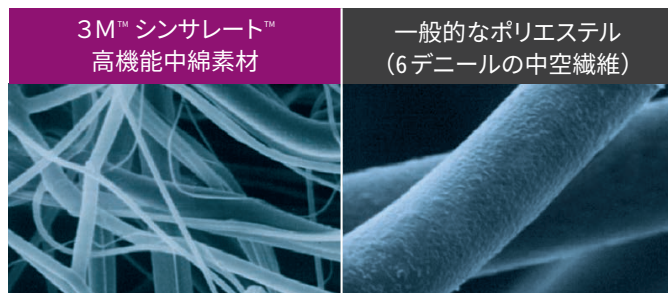

保温性能試験

一般財団法人カケンテストセンターで実施、
JIS L 1096 A法による

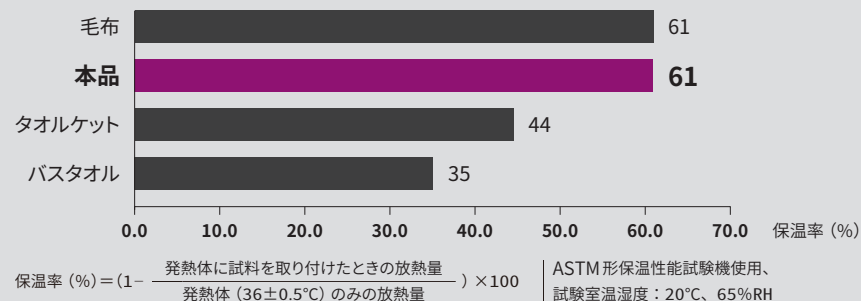

感染リスクの低減(単回使用、低リント性)


低発塵性（低リント）を実現

感染対策に厳しい手術室でも安心してご使用いただけるよう、本品は単回使用です。

また、スリーエムのテクノロジーの一つである不織布技術を活用した3M™ シンサレート™ 高機能中綿素材は低発塵性（低リント）を実現し、特に手術室で心配される感染リスクの低減に貢献します。

発塵性試験


一般財団法人カケンテストセンターで実施、
JIS B 9923 準用

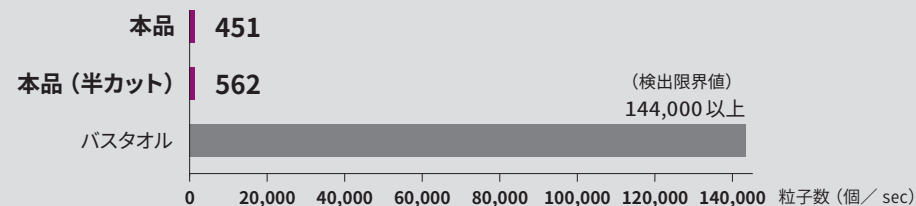

さまざまな用途に対応

最大4分割に切り離しが可能

“かけるだけであったかい”保温ブラン
ケットは、術前是一张で全身の保温に、
術中は切り離して術式に合わせた形
での使用などさまざまな用途に対応
できるよう、最大4分割に切り離しが
可能です。

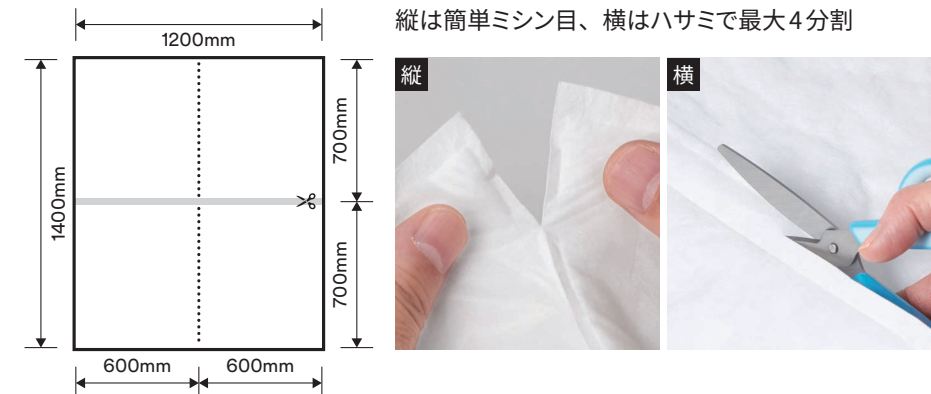

用途例 1


手術室で加温ブランケットと 組み合わせて

術前の全身保温から術中の体位や術野に応じた保温が
可能です。

用途例 2



カテーテル検査・治療時に 冷えやすい末梢の保温に

穿刺部位や患者さんの訴えに応じた保温部位に柔軟に
対応できます。

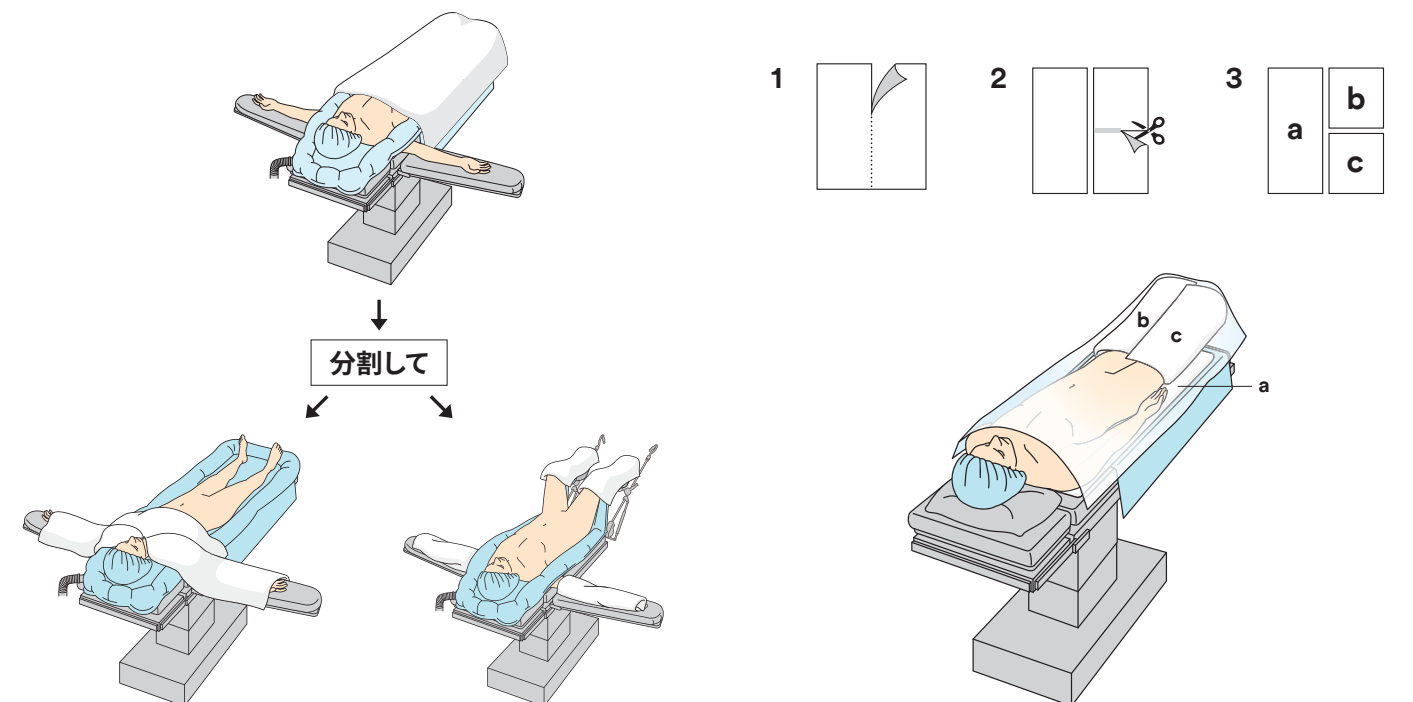




手術室での温風式加温装置との併用例[※]

全身への使用例

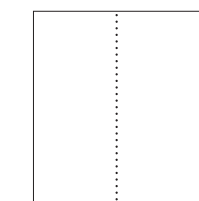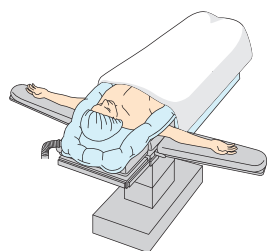







切らずにご使用ください

下半身への使用例


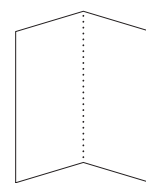
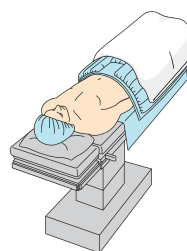
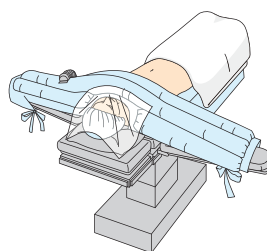


半分に折ってください




上半身への使用例

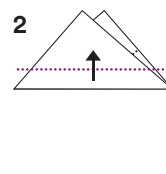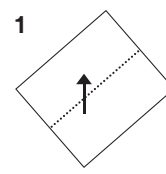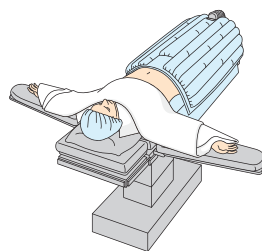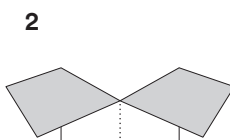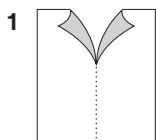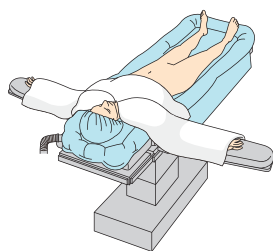

上半身と下半身への使用例

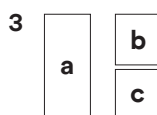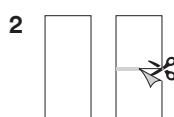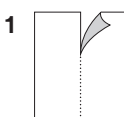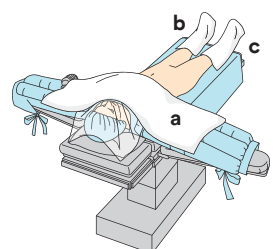

四肢への使用例

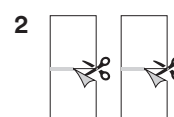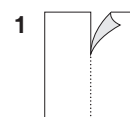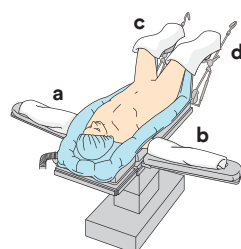

※ 3M™ ワンタッチベルトは保温ブランケットの仮止め用として使用いただけます。詳しくは弊社担当者までお問合せ下さい。

3M™ かけるだけであったかい保温ブランケット(未滅菌)

単回使用

製品番号	素材/サイズ	入れ目	
		枚/袋	袋/箱
KAB-1214	PP (ポリプロピレン) PET (ポリエチレンテレフタレート) / 1200mm×1400mm	1	20



KAB-1214

サンプルお申し込み

本製品をお試しになりたい方はこちらからサンプルをご請求いただけます。

<http://go.3M.com/medical/KABscv/bro/>

保温ブランケット 3M



3M™ ベアーハガー™ 体温管理製品 ウェブサイト

患者加温の基礎知識からブランケットの使い方のコツ、勉強会テキストなど効果的・効率的な周術期体温管理についての情報を掲載!

<http://go.3M.com/bair-hugger-jp/>

ベアーハガー 3M



3M™ ベアーハガー™
体温管理製品

3M™ ベアーハガー™
パシエントウォーミング モデル 675

販売名: 3M ベアーハガー パシエントウォーミング モデル 675
認証番号: 229ADBZX00130000



3M™ ベアーハガー™
アンダーボディ ブランケット モデル 585

販売名: 3M ベアーハガー パシエントウォーミング ブランケット
認証番号: 223ADBZX00108000



3M、ベアーハガー、Thinsulate、シンサレートは、3M社の商標です。

2020年6月発行

スリーエム ジャパン株式会社
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
HPM-729-G(0620)SE

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)