

3M Science.
Applied to Life.™

**Soluciones Eficaces para
Restauraciones.
Repare y Proteja.**



**Porque a ellos tampoco
les gusta esperar.**

Menú ›

Su tiempo importa tanto como el de ellos...

Cuando empieza a acumular atrasos—como todos sabemos que puede pasar—los pacientes no esconden su decepción y el día se hace largo. Así que para ayudarle a no tener atrasos, hemos simplificado el procedimiento que realiza con más frecuencia—la restauración posterior.

La clave de este procedimiento es 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador... con una mayor opacidad para un mejor resultado estético. Se puede aplicar de manera rápida y fácil en incrementos de 5mm—sin poner en riesgo el resultado estético.

Usándolo con otros productos 3M diseñados para que sean fáciles de usar, realizará restauraciones posteriores de forma rápida y sencilla.

Sus pacientes estarán contentos—y usted también lo estará cuando su día de trabajo acabe a tiempo.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO



Menú

Introducción	3
Adhesivo	4
Compuesto	8
Fotopolimerización	16
Acabado y pulido	19
Protección anticaries	21
Recursos	23
Información de pedidos	24

INTRODUCCIÓN

Procedimiento de Restauración Posterior

Rápido y fácil desde el principio hasta el final.

Usando en conjunto estas Tecnologías innovadoras puede realizar restauraciones posteriores de forma rápida y sencilla.



adhesivo de 1 capa en 1 paso



colocación en bloque en 1 paso hasta 5 mm



1 luz de polimerización fácil de usar



1 forma única para pulir



1 forma fácil de proteger

3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo

Versátil. Gran fuerza de adhesión. Una técnica simple y una aplicación rápida en 35 segundos. Prácticamente sin sensibilidad postoperatoria.



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

La simplicidad de la aplicación en bloque hasta 5mm de profundidad. Baja tasa de desgaste y de contracción, que alivia el estrés de polimerización. Opacidad optimizada para un mejor resultado estético.



3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de Polimerización

Polimerización predecible y fiable. La guía de luz optimizada es más cómoda para los pacientes y proporciona un mejor acceso a las piezas posteriores.



3M™ Sof-Lex™ Diamond Sistema de Pulido

Se adapta fácilmente a a todas las superficies, irregulares, cóncavas, convexas y aporta un brillo final similar al que se obtiene con los sistemas de pulido con pastas, pero con la sencillez y comodidad del sistema Sof-Lex.



3M™ Clinpro™ Crema Dental Anticaries con 0,21% Fluoruro sódico

El fosfato tricálcico (TCP) de 3M ayuda a reparar las manchas causadas por la falta de mineralización y a proteger contra las caries. Sustituye a la pasta de dientes en la rutina diaria de limpieza de dientes, facilitando el cumplimiento del tratamiento. Sin receta médica.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

ADHESIVO

4

Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

ADHESIVO

**Adhesivo 3M™
Scotchbond™ Universal**

Adhesivo de 1 paso, 1 capa para una aplicación rápida

Ya tiene suficientes decisiones que tomar. Elija su adhesivo con confianza.

Simplificar el paso de unión no es tarea fácil. Por ello 3M ha desarrollado un adhesivo en el que puede confiar y que puede usar tranquilamente sobre cualquier superficie dental, con cualquier técnica de grabado, tanto en aplicaciones directas, como indirectas.

Le encantará su gran versatilidad.


Tiempo de aplicación rápido, 35 segundos



Aplicar el adhesivo en todo el diente usando el aplicador desechable. Frótelo durante 20 segundos.



Secar con aire cuidadosamente durante unos 5 segundos hasta que deje de moverse y el disolvente se haya evaporado completamente.

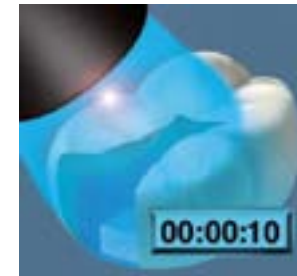

Fotopolimerizar durante 10 segundos. Completar el procedimiento de restauración de forma habitual.



Prácticamente sin sensibilidad postoperatoria en aplicaciones de grabado total o autograbado

Porcentaje de restauraciones de grabado total con el Adhesivo Universal Scotchbond Universal con sensibilidad postoperatoria.



0,4%



0,06%

Fuente: datos internos de 3M

Antes de la aplicación del adhesivo, la dentina o el esmalte se pueden grabar con ácido, depende de la preferencia del dentista



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ




PRÓXIMO

ADHESIVO

Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal


Use su técnica preferida sin poner en riesgo la elevada dureza de adhesión, fiable y duradera.

- Elevada fuerza de resistencia a la cizalla tanto en dentina como en esmalte. Ya sea usado como adhesivo autograbante o como adhesivo de grabado total
- Adhesión consistente en dentina grabada seca o húmeda.
- Excelente integridad marginal para restauraciones extremadamente estéticas

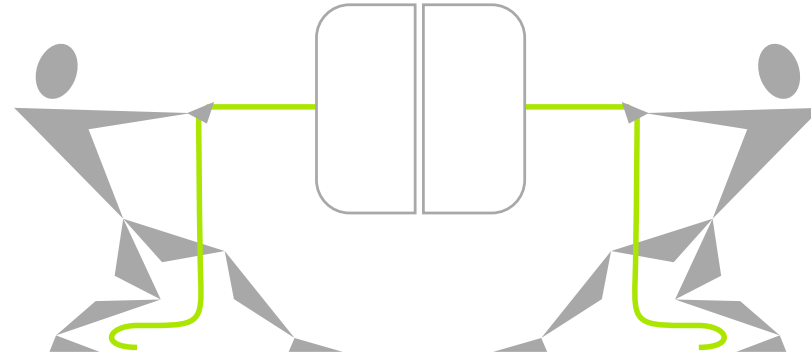



Fortaleza de adhesión de autograbado

3M™ Scotchbond™ Adhesivo Universal comparado con la competencia

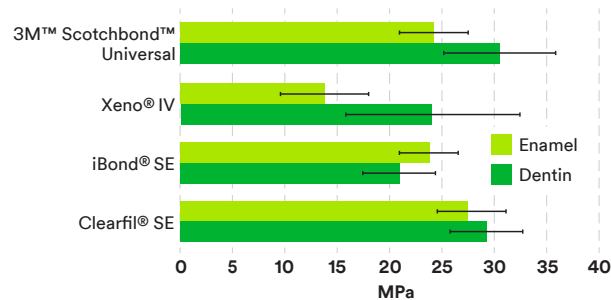

Fortaleza de adhesión de grabado total

3M™ Scotchbond™ Adhesivo Universal comparado con la competencia

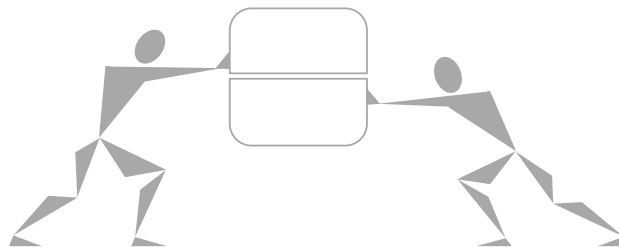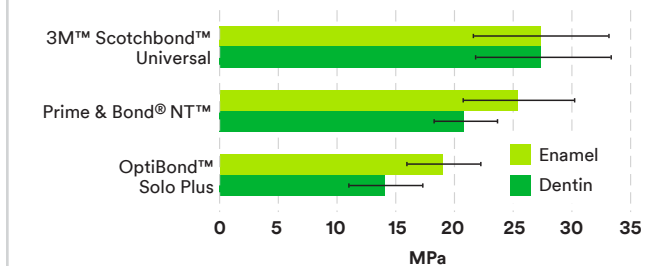

Se adhiere a cualquier superficie.

El Adhesivo Universal 3M™ Scotchbond™ se adhiere a todas las superficies, incluyendo esmalte, dentina, cerámicas vítreas, zirconia, aleaciones nobles y no preciosas y composites, sin usar un primer adicional. En combinación con el 3M™ Scotchbond™ Universal DCA Dual Cure Activador, el adhesivo universal Scotchbond es compatible con todos los cementos de resina, materiales de reconstrucción de muñón e ¡incluso compuestos autopolimerizables!



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

ADHESIVO


Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal

Vídeos



Batalla de las Adhesiones

Obtenga las estadísticas del Adhesivo Universal 3M™ Scotchbond™, y vea lo que pasa cuando se compara con otros adhesivos dentales.

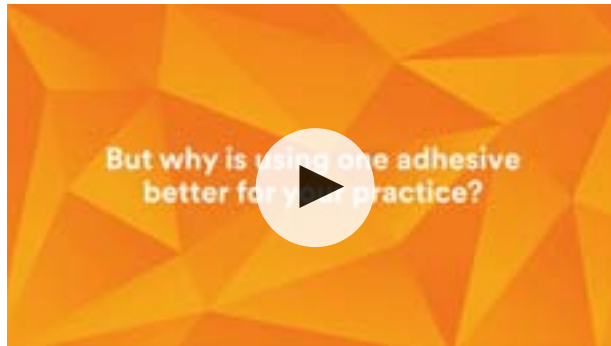

¿Por qué sólo un adhesivo?

¿Tiene serias intenciones de simplificar su día de trabajo haciendo que su clínica sea más eficiente? Este vídeo le enseñará cómo.



Cambie con confianza

¿Está pensando en cambiar a un adhesivo universal pero necesita que le convenzan de que es la decisión acertada? Este vídeo le ayuda a despejar sus preocupaciones.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

◀
ANTERIOR

↶
VOLVER AL MENÚ

▶
PRÓXIMO

COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

La colocación en bloque en 1 paso ahora también puede ser más estética.

Las restauraciones posteriores suponen un reto, por ello los compuestos de relleno en bloque que simplifican y aceleran el procedimiento se han hecho tan populares.

Sin embargo, hasta ahora, la colocación más rápida y fácil de relleno en bloque se ha hecho sacrificando la estética.

Así que, como líder mundial en tecnologías restauradoras y de estética, nos dirigimos a nuestros expertos para buscar una solución que estamos seguros que le encantará: 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador.

Hasta 5 mm

Diseñado para las piezas posteriores, sus propiedades ópticas y la opacidad mejorada le ofrecen la simplicidad de la aplicación en un paso - hasta 5 mm de profundidad - sin comprometer los resultados estéticos.



No hace falta aplicar en capas ni son necesarios caros dispositivos de dispensado. Una sola aplicación en bloque, hasta 5 mm de profundidad.



Vídeo de la campaña

Elija un compuesto de relleno en bloque por la velocidad. Ahora también es más estético. Descubra como 3M ofrece la simplicidad y la velocidad de la aplicación en bloque hasta 5 mm... sin comprometer los resultados estéticos.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

La ciencia 3M es lo que está detrás de la estética mejorada

Cómo la ciencia 3M permite disponer de la sencillez de un composite bulk fill, con una estética mejorada.

El desarrollo de la nanotecnología de 3M nos permite gestionar la opacidad y la profundidad de la polimerización de una forma más inteligente. Con nuestra tecnología "Smart Contrast Ratio" hemos aumentado la opacidad sin reducir la profundidad de polimerización.


En su estado polimerizado, 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador tiene una opacidad mayor que 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador Posterior, resultando en una estética mejorada.

¡NUEVO!

"Smart Contrast Ratio"

"Contrast Ratio"

El "Contrast Ratio" es la medición de la translucidez o la opacidad del material.

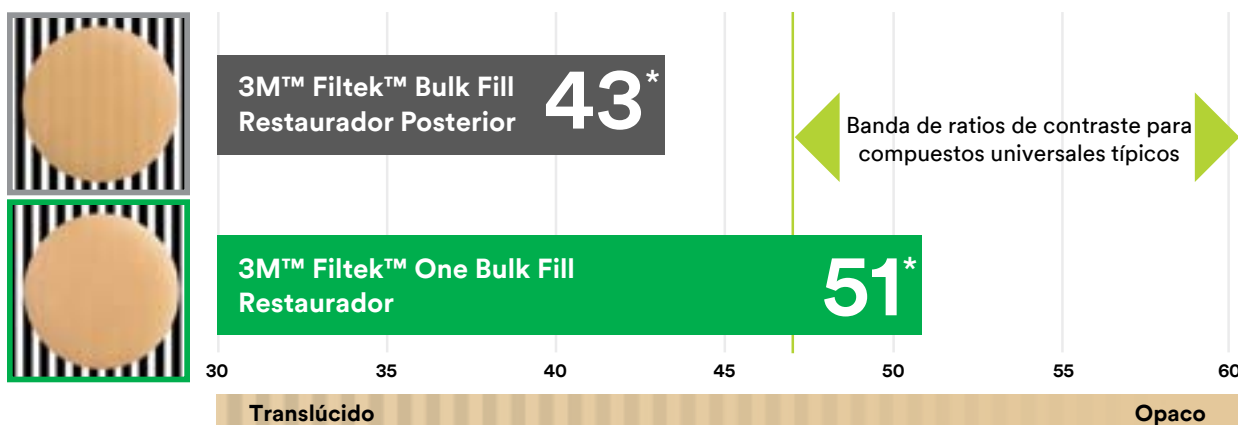

*El ratio de contraste es la media de los tonos.



Vídeo de la tecnología

Descubra cómo las tecnologías de 3M hacen de Filtek One Bulk Fill un composite con las ventajas de dispensado de un composite bulk fill, con una estética muy mejorada.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO


COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

La ciencia 3M es lo que está detrás de la reducción de estrés de polimerización y los 5 mm de profundidad de curado


Tradicionalmente, la mejor manera de controlar la contracción de polimerización y el estrés que esto genera, era aplicar capas de composite. Sin embargo, es un proceso muy cuidadoso que le puede costar mucho tiempo y dinero.

Pero 3M lo ha cambiado todo con Filtek One Bulk Fill. En su composición usamos dos resinas para reducir el estrés de polimerización: AFM y AUDMA.

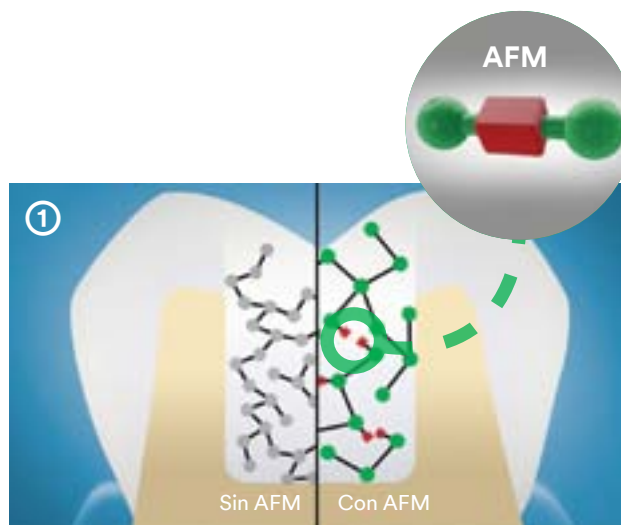

AFM

El innovador componente de la primera resina es un monómero de adición-fragmentación (AFM). La característica diferenciadora de esta resina es que durante la polimerización, el grupo central se puede fragmentar para aliviar la presión. Los fragmentos se pueden volver a polimerizar en un estado con menos presión.

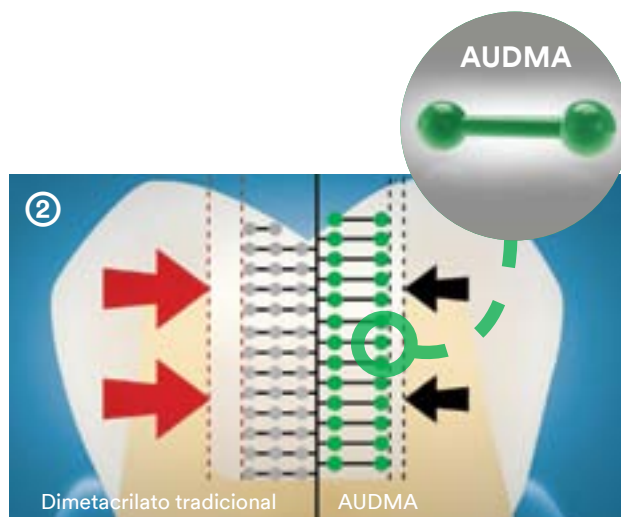

AUDMA

El otro componente de resina es uretano dimetacrilato aromático (AUDMA). Debido a que es un monómero mayor al que se suele encontrar en los dimetacrilatos, limita el número de zonas de contracción. Esto ayuda a reducir la contracción total de polimerización y el estrés que esta genera.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

¿Por qué perder tiempo aplicando capas?

Puede mejorar la productividad aplicando 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador en una capa de hasta 5 mm de profundidad.

¡Piense en el tiempo que ahorrará!

Filtek One Bulk Fill Restaurador genera un estrés de contracción menor o igual en el diente respecto a los composites que se aplican en capas.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador



Una aplicación en bloque de hasta 5 mm

+





3 x 10 seg.
fotopolimerización
(oclusal, bucal, lingual)



Hoja de datos

↓ **DESCARGAR AHORA**

Composites tradicionales (incrementos de 2 mm)

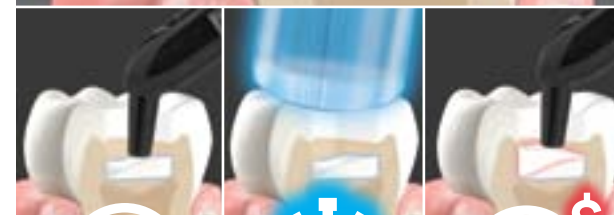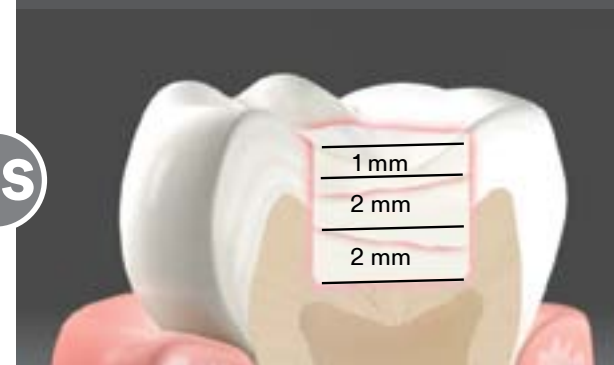


capa de 2 mm



fotopolimerización de 10 s



capa de 2 mm

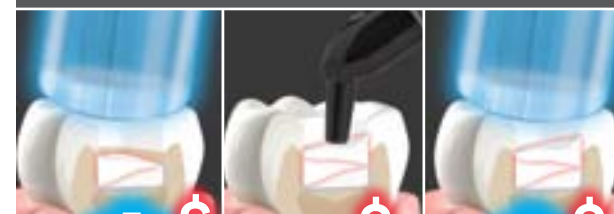

fotopolimerización de 10 s



capa de 2 mm



fotopolimerización de 10 s



= pasos, material o equivalentes adicionales.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO


COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

Adaptación excelente a las cavidades, similar a un restaurador fluido


Otro factor clave a tener en cuenta para un material que se aplicará en bloque es la excelente adaptación a la preparación de la cavidad. Observe estas demostraciones de laboratorio para ver lo simple que es conseguir una buena adaptación a la cavidad usando 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador.

Vea los vídeos

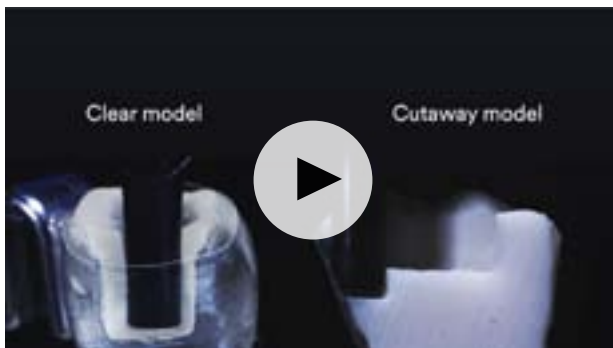

Demonstración

Para darle una visión real de la viscosidad, fluidez y excelente adaptación de Filtek One Bulk Fill Restaurador, hemos hecho un vídeo de su aplicación en un modelo transparente y un modelo seccionado, simulando una restauración posterior de gran tamaño.

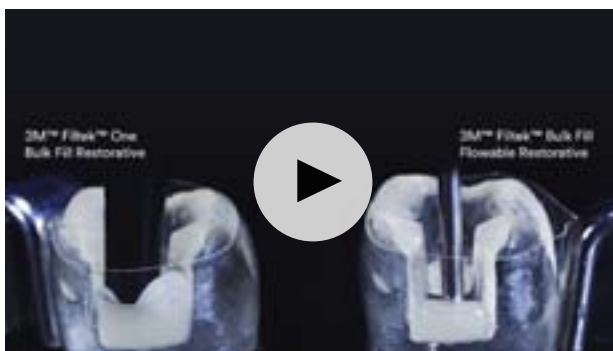

Comparación

¿Cómo de bien se adapta Filtek One Bulk Fill Restaurador a una cavidad grande? El vídeo grabado en un modelo transparente proporciona una vista de cerca en comparación, en paralelo, con un composite *fluido*.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO


COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador


La ciencia 3M está detrás de fortaleza, resistencia al desgaste y el pulido

Tecnología 3M de Nanorrelleno REAL

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador usa la misma tecnología de Nanorrelleno REAL que se ha probado en otros productos Filtek™ líderes en restauración dental. Esta tecnología no solo contribuye a una alta fortaleza, excelente manipulación y mejor resultado de desgaste, sino que también hace a las restauraciones fáciles y rápidas de pulir.

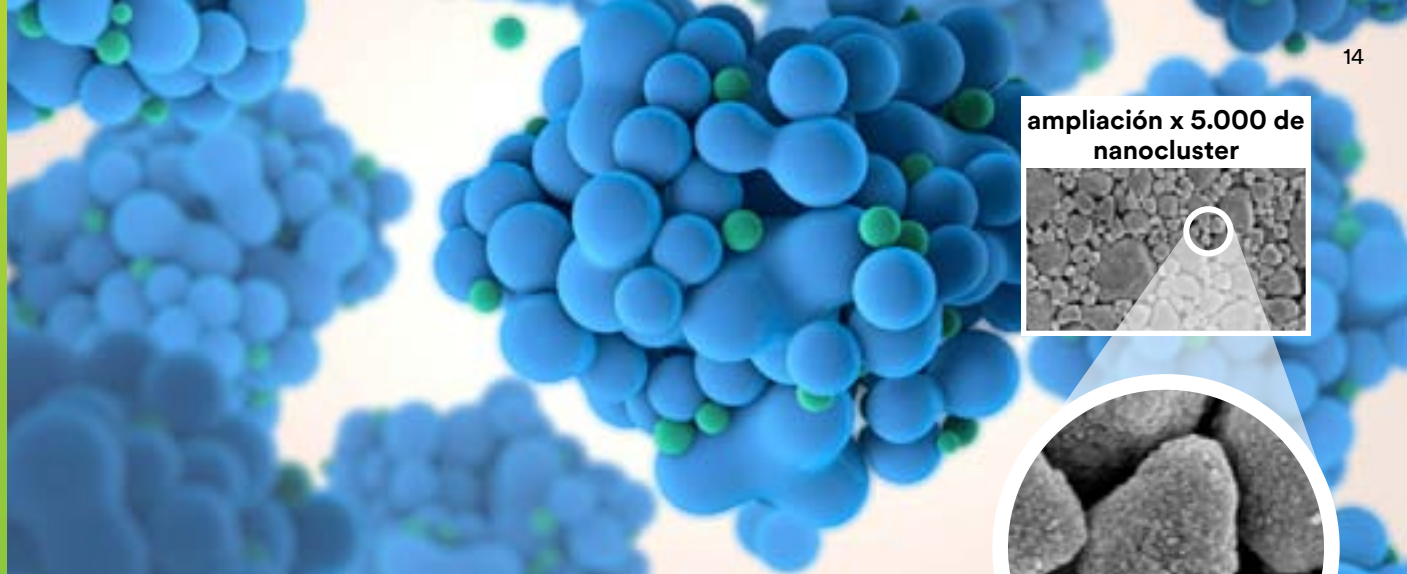


ampliación x 5.000 de nanocluster

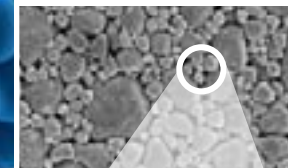


ampliación x 50.000 de nanocluster

Retención de pulido de composites de aplicación en bloque comunes

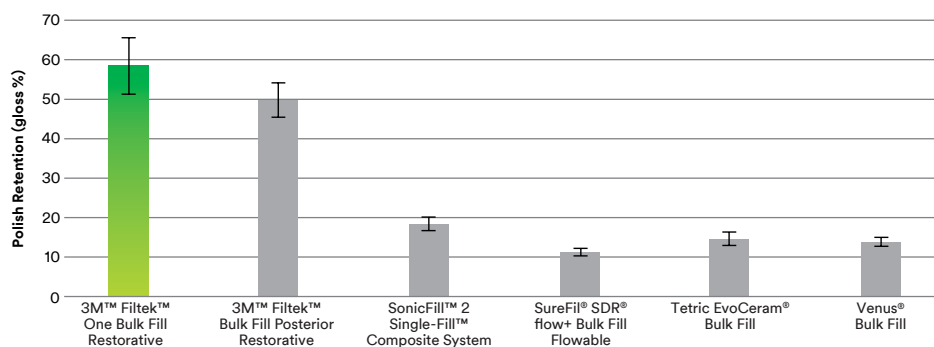

Fuente: datos internos de 3M

Retención de pulido de composites universales comunes que se aplican en capas

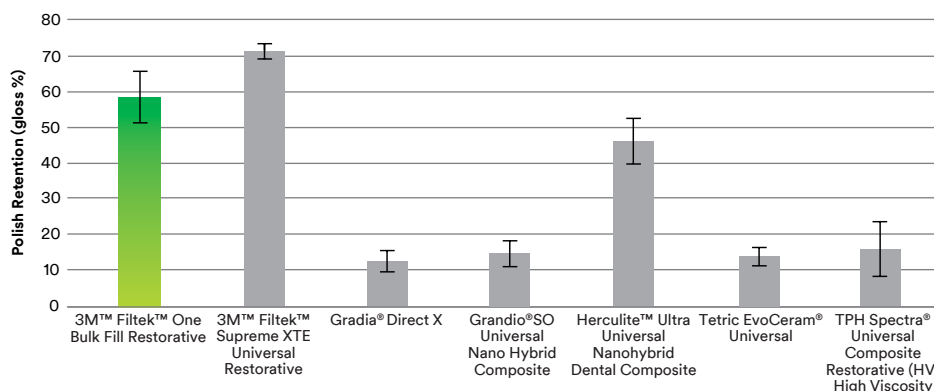

Fuente: datos internos de 3M

Nanotecnología única

Las nanopartículas que se encuentran en los restauradores Filtek™ se forman exclusivamente en la gama de las nano dimensiones y no son resultado de un proceso de trituración. Algunos se fusionan en nanoclusters, que se cizallan a una tasa similar al desgaste de la matriz de la resina circundante durante la abrasión, como la abrasión del cepillo de dientes, resultando en un brillo superficial suave y una retención de pulido inigualable. Los nanoclusters tienen un rango de tamaño similar al de los rellenos que se encuentran en los compuestos híbridos y proporcionan una carga de relleno mayor con unas propiedades físicas y una resistencia al desgaste excelentes.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO


COMPUESTO

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

La resistencia al desgaste es vital para el éxito a largo plazo de una restauración, especialmente con piezas posteriores, que tienen una mayor carga.

Esta es una de las razones por las que 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador es una parte tan importante de una solución eficiente para restauraciones posteriores, porque ofrece una mejor resistencia al desgaste respecto a otros rellenos de bloque y composites aplicados en capas.


Resistencia al desgaste comparada con otros materiales de relleno en bloque

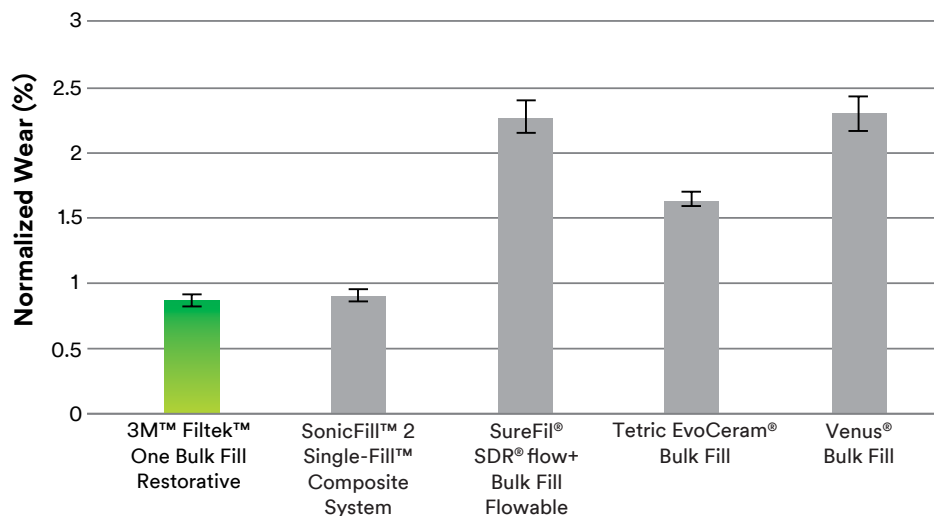

Desgaste de tres cuerpos, in vitro, de composites comunes de relleno en bloque.

Fuente: datos internos de 3M

Resistencia al desgaste comparada con composites universales aplicados en capas

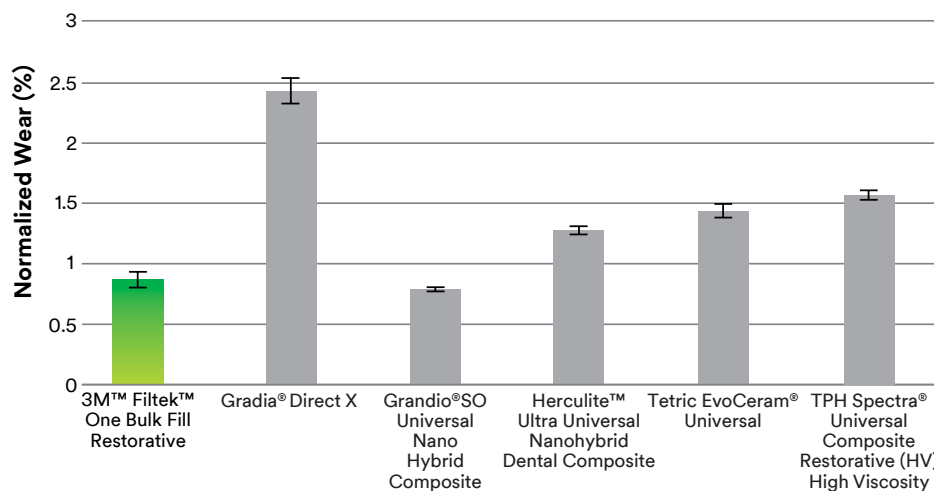

Desgaste de tres cuerpos, in vitro, de composites comunes de relleno aplicados en capas.

Fuente: datos internos de 3M



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de Polimerización



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO



LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de Polimerización

Esté seguro de su polimerización

¿Usa con frecuencia materiales de relleno posterior o de bloque? Los estudios demuestran que el 69% de los dentistas que colocan restauraciones de relleno en bloque no confían plenamente de la polimerización en el interior de la cavidad. 3M se lo ha tomado como un reto y la respuesta ha sido las Lámparas de Polimerización 3M™ Elipar™ DeepCure LED. Los dentistas pueden elegir entre dos modelos, el que se adapte mejor: la versión de alta calidad, duradera y en acero inoxidable o un modelo con el mismo rendimiento, pero más ligero.

1. Clinicians Report, October 2014, Volume 7, Issue 10



Una polimerización profunda y uniforme.


Las Lámparas de Polimerización Elipar DeepCure LED son fieles a su nombre. Gracias a la óptica optimizada, puede tener la confianza de que sus restauraciones tendrán una polimerización profunda e uniforme del centro hasta el borde, desde la superficie, hasta el fondo de la cavidad y a distancias clínicamente relevantes. Los resultados de los ensayos de laboratorio demuestran por qué.



Fuente: datos internos de 3M

Comparación de penetración de la luz

Una distribución de la energía más homogénea a lo largo de la restauración. Las imágenes que comparan la penetración de luz de varios dispositivos de fotopolimerización muestran que las Lámparas de Polimerización Elipar DeepCure LED, generan un haz de luz más uniforme y colimado, incluso en las zonas más profundas.

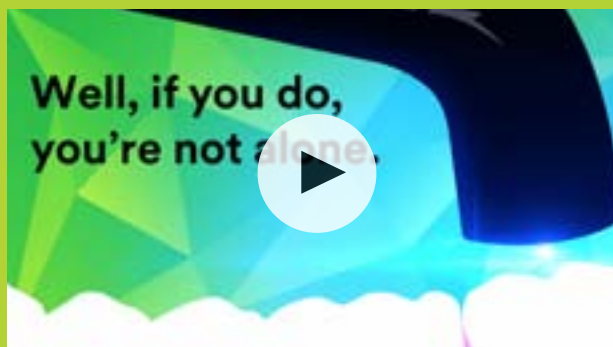

Falta de polimerización

Si le preocupa la falta de polimerización, no está solo. La fotopolimerización es un factor vital en los procedimientos de restauración con éxito. Vea como se ha diseñado 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de Polimerización para evitar la falta de polimerización.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de Polimerización

Puede confiar en que obtendrá una polimerización completa.

El perfil profundo y uniforme del haz y la mejor uniformidad de la luz, así como la distribución de intensidad de la Lámpara de Polimerización 3M™ Elipar™ DeepCure LED significa una mayor profundidad de polimerización, incluso cuando es difícil conseguir un posicionamiento perfecto de la lámpara.

Las Lámparas de Polimerización 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED ayuda a compensar los ligeros movimientos durante la polimerización, proporcionando una gran profundidad de polimerización, como se muestra a la derecha.


Al fin y al cabo se trata de ser capaz de progresar en el proceso de restauración de la forma más eficiente y con mayor confianza.

¿Qué significa esto para sus resultados clínicos?

Significa una gran profundidad de polimerización, especialmente cuando el posicionamiento de la lámpara es difícil.

Las Lámparas de Polimerización 3M™ Elipar™ DeepCure LED ayudan a compensar los ligeros movimientos durante la polimerización, proporcionando una gran profundidad de polimerización, como se muestra a la derecha.

Profundidad de polimerización (mm) para varias posiciones

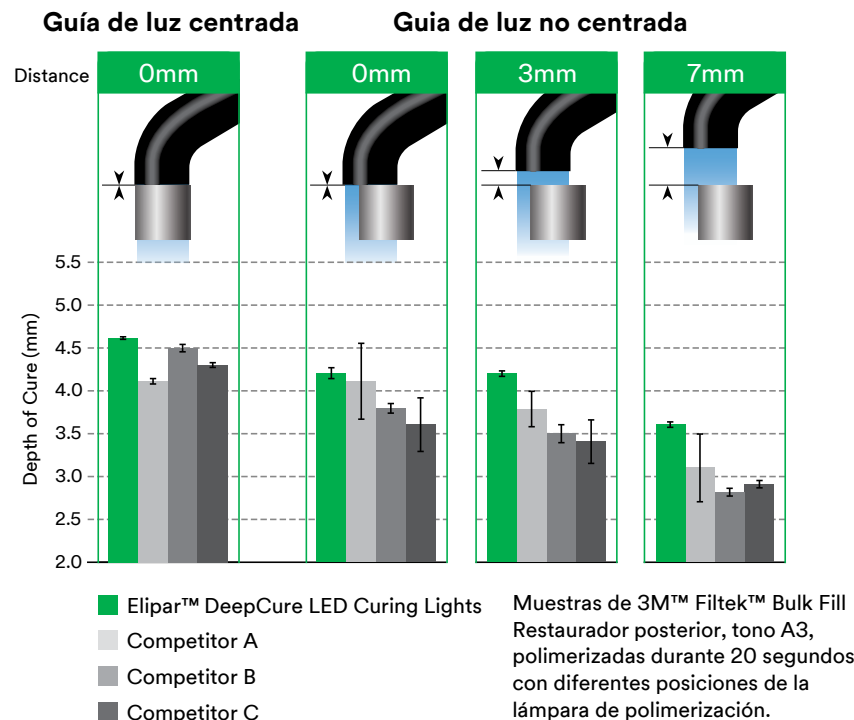

Diseñado para ofrecer más comodidad y un acceso más fácil a las piezas posteriores.

Las Lámparas de Polimerización 3M™ Elipar™ DeepCure LED Curing Light están diseñadas con un ángulo y una altura óptimos que las hacen más cómodas para los pacientes, incluso para los que tienen una capacidad limitada para abrir la boca. A los odontólogos también les parece fácil de usar, con un acceso más fácil a todas las superficies de los dientes, incluso a las zonas de acceso más difícil.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

ACABADO Y PULIDO

Sistema de Pulido 3M™ Sof-Lex™ Diamond

◀
ANTERIOR

↶
VOLVER AL MENÚ

▶
PRÓXIMO

ACABADO Y PULIDO

3M™ Sof-Lex™ Diamond Sistema de Pulido

1 forma única para pulir

Puede dar un brillo como el de la pasta de diamante a las restauraciones, pero en menos tiempo y de forma más simple.

Hemos aprovechado nuestra historia sin precedentes en tecnologías abrasivas para ofrecerle una forma fácil de obtener un bonito pulido brillante.

Con 3M™ Sof-Lex™ Diamond Sistema de Pulido, puede obtener un fantástico brillo similar a la pasta de diamante, con la velocidad y la comodidad del sistema Sof-Lex.

Verá lo fácil que es trabajar en las piezas posteriores.

Las ruedas en espiral funcionan en cualquier ángulo, facilitando el trabajo intraoral. Debido a que las partículas abrasivas están incrustadas a lo largo de la herramienta, todas las superficies de la rueda en espiral se pueden usar: lateral, parte superior, parte inferior, borde.

Es reconfortante saber que al mismo tiempo que son efectivas, son suaves con los tejidos gingivales ¡y mantienen la integridad y la anatomía de sus restauraciones!

Una forma flexible pule todas las superficies.



Oclusal




Bucal



Posterior Lingual



Anterior Lingual

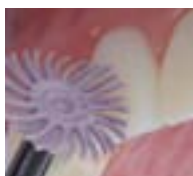

Facial



Interproximal

Para obtener los mejores resultados, usar una presión de ligera a moderada y un aparato de velocidad lenta durante todas las fases de prepulido y el pulido final de alto brillo.

¡Una diferencia que puede ver!

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Restaurador pulido con Sof-Lex Diamond Sistema de Pulido (izquierda) vs. TPH Spectra® Composite Universal pulido con Enhance® Sistema de Acabado y PoGo® Sistema de Pulido (derecha). Observe un reflejo más claro con el sistema de pulido Sof-Lex Diamond.



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

3M™ Clinpro™ Tooth Creme

0,21% Fluoruro sódico

Pasta de dientes anticaries



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

PROTECCIÓN

3M™ Clinpro™ Tooth Creme 0,21% Fluoruro sódico Pasta de dientes anticaries

1 forma fácil de proteger

Cuando haya restaurado los dientes protéjalos contra futuras caries con este tratamiento que se realiza en casa y sin receta médica.

La pasta de dientes anticaries 3M Clinpro Tooth Creme con 0,21% de Fluoruro Sódico, es la respuesta.

Además de contener un nivel más bajo de fluoruro, contiene tricalcio fosfato funcional (fTCP) disponible exclusivamente en 3M, de forma que libera calcio y fosfato a la superficie del diente, lo que ayuda a mantener dientes saludables.




Contiene 0,21% NaF (950 ppm)

Ayuda a prevenir y a reparar lesiones iniciales remineralizando la lesión, no solo la superficie.

Tamaño de la lesión de desmineralización después del tratamiento


($\pm$ std dev, n=9)

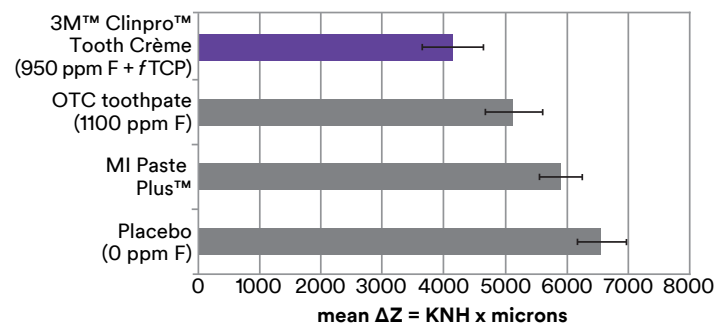

Fuente: Karlinsey RL, et al. Potencial anticaries de dentífricos con fluoruro sódico que contienen sistemas de fosfato de calcio: Observaciones de remineralización de la superficie.

Remineralización del esmalte

(cambio de la base de referencia tras 10 días de ciclo de pH) ($\pm$ SEM, n=18)

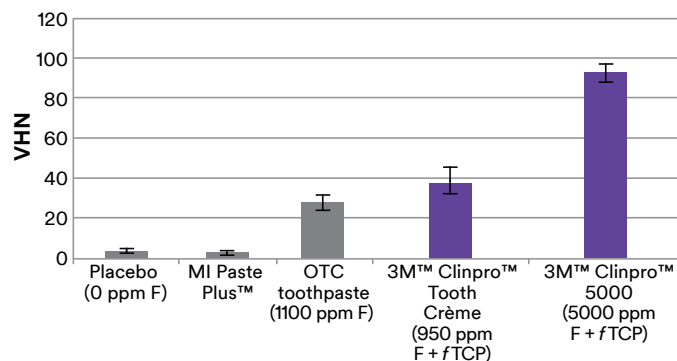

Fuente: estudio de biodisponibilidad del fluoruro y remineralización / desmineralización: 3M datos internos

3M™ Clinpro™ Tooth Creme 0,21% Fluoruro sódico Pasta de dientes anticaries

- ✓ Protección anticaries y ayuda a revertir la desmineralización
- ✓ Probado a lo largo de 5 años de uso clínico
- ✓ Limpia y blanquea los dientes con baja abrasión
- ✓ Sustituye a la pasta de dientes actual del paciente en la limpieza dental, haciendo que sea fácil cumplir con el tratamiento



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

RECURSOS

Solución eficiente de procedimiento de restauración

Vídeo




Vista previa del vídeo
(1:48)

Hoja de ventas



**Solución eficaz
para restauraciones
posteriores**
Hoja de Ventas, 2 páginas
(PDF, 747 KB)

Folleto

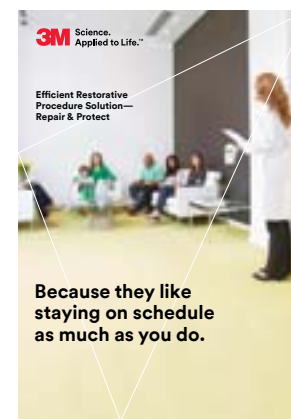

**Solución eficaz
para restauraciones
posteriores**
Repara y Protege, Folleto
de 4 páginas
(PDF, 1.2 MB)



ANTERIOR



VOLVER AL MENÚ



PRÓXIMO

Información de pedidos

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restaurador

Recambio	Elemento #	Elemento #
TONO	JERINGA	CÁPSULA
A1	4866A1	4867A1
A2	4866A2	4867A2
A3	4866A3	4867A3
B1	4866B1	4867B1
C2	4866C2	4867C2

RECAMBIOS DE JERINGA DE TONOS incluye: 1 jeringa de 4g; Guía Técnica; Instrucciones de Uso.

RECAMBIOS DE CÁPSULA DE TONOS incluye: 20 cápsulas de 0,2g; Guía Técnica; Instrucciones de Uso.

3M™ Scotchbond™ Adhesivo Universal

Elemento #	Información de producto
41254	3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo Kit de Introducción—Vial El kit incluye: 1 – vial de adhesivo de 5ml; 50 pocillos de mezcla desechables; 50 microcepillos desechables; 1 – jeringa de grabado de 3ml
41258	Scotchbond™ Universal Adhesivo Recambio: 1 – vial de adhesivo de 5ml
41255	3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo Kit de introducción—40 Dosis Unitarias Incluye: 40 Dosis Unitarias; 1 – jeringa de grabado de 3ml
41256	3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo Kit de introducción—100 Dosis Unitarias Incluye: 100 Dosis Unitarias; 1 – jeringa de grabado de 3ml
41257	3M™ Scotchbond™ Universal Adhesivo Kit de introducción—200 Dosis Unitarias Incluye: 200 Dosis Unitarias; 1 – jeringa de grabado de 3ml
41263	3M™ Scotchbond™ Universal Grabador Gel de Grabado Incluye: 2 – jeringas de grabado 3ml; 50 puntas dispensadoras
41264	3M™ Scotchbond™ Universal DCA Dual Cure Activador Incluye: 1 – vial de 5ml

3M™ Elipar™ DeepCure-S Lámpara de Polimerización LED

Elemento #	Información de producto
76976	3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Lámpara de Polimerización Incluye: Pieza de mano (inalámbrica), Base de carga (230V); Batería Li-ion; Guía de luz de 10mm; Protección ocular
76981	3M™ Elipar™ DeepCure-S Guía de Luz, 10mm
76984	3M™ Elipar™ DeepCure Protección ocular
76985	3M™ Elipar™ DeepCure-S Batería recargable Li-ion

3M™ Sof-Lex™ Spiral Ruedas de Acabado y Pulido

Elemento #	Información de producto
5092-IM	3M™ Sof-Lex™ Diamond Sistema de Pulido—Kit de Introducción El kit incluye: 5 – 3M™ Sof-Lex™ Espirales Pre-pulido (Beige); 5 – 3M™ Sof-Lex™ Diamond Espirales de Pulido (Rosa); 1 – 3M™ Sof-Lex™ RA Mandril; Instrucciones de uso; Tarjeta de técnica
5090	3M™ Sof-Lex™ Espirales de Pre-pulido—Recambio Incluye: 15 Sof-Lex Espirales de Pre-pulido (Beige)
5091	3M™ Sof-Lex™ Diamond Espirales de pulido—Recambio Incluye: 15 Sof-Lex Diamond Espirales de Pulido (Rosa)

3M™ Clinpro™ Tooth Creme Pasta Dental Anticaries con 0,21% Fluoruro sódico

Elemento #	Información de producto
12218	Sabor vainilla – tubo de 115g, 4 oz
12218SM	Sabor hierbabuena – tubo de 115g, 4 oz

www.3M.com



3M Oral Care
3M España S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Tel Contacto (llamada gratuita): 900 101 911
3mespe.spain@mmm.com

3M, Clinpro, Elipar, ESPE, Filtek, Scotchbond y Sof-Lex son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH. Se usan bajo licencia en Canadá. © 3M 2016. Todos los derechos reservados. El resto de marcas registradas no son marcas registradas de 3M.