



**Nem todos os
indicadores
biológicos
são iguais.**

3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super Rápida

14 razões que explicam porque os indicadores biológicos 3M™ Attest™ Super Rápido encontram-se em sua própria categoria.

Provavelmente você já ouviu dizer que todos os indicadores biológicos de leitura super rápida são iguais. Que apresentam desempenho similar e que sua leitura é feita da mesma forma. É importante entender que há diferenças que podem impactar os resultados no momento de

assegurar a esterilização e que comprometem a segurança do paciente. Certifique-se de revisar todas as características do sistema e que o mesmo seja de fácil utilização em sua equipe de trabalho.

1 Cumpre com os requerimentos FDA (Agência de Saúde Norte-Americana)

para funcionar como indicador biológico (IB) a vapor.



2 Qualidade na qual você pode confiar

A 3M vem desenvolvendo e fabricando indicadores biológicos (IBs) há mais de 43 anos.

3 Fácil de usar

Sistema de fácil utilização. Não precisa programar temperatura ou ou tempo para cada via. A tela é clara e consistente com as instruções de uso. Não gera confusão entre tecnologia rápida e super rápida.



4 Fácil de interpretar


Não dá chance para confusão. Cada sinal representa:

- + representa um resultado positivo. Um resultado positivo para um IB processado indica que o processo de esterilização falhou.
- representa um resultado negativo, isto é, indica sucesso no processo de esterilização.



5 Detecção de um IB não ativado ou inserido de modo incorreto

Nosso sistema ajuda a prevenir uma incubação de um IB não ativado no Leitor Automático, reduzindo a possibilidade de obter um resultado falso negativo. Um alarme (erro E11) indicará que o IB foi inserido de modo incorreto. Isto é crítico para reduzir os atrasos na liberação da carga e ajuda a manter os tempos programados de cirurgia.

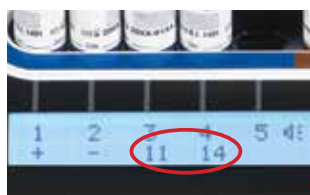

6 Visibilidade de tempo restante

A Incubadora/Leitora 3M™ Attest™ 490 fornece um contador de tempo regressivo que permite ao usuário verificar facilmente o tempo restante.

O Alerta de erros permite uma rápida solução de problemas

As referências de códigos de alerta/erro permitem o problema e a possível solução.



Precisa somente um IB ao dia

A 3M recomenda a utilização de um IB de controle ao dia, sendo este do mesmo lote do IB processado. Não precisa utilizar um IB não esterilizado como controle positivo cada vez que queira fazer uma leitura de IB.

Visualização opcional de resultados por mudança de cor (pH)

Ao final de 48 horas.



Registro de resultados

A Incubadora/Leitora 3M™ Attest™ 490 permite registrar os últimos 100 resultados por meio de seu software. Para uma completa documentação, o usuário poderá salvar os resultados de modo digital ou realizar uma cópia impressa.

Acesso on-line aos registros e conectividade a sistemas de rastreabilidade

Permite visualizar o resultado dos IBs de modo remoto. Administração dos registros com conectividade à Internet em português. Conectividade com estes 5 sistemas de rastreabilidade: Getinge, Carefusion, Haldor, Microsystems e Censis.



Avaliado em publicações globais

- Avaliação de um novo IB para uso em ciclos de pré vácuo a vapor de 132°C a 135°C.¹
- Benefícios clínicos de IBs rápidos.²

1. American Journal of Infection Control, Volume 42, Issue 2, Philip M. Schneider, Evaluation of a new rapid readout biological indicator for use in vacuum-assisted steam sterilization cycles, February 2014.
2. Healthcare Purchasing News, Volume 38 No. 3, Rose Seavy, Clinical benefits of faster biological indicators, March 2014.


Respaldo da tecnologia em 70 países

Suporte técnico e comercial.






Disponível em duas opções

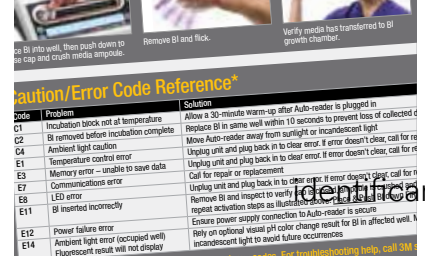- IB individual
- Pacote Teste Desafio com IB + Integrador i5.



Informações para compra

3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super Rápida

Código	Descrição	Embalagem
1492 	3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super Rápida Para ciclos de esterilização a vapor por pré vácuo. (Tampa marrom)	50 unid/caixa
41482 	3M™ Attest™ Pacote Teste Desafio de Leitura Super Rápida Para ciclos de esterilização a vapor por pré vácuo. Cada pacote contém um 3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super Rápida 1492 e um 3M™ Comply™ SteriGage™ 1243 integrador químico tipo 5	24 unid/caixa 24 controles/caixa
41482F	3M™ Attest™ Pacote Teste Desafio de Leitura Super Rápida	24 unid/caixa 5 controles/caixa
490 	3M™ Attest™ Incubadora/Leitora Para uso com o 3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super Rápida 1492 e o Pacote Teste Desafio de Leitura Super Rápida 41482	1 unid/caixa

Para mais informação, acesse:
www.3M.com.br/Hospitalar

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3M.com.br/hospitalar
falecoma3M@mmm.com
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, Km 110
13181-900 - Sumaré - SP

3M, Attest, SteriGage e Comply são marcas da 3M.

