

3M Soluções para Cuidados Crítico e Crônico

3M Steri-Strip™

Segurança e Praticidade  
além das **aparências**  
e **ponto final**

**3M**

# 3M Steri-Strip™

## Prático e Seguro.

Steri-Strip™ é uma sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas e grampos comuns, proporcionando uma recuperação mais rápida, reduzindo infecções hospitalares e com resultados cosmeticamente melhores para o paciente – tudo isso com mais economia e praticidade.

Confira as vantagens de Steri-Strip™ e conte com mais essa inovação 3M em seu hospital.

- Suturas adesivas para fechamento da pele, que aumentam resistência à tensão da ferida <sup>1,2 e 3</sup>.
- Reduz a formação de cicatrizes e o risco de infecções, além de proporcionar melhor resultado estético quando comparado com suturas ou grampos <sup>1 e 4</sup>.
- Dorso poroso, sensível à pressão e reforçado por filamentos de poliéster para maior resistência.
- Cobertura adesiva hipoalergênica, livre de látex e confortável para o paciente.
- Mais econômico que adesivos cutâneos, suturas ou grampos <sup>1</sup>.
- Permite a remoção antecipada de grampos e suturas <sup>1,2 e 3</sup>.

1. Pepicello J, Yavorek H.: Experiência de cinco anos no fechamento de feridas abdominais com fitas adesivas. SG&O, 169:310-314,1989.

2. Chao T-C, Tsaez F-Y: Fita de papel no fechamento de feridas abdominais. SG&O, 171; 65-67,1990.

3. Forrester JC: La ley de Wolff em relação à cicatrização de feridas na pele. J Trauma, 10:770-779,1970.

4. Hirshman HP, Schuman, DJ, Kajiyama, G: Penetração de estafilococo aureus em feridas suturadas. J Ortho Res, 2:269-271,1984.

Levante a lâmina e veja a diferença de resultado entre a sutura convencional e 3M Steri-Strip™.




### Sutura Convencional

A sutura convencional frequentemente deixa uma cicatriz com aparência muito visível.



### Steri-Strip™ 3M

A cicatrização com Steri-Strip™ é mais rápida e tem resultado esteticamente melhor.

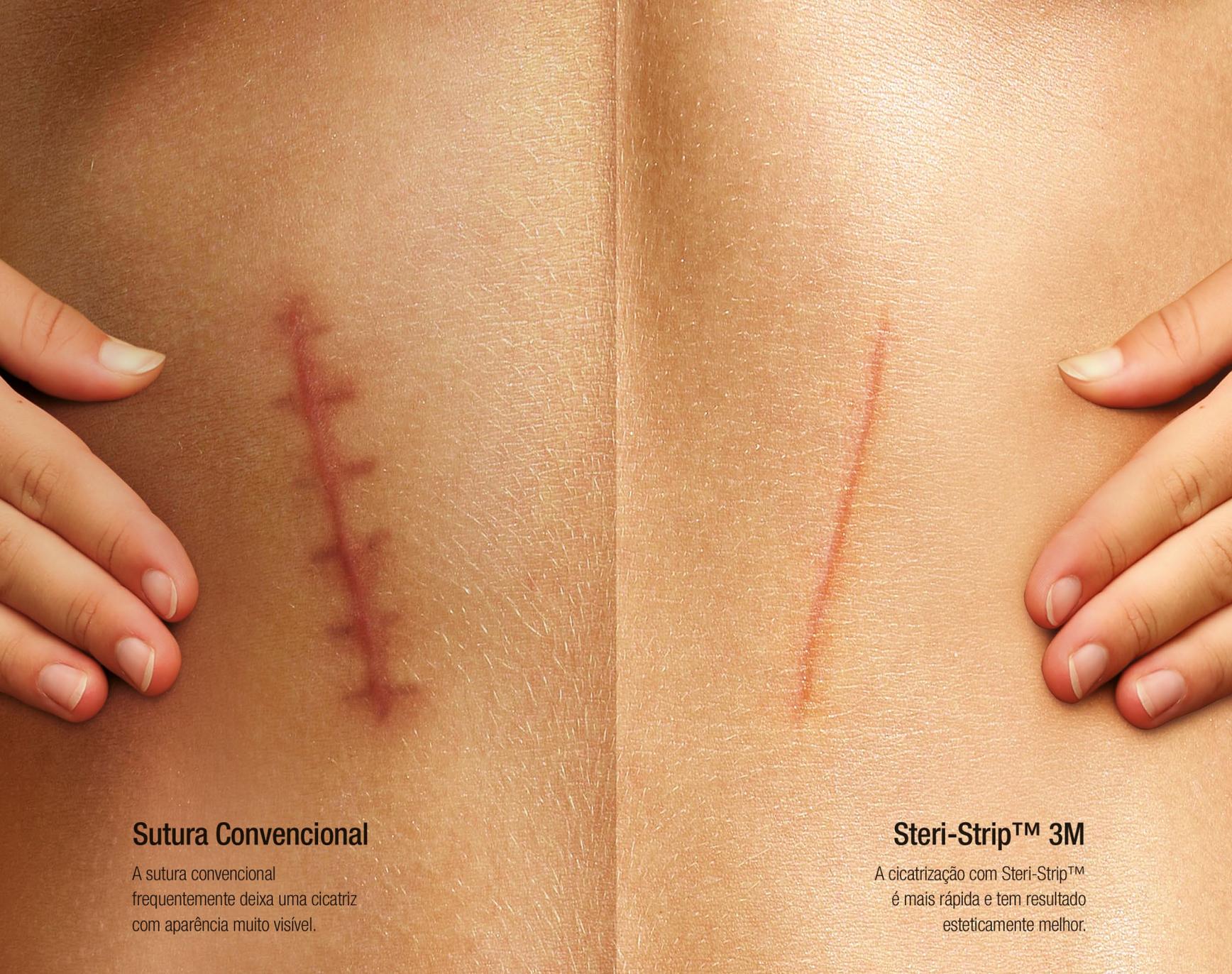

## Sutura Convencional

A sutura convencional frequentemente deixa uma cicatriz com aparência muito visível.

## Steri-Strip™ 3M

A cicatrização com Steri-Strip™ é mais rápida e tem resultado esteticamente melhor.

## Confira as etapas de aplicação das suturas adesivas Steri-Strip™.



1

Limpe e seque completamente a pele em uma área de no mínimo 5 cm ao redor da ferida.



2

Abra a embalagem, retire a lâmina com as suturas e desprenda a lingueta de proteção.




3

Retire uma sutura da embalagem com luvas ou pinças estéreis por cima, em um ângulo de 90°.




4

Aplique a metade da sutura sobre a pele, no ponto médio da ferida, e pressione para alisar.

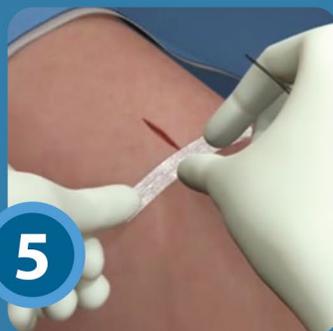

5

Aproxime as bordas da ferida o máximo possível e aplique a outra metade, alisando em seguida.

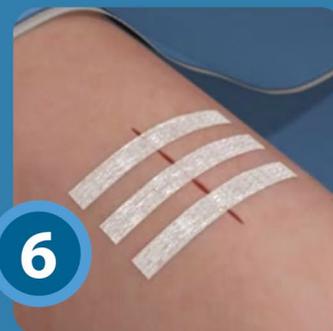

6

Feche o restante da ferida com quantas suturas adicionais forem necessárias, com espaço de 3 mm entre cada uma.


As suturas adesivas Steri-Strip™ estão disponíveis em vários tamanhos. Confira.



1540 • 0,3cm x 7,5cm (Tamanho Real)




1542 • 0,6cm x 3,8cm (Tamanho Real)

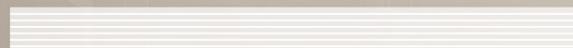


1541 • 0,6cm x 7,5cm (Tamanho Real)



1546 • 0,6cm x 10cm (Tamanho Real)

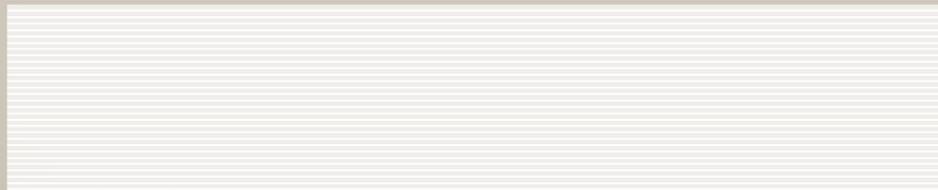

1548 • 2,5cm x 12,5cm (Tamanho Real)

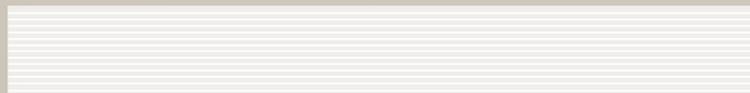

1547 • 1,2cm x 10cm (Tamanho Real)

### Apresentação Comercial:

CÓDIGO	TAMANHO DO CURATIVO	SUTURAS POR ENVELOPE	ENVELOPES POR CAIXA
1540	0,3cm x 7,5cm	05	50
1541	0,6cm x 7,5cm	03	50
1542	0,6cm x 3,8cm	06	50
1546	0,6cm x 10cm	10	50
1547	1,2cm x 10cm	06	50
1548	2,5cm x 12,5cm	04	25

**Fale com a 3M**

**0800-0132333**

[www.3M.com.br/assistenciaaopaciente](http://www.3M.com.br/assistenciaaopaciente)  
[3msolucoesparaenfermagem@mmm.com](mailto:3msolucoesparaenfermagem@mmm.com)



[facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem](https://facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem)



[youtube.com/3mSolucoesparaEnfermagem](https://youtube.com/3mSolucoesparaEnfermagem)

