

50 Jaar
innovatie
in Chirurgische
Hechtpleisters

Betrouwbaarheid en kwaliteit van 3M


Al meer dan 50 jaar biedt 3M het beste onder de kleefproducten. Met een volledig gamma hechtpleisters en huidbeschermingsproducten gekoppeld aan ondersteunende programma's, zet 3M de standaard inzake goede huidzorg.

Onze producten ondergingen volgende tests:

- Human Cumulative Irritation Patch Testing
- Human Repeat Insult Patch Testing
- Uitgebreide tests op menselijke vrijwilligers
- Productevaluaties in een klinische omgeving


3M™ Chirurgische Hechtpleisters bevatten kleefstoffen met de volgende kenmerken:

- Hypoallergeen
- Latexvrij
- Drukgevoelig (verhoging kleefkracht door druk van vinger of hand)
- Huidvriendelijk maar toch efficiënt

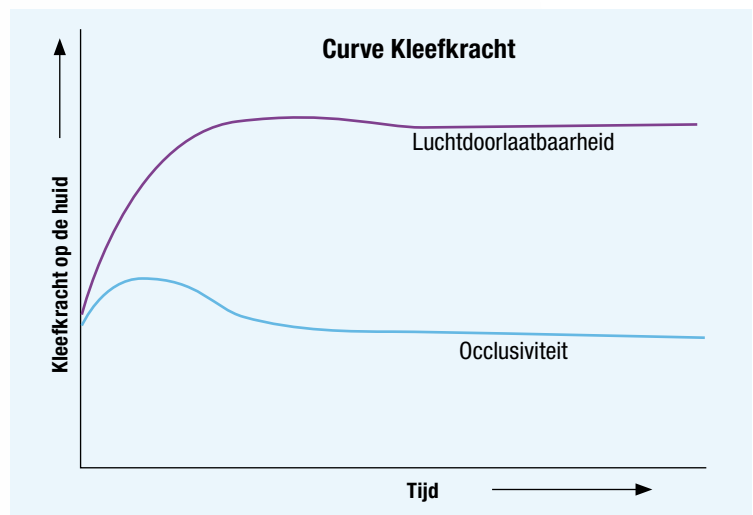

Over het algemeen verhoogt de kleefkracht van pleisters gedurende de eerste 24 uur. Gebruik deze handleiding en het educatieve materiaal voor een juiste selectie uit het gamma van hechtpleisters om het beoogde resultaat te behalen; hierbij zijn veiligheid (minimaal risico op huidbeschadiging) en efficiëntie erg belangrijk.

Een vergelijking van diverse hechtpleisters

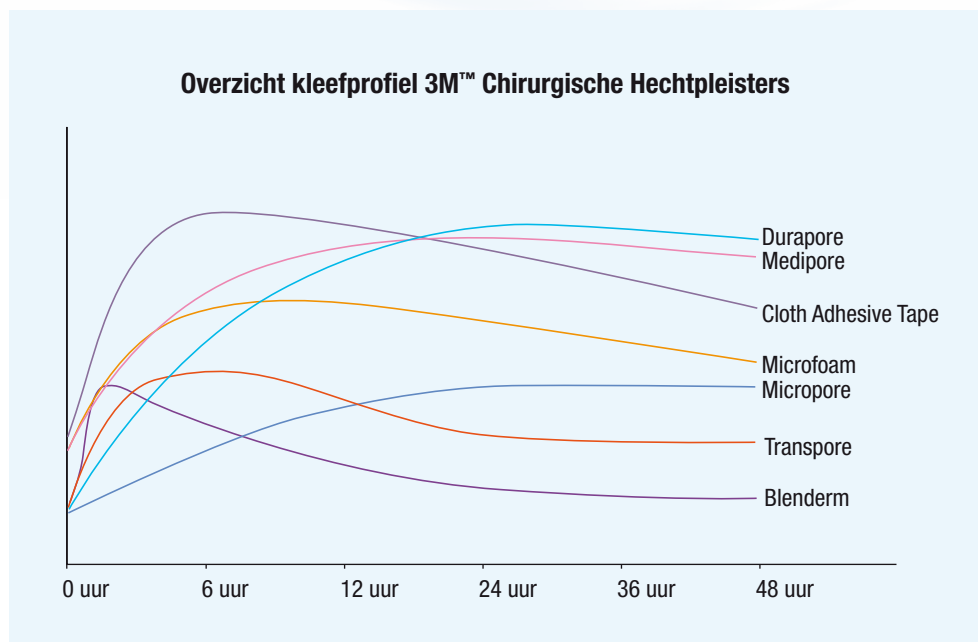

Inhoudsopgave

3M™ Micropore™ Chirurgische Hechtpleister	4
3M™ Transpore™ Chirurgische Hechtpleister	5
3M™ Transpore™ White Chirurgische Hechtpleister	6
3M™ Durapore™ Chirurgische Hechtpleister	7
3M™ Microfoam™ Chirurgische Hechtpleister	8
3M™ Siliconen Hechtpleister	9
3M™ Medipore™ Chirurgische Hechtpleister	10
3M™ CAT Chirurgische Hechtpleister	11
3M™ Blenderm™ Chirurgische Hechtpleister	12
3M™ Medipore™ + Pad	13
3M™ Tegaderm™ + Pad	14
3M™ Tegaderm™ Roll	15
Aanbrengtechnieken: bevestigen van sondes, drains of katheters	16



3M™ Micropore™ Chirurgische Hechtpleister

Economische papieren pleister voor tal van indicaties.



Eigenschappen en voordelen

- Extreem huidvriendelijk
- Poreus
- Luchtdoorlaatbaar; voorkomt maceratie
- Kleeft goed op de klamme huid
- Goed aanpassend
- Hypoallergeen en latexvrij

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van kleine tot matig grote verbanden, vooral op een klamme huid
- Fixatie van lichte tubes
- Wanneer repetitief kleven vereist is.
- 'Allround' oplossing

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Micropore™ Chirurgische Hechtpleister			
1530-0	1,25 x 915 cm	24	1
1530-1	2,5 x 915 cm	12	10
1530-2	5,0 x 915 cm	6	1
1530-3	7,5 x 915 cm	4	10
3M™ Micropore™ Chirurgische Hechtpleister op dispenser			
1535-0	1,25 x 915 cm	24	1
1535-1	2,5 x 915 cm	12	1
3M™ Micropore™ Chirurgische Hechtpleister huidkleur			
1533-0	1,2 x 915 cm	24	1
1533-1	2,5 x 915 cm	12	1
1533-2	5,0 x 915 cm	6	1



3M™ Transpore™ Chirurgische Hechtpleister

Transparante, geperforeerde plastic hechtpleister, makkelijk scheurbaar, betrouwbare kleefkracht.



Eigenschappen en voordelen

- Makkelijk, in 2 richtingen te scheuren
- Laat toe de pleister "op maat" te maken voor fixatie van velerlei soorten verbanden en hulpmiddelen
- Poreus
- Kleeft goed op de huid en tubes
- Transparant
- Hypoallergeen en latexvrij
- Waterbestendig

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van tubes en hulpmiddelen
- Indien de pleisterbreedte "op maat" dient te worden gemaakt

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Transpore™ Chirurgische Hechtpleister			
1527-0	1,25 x 915 cm	24	1
1527-1	2,5 x 915 cm	12	10
1527-2	5,0 x 915 cm	6	10
1527-3	7,5 x 915 cm	4	10



3M™ Transpore™ White Chirurgische Hechtpleister

Huidvriendelijk hechtpleister met een sterke kleeftkracht die zeer eenvoudig is in gebruik door scheurbaarheid in twee richtingen.



Eigenschappen en voordelen

- Huidvriendelijk
- Eenvoudig scheurbaar
- Goede initiële en langdurige (72 uur) kleeftkracht
- Blijft goed plakken op droge of vochtige huid
- Laat de huid ademen en zorgt dat deze intact blijft
- Hypoallergeen en latexvrij
- Waterbestendig

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van tubes en overige medische hulpmiddelen
- Indien de pleister breedte moet worden aangepast

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Transpore™ White Chirurgische Hechtpleister			
1534-0	1,25 x 915 cm	24	1
1534-1	2,5 x 915 cm	12	1
1534-2	5,0 x 915 cm	6	1
1534-3	7,5 x 9,15cm	12	1



3M™ Durapore™ Chirurgische Hechtpleister

Zijde-achtige hechtpleister, met grote kleefkracht.



Eigenschappen en voordelen


- Zeer sterk
- Kleeft goed op de droge huid
- Conformeerbaar
- Veelzijdig in gebruik
- Hypoallergeen en latexvrij
- Waterbestendig

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van tubes en hulpmiddelen
- Fixatie van volumineuze verbanden
- Immobilisatie van vingers en tenen
- Stabilisatie van vingerspalken

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Durapore™ Chirurgische Hechtpleister			
1538-0	1,25 x 915 cm	24	1
1538-1	2,5 x 915 cm	12	10
1538-2	5,0 x 915 cm	6	10
1538-3	7,5 x 915 cm	4	10

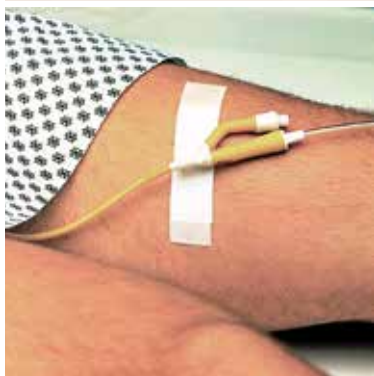

3M™ Microfoam™ Chirurgische Hechtpleister

Zeer goed aanpassende, elastische hechtpleister die als fixatie van drukverbanden of fixatie van verbanden op moeilijke plaatsen gebruikt kan worden.



Eigenschappen en voordelen

- Rekvermogen in alle richtingen om zwelling toe te laten zonder aan comfort in te boeten
- Gemakkelijk conformeerbaar
- Goede kleefkracht, ook op onregelmatige lichaamszones
- Waterbestendig
- Hypoallergeen en latexvrij

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van verbanden op zones onderhevig aan beweging, zoals over gewrichten
- Fixatie van drukverbanden bij oedeemvorming (vb. cardio-vasculaire/angio ingrepen, borstbiopsie, orthopedische, thoracale en abdominale chirurgische verbanden)
- Geeft bescherming waar nodig

Zoals met alle andere pleisters, mag 3M Microfoam Chirurgische Hechtpleister niet uitgerekt aangebracht worden op de huid.

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Microfoam™ Chirurgische Hechtpleister			
1528-1	2,5 x 500 cm	12	1
1528-2	5,0 x 500 cm	6	1
1528-3	7,5 x 500 cm	4	1
1528-4	10 x 500 cm	3	1



3M™ Siliconen Hechtpleister

Een nieuwe kleeflaag op siliconen basis die voorziet in een optimale balans van fixatie en huidvriendelijkheid.



Eigenschappen en voordelen

- Betrouwbare, constante kleefkracht
- Minimaal risico op huidbeschadiging en pijn tijdens verwijderen
- Werkt zelfs op de meest kwetsbare, risicovolle huid
- Makkelijk herpositioneerbaar
- Makkelijk scheurbaar in twee richtingen dankzij de rasterstructuur

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van verbanden bij patiënten met een kwetsbare huid

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Siliconen Hechtpleister			
2770-1	2,5 x 500 cm	12	1
2770-2	5,0 x 500 cm	6	1
2770K-0	1,9 x 60 cm	100	5
2770S-1	2,5 x 130 cm	100	1



3M™ Medipore™ Chirurgische Hechtpleister

Zachte chirurgische hechtpleister met een niet-geweven ruglaag.
Ook beschikbaar met verhoogde kleefkracht.



Eigenschappen en voordelen

- Makkelijk af te scheuren, geperforeerde rollen
- Zacht, laat de huid ademen en vrijwaart haar integriteit
- Uitstekend rekvermogen, kruisgewijs en diagonaal
- Waterbestendig
- Eenvoudig in gebruik - krult niet op en kleeft niet op zichzelf
- Hypoallergeen en latexvrij

Mogelijke toepassingen

- Fixaties op zones waar de huid uitrekt (oedeem swelling, hematoomvorming of over gewrichten)
- Fixatie van post-operatieve verbanden

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Medipore™ Chirurgische Hechtpleister Perforated met Liner			
2991/1	5 x 1000 cm	24	24
2991/2	10 x 1000 cm	12	12
2991/3	15 x 1000 cm	12	12
2991/4	20 x 1000 cm	6	6
2991/5	30 x 1000 cm	6	6
3M™ Medipore™ Chirurgische Hechtpleister Perforated High Performance			
2861	2,5 x 915 cm	24	1
2862	5,0 x 915 cm	12	1
2864	10 x 915 cm	12	1
2866	15 x 915 cm	12	1
2868	20 x 915 cm	6	1



3M™ CAT Chirurgische Hechtpleister

Hypoallergeen en latexvrij. Sterke, makkelijk af te scheuren pleister voor de fixatie van medische hulpmiddelen en ondersteuning bij lichte immobilisaties.



Eigenschappen en voordelen

- Sterke ruglaag
- Hoge initiele kleefkracht
- Minder kleefresten
- Makkelijk kruisgewijs en in lengterichting af te scheuren
- Hypoallergeen en latexvrij

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van tubes
- Immobilisatie van vingers en tenen
- Stabilisatie van spalken

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ CAT Chirurgische Hechtpleister			
2950-0	1,25 x 915 cm	24	10
2950-1	2,5 x 915 cm	12	1
2950-2	5,0 x 915 cm	6	10
2950-3	7,5 x 915 cm	4	10



3M™ Blenderm™ Chirurgische Hechtpleister

Occlusieve, transparante plastic hechtpleister ter bescherming tegen vocht en besmettingen van buitenaf.



Eigenschappen en voordelen

- Transparant
- Waterafstotend
- Flexibel
- Hypoallergeen en latexvrij

Mogelijke toepassingen

- Ter bescherming van verbanden tegen vocht, vloeistoffen en contaminanten van buitenaf
- Verhoogt de penetratie van topische medicatie
- Patch test

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Blenderm™ Chirurgische Hechtpleister			
1525-0	1,25 x 457 cm	24	1
1525-1	2,5 x 457 cm	12	1
1525-2	5,0 x 457 cm	6	1



3M™ Medipore™ + Pad

Steriel adhesief non-woven verband met absorberend kompres.



Eigenschappen en voordelen

- Absorberend niet-klevend kompres
- Afgeronde hoeken voorkomen opkrullen van de randen
- Veelzijdig
- Steriel wondverband

Mogelijke toepassingen

- Chirurgische wonden
- Oppervlakkige en 'partial thickness' brandwonden
- Licht tot matig exsuderende wonden
- Als verband over tubes of andere medische hulpmiddelen
- Acute wonden

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal verbanden per box	Minimale besteleenheid
3M™ Medipore™ + Pad			
3562E	5 x 7 cm	50	8
3564E	6 x 10 cm	50	8
3566E	10 x 10 cm	25	8
3569E	10 x 15 cm	25	8
3570E	10 x 20 cm	25	8
3571E	10 x 25 cm	25	8
3573E	10 x 35 cm	25	8



3M™ Tegaderm™ + Pad

Steriel adhesief verband met absorberend kompres.



Eigenschappen en voordelen

- Waterproof ruglaag welke douchen en baden toelaat
- Bacteriele en virale barriere beperkt het risico op infecties
- Kosten-efficient

Mogelijke toepassingen

- Chirurgische wonden
- Oppervlakkige en 'partial thickness' brandwonden
- Licht tot matig exsuderende wonden
- Kleine incisies en excisies
- Scheur- en schaafwonden


Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal verbanden per box	Minimale besteleenheid
3M™ Tegaderm™ + Pad			
3582	5 x 7 cm	50	4
3584	6 x 10 cm	50	4
3586	9 x 10 cm	25	4
3589	9 x 15 cm	25	4
3590	9 x 20 cm	25	4
3591	9 x 25 cm	25	4



3M™ Tegaderm™ Roll

Niet-steriele versie van Tegaderm™ Filmverband.

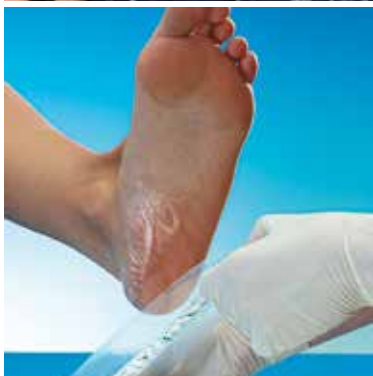

Eigenschappen en voordelen

- Kan gemakkelijk in de gewenste vorm of maat worden geknipt
- Gemakkelijk te gebruiken, zelfs met handschoenen
- Transparant
- Ondoordringbaar voor water en bacteriën
- Laat de huid ademen
- Soepel

Mogelijke toepassingen


- Bescherming van risicovolle huid tegen wrijving en lichaamsvocht
- Fixatie van primaire verbanden zoals kompressen, alginaten, etc.

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmeting	Aantal rollen per box	Minimale besteleenheid
3M™ Tegaderm™ Roll			
16002	5 x 1000 cm	4	4
16004	10 x 1000 cm	4	4
16006	15 x 1000 cm	4	4




Aanbrengtechnieken: bevestigen van sondes, drains of katheters

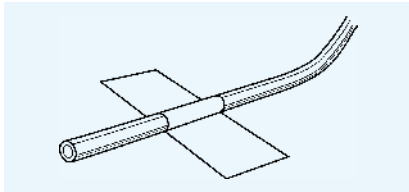

Hechtpleister aangebracht over de tube heen

Voor kortstondig gebruik.


- Breng voorzichtig de hechtpleister aan over de tube, de klevende zijde naar beneden en dit zonder druk uit te oefenen onder de tube.
- Druk de hechtpleister tegen de tube aan.

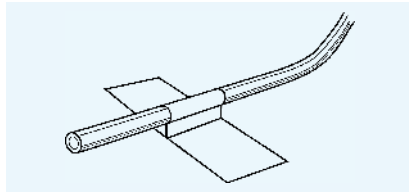

Hechtpleister wordt verhoogd aangelegd

Om mogelijke druk onder de tube te verminderen.








- Plaats het centrale gedeelte van de tape over de tube: omcirkel de tube met de tape.
- Duw de kleeftijden van de tape tegen elkaar. Fixeer het overblijvende gedeelte van de tape op de huid.

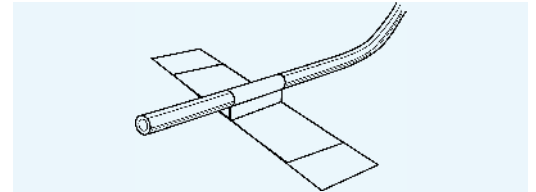

Hechtpleister wordt verhoogd aangelegd met bijkomende versterking

Voor frequente hechtpleisterwissels.

- Breng een ademende, zachte pleister op de huid welke dienst doet als grondlaag voor het aanbrengen van bijkomende pleisters.
- Wanneer een tube moet worden vervangen of heraanleg van de pleister is vereist wordt alleen de bovenste pleister verwijderd; de grondlaag blijft intact.
- Een grondlaag kan ook worden gemaakt met hydrocolloïden.

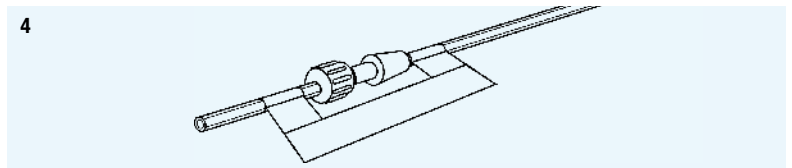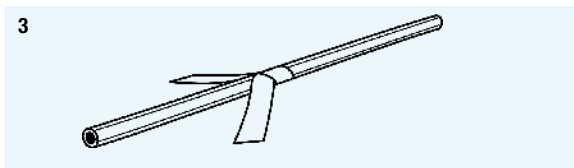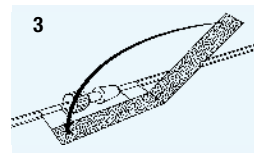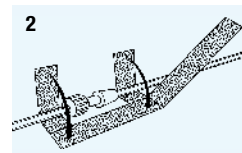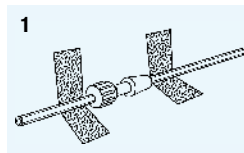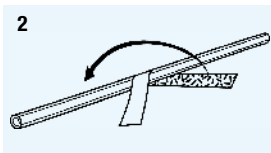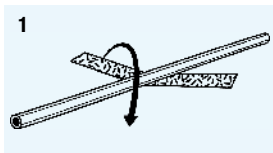

Chevron

V-vorm voor een betere bevestiging van tubes.

- Leg het centrale gedeelte van de tape, kleeftijde naar boven, onder de tube (fig.1).
- Buig een gedeelte van de pleister over de tube heen en bevestig deze op de huid (fig.2).
- Herhaal de procedure met de andere kant van de tape (fig.3).
- Deze techniek werkt het best met fijne hechtstrips of aanpasbare hechtpleisters.

Brug

Voorkomt het loskomen van verbindingstukken.

- Leg een hechtstrip aan, onder de tape, aan elke kant van de verbinding, kleeftijde naar boven (fig.1).
- Plaats een bijkomend langer stuk tape, kleeftijde naar boven, aan het uiteinde van beide hechtstrips (fig.2).
- Plooi de eerste hechtstrips over de tube en hecht deze aan zichzelf (fig.2).
- Plooi en hecht nu de langere hechtstrip op zichzelf, er voor zorgend dat beide uiteinden van de korte hechtstrips mee worden vastgehecht (fig.3).



Splits met chevron

Een twee- of drie- split wordt dikwijls gebruikt voor een NG drain.

Gebruik een tape die zijn sterkte behoudt wanneer deze in strips wordt versneden.

- Scheur de pleister in zijn lengte-as in drie delen, ervoor zorg dragend dat aan het uiteinde een niet-gescheurd deel overblijft. Het niet-gescheurde gedeelte moet voldoende lengte hebben zodat het middelste gedeelte van de neus bedekt kan worden (fig.1).
- Bevestig het niet-gescheurde gedeelte van de pleister op de neus (fig.1).
- Kleef het middelste gedeelte van de verscheurde pleister krachtig op de tube, in de richting van de lengte-as (fig.2).
- Windel het tweede gedeelte van de ingescheurde pleister om de tube (fig.3).
- Herhaal deze procedure in omgekeerde richting met het derde deel van de ingescheurde hechtstrip (fig.4).
- Een mogelijk alternatief is een twee-split zonder een middelste deel.
- Er kan een bijkomende hechtstrip worden aangebracht over het niet-gescheurde gedeelte.

Opmerking:



Kleeftijde van de hechtpleister



Niet-klevende zijde van de hechtpleister