


# 3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルムドレッシング 使用手順

[監修医師]  
大阪大学 国際医工情報センター  
栄養デバイス未来医工学共同研究部門  
井上 善文 先生

## 1681 貼り方

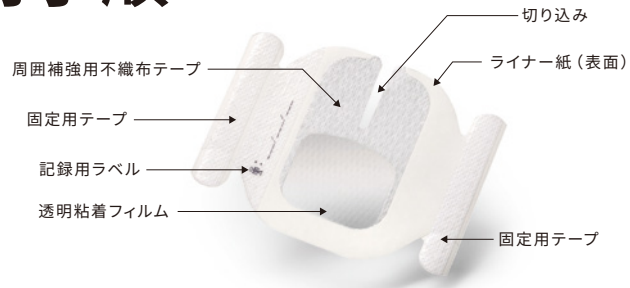


**1** ライナー紙(裏面)を剥がし、粘着面を出します。




**2** カテーテル刺入部位に本品フィルム部分の中央を合わせます。



**3** フィルムの上からカテーテル周囲をつまみよく密着させます。

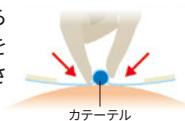


**4** フィルムを皮膚に密着させるように、空気を押し出しながら貼付します。

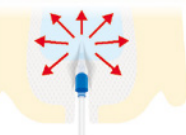


**5** 不織布テープの切り込み部分をカテーテルの下で沿わせるように貼付します。無理に重ね合わせる必要はありません。




**6** 周囲をしっかり密着させ、全体を貼付した後、本品を押さえながらゆっくりとライナー紙(表面)のフレーム部分を剥がします。

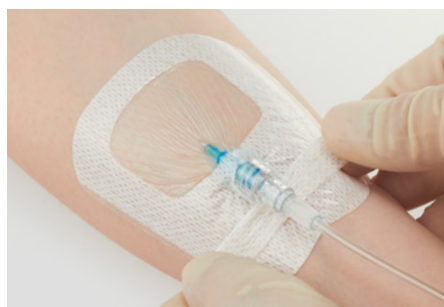

**7** 1本目の固定用テープで切り込みが開かないように固定します。

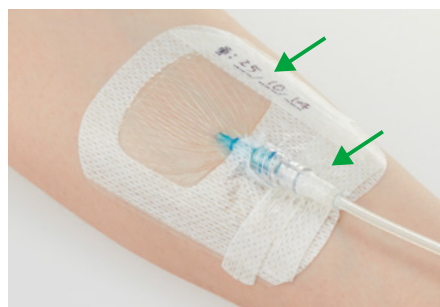

**8** 2本目の固定用テープでさらに上からルートをΩ字に固定します。記録用ラベルに日付などを記入して観察の妨げにならない位置に貼付します。

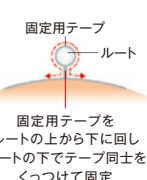

**8+** 必要に応じてサージカルテープなどで補強してください。予めY字に切り込みを入れておくと固定性がよくなります。



写真は3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープEX 4733-50

# 3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルムドレッシング 使用手順

## 剥がし方



**1** 補強のテープ類や固定用テープを剥がします。手袋をはめた指の腹でなでるようにすると剥がしやすくなります。




**2** 不織布テープの切り込み部分を、片方ずつ押さえながらゆっくりと剥がします。




**3** 片手でカテーテルの穿刺部を押さえながらフィルムを剥がします。

### 皮膚から剥がす時のポイント!

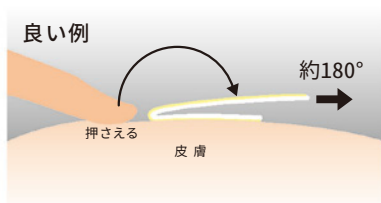

カテーテルと皮膚を  
押さえながら、  
折り返すように  
ゆっくりと剥がします。

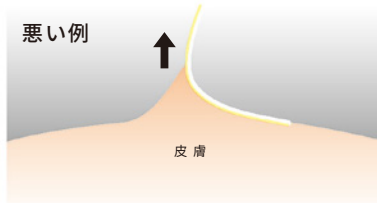

皮膚に負担がかかるため  
真上に持ち上げたり、  
早い速度で剥がさないよう  
ご注意ください。

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止  
一度開封して、そのままにしておいた本品を使用しないこと。一度使用したものを再使用しないこと。【無菌状態が保持できないため】また、一度開封したものを再滅菌して使用しないこと。
2. カテーテル刺入部位に感染徴候（発赤、発熱、疼痛、紅斑、異臭、浮腫、異常な滲出液など）がある場合には、本品を使用しないこと。【感染を増悪させる恐れや、治癒の遅延につながる恐れがあるため】

### 注意事項

添付文書をよく読んでからご使用下さい。

販売名：テガダーム I.V. コンフォート フィルム ドレッシング 届出番号：13B1X10109000232  
3M、Tegaderm、テガダーム、マルチポアは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

皮膚創傷ケア製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.  
HPM-556-E (11701) DN

2017年11月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金（土日祝年末年始は除く）  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます