

3M

Cavilon™

Skin Care Solutions

Applikeringsguide 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Til forebygging og behandling av inkontinens assosiert dermatitt (IAD)



Applikeringsguide 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Til forebygging og behandling av inkontinens assosiert dermatitt (IAD)

Produkter du trenger:

- ▶ 3M™ Cavilon™ vaskeklut for kroppsvask eller rent vann
- ▶ Myk vaskeklut som ikke loer
- ▶ 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse
- ▶ Hansker

Finn frem produktene du skal bruke



1 Legg frem produktene på en ren flate.



2 Åpne pakken med Cavilon Advanced hudbeskyttelse og la applikatoren bli liggende i plastdelen av emballasjen.

Plasser og vask pasienten



3 Plasser pasienten (slik at huden som skal vaskes eksponeres, men mest mulig tildekket for varme og integritet).



4 Rengjør huden nøye og forsiktig med et ph-balansert vaskemiddel som f.eks. 3M™ Cavilon™ vaskeklut eller rent vann.

Bytt hansker



5 Bytt hansker.

Hver applikator dekker et område på størrelse med et A4-ark.

Mer enn en applikator kan anvendes hvis nødvendig for å dekke et større område.

Se vedlagte produktinformasjon for ytterligere informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og advarsler.

Påføring av 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse



6 Ta tak i applikatoren og plasser tommelen på spaken.

Hold applikatoren med skumsvampen ned og trykk inn spaken for å bryte den indre ampullen.

Du kommer til å høre et knepp når ampullen brytes. Det er ikke nødvendig å fortsette å trykke inn spaken.




7 Hold applikatoren med skumsvampen vendt ned i ca. 10 sekunder for å la væsken renne ut i skumsvampen.

Væsken renner ned ved hjelp av tyngdekraften, så du behøver ikke fortsette å trykke på spaken. Væsken kommer ikke til å gjennomfukte svampens ytterkanter.



8 Påfør Cavilon Advanced hudbeskyttelse ved å forsiktig stryke med skumsvampen over det såre området og huden rundt. Anvend en jevn, sveipende bevegelse med minimal overlapping av produktet. Applikatoren kan anvendes i hvilken som helst retning.

Det er ikke behov for å trykke applikatoren ned under påføring, da dette kan resultere i for mye fuktighet og væskeansamling.

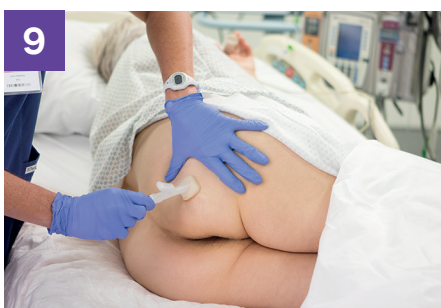

9 Fortsett påføringen til hele området som skal behandles er dekket. Det er viktig å påføre produktet på all hud som utsettes for urin og/eller avføring.



10 La området tørke i minst 30 sekunder. Om du har glemt et område må du vente til væsken har tørket helt før du påfører mer.



11 Dersom Cavilon Advanced hudbeskyttelse benyttes i en hudfold eller annet område med hud-mot-hud kontakt, sørg for at hudflatene holdes adskilt til væsken har tørket helt (ca. 30 sekunder).



Påfør produktet 2 ganger pr. uke

Tilleggsinformasjon



La Cavilon Advanced hudbeskyttelse tørke i minst 60 sekunder før en evt. klebende bandasje påføres.

Filmen vil slites vekk og trenger ikke å fjernes.

Skulle du ønske å fjerne produktet kan du benytte en plasterfjerner som inneholder hexametyldisiloxan (HMDS) eller silikonpolymer.

Oppdag hvordan 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse kan stoppe, reversere, forebygge - og fjerne IAD.

For mer informasjon, besøk 3mnorge.no/EndIAD eller kontakt din lokale 3M representant.

Bestillingsinformasjon

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

3M Art. no	Str.	Stk./eske
5050G	2,7ml applikator	20



3M Norge AS
Postboks 300, 2001 Lillestrøm
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tel: 0 63 84
www.3m.no/helse

3M og Cavilon er varemerker som tilhører 3M Company.
© 3M 2017. Alle rettigheter forbeholdes. BR531154-1SE170605