



Cavilon™

Skin Care Solutions

Gebruiksaanwijzing 3M™ Cavilon™ Geavanceerde Huidbeschermmer

voor de preventie en behandeling van incontinentie dermatitis (IAD)



Gebruiksaanwijzing 3M™ Cavilon™ Geavanceerde Huidbeschermmer

voor de preventie en behandeling van incontinentie dermatitis (IAD)

Benodigdheden:

- ▶ 3M™ Cavilon™ Was- & Reinigingsdoekjes of kraanwater
- Niet-pluizende zachte doekjes
- 3M™ Cavilon™ Geavanceerde Huidbeschermmer
- Onsteriele handschoenen

Benodigdheden klaarleggen



Plaats de benodigdheden op een schoon oppervlak.



Open de verpakking met Cavilon geavanceerde huidbeschermmer en laat de applicator in het plastic zakje zitten.

Patiënt positioneren en reinigen



Plaats de patiënt in de juiste houding (ontbloot de huid die moet worden gereinigd, maar houd de patiënt zoveel mogelijk bedekt voor de warmte en een gevoel van waardigheid).



Reinig de huid grondig en voorzichtig met een pH-neutraal reinigingsmiddel of kraanwater. Droog de gebieden met intacte huid zo nodig voorzichtig af. Als er gebieden met erosie (open huid) aanwezig zijn, kan overmatig sereus of sereus-bloederig wondvocht indien nodig met een verbandgaasje worden opgenomen.



Doe schone handschoenen aan.

Elke applicator bedekt een gebied van ongeveer de grootte van een blad papier van A4-formaat.

Als er grotere gebieden moeten worden bedekt, kan er meer dan één applicator worden gebruikt.

Raadpleeg de bijsluiter van de Cavilon geavanceerde huidbeschermmer voor meer informatie over contra-indicaties, voorzorgen en waarschuwingen.

*Gebruik Cavilon Geavanceerde huidbeschermmer niet in combinatie met producten die een barrière bevatten (bijv. dimethicon)

Aanbrengen van 3M™ Cavilon™ Geavanceerde huidbeschermmer



6 **Neem de applicator en plaats uw duim op het einde van de hefboom.**

Richt de spons van de applicator naar beneden en druk de hefboom stevig in om de inwendige ampul te breken.

U hoort een knappend of klikkend geluid als de ampul breekt. Het is niet nodig om de hefboom vervolgens in te blijven drukken.



7 **Houd de applicator ongeveer 10 seconden lang naar beneden gericht** zodat de vloeistof in de schuimspons kan lopen. De vloeistof loopt onder invloed van de zwaartekracht, dus u hoeft geen druk op de hefboom te blijven uitoefenen.

De vloeistof trekt niet helemaal tot aan de randen van de spons door.



8 **Breng de Cavilon geavanceerde huidbeschermmer aan** door de schuimspons zachtjes over het aangedane gebied en de omliggende huid te wrijven. Maak een gelijkmatige, veggende beweging met minimale overlapping van het product. De applicator kan in alle richtingen worden gebruikt.

Tijdens het aanbrengen hoeft u de applicator niet naar beneden te drukken. Extra druk is niet nodig en kan leiden tot overmatige natheid of ophoping van vloeistof.



9 **Ga door met aanbrengen totdat het hele te behandelen gebied is bedekt.** Het is belangrijk om het product overal aan te brengen waar de huid in contact komt met ontlasting en/of urine.



10 **Laat het gebied minstens 30 seconden drogen.** Als er een stukje huid is overgeslagen, wacht dan tot het product volledig is opgedroogd alvorens extra product aan te brengen.



11 **Indien Cavilon Geavanceerde huidbeschermmer wordt aangebracht in een huidplooi of ander gebied met huid-op-huid contact,** zorg dan dat de huidoppervlakken elkaar niet raken om het product volledig op te laten drogen (minstens 30 seconden) voordat u de huid weer in de normale positie laat komen.

Frequentie



Breng het product 2 keer per week opnieuw aan. Cavilon Geavanceerde huidbeschermmer is waterbestendig en wordt niet verwijderd door gewone reiniging. Frequenter aanbrengen kan leiden tot opeenhoping van het product.

Meer informatie



Laat het product minstens 60 seconden lang drogen alvorens een kleefverband of tape over de Cavilon Geavanceerde huidbeschermmer aan te brengen.

De laag slijt vanzelf weg en hoeft niet verwijderd te worden. Indien u het product wilt verwijderen, gebruik dan een kleefstofverwijderaar met hexamethyldisiloxaan (HMDS) of siliconenpolymeer.

Het is raadzaam om iedere keer dat u een kleefverband of tape verwijderd van een gebied dat bedekt is met Cavilon Geavanceerde huidbeschermmer, een kleefstofverwijderaar met HMDS of siliconenpolymeer te gebruiken.

Ontdek hoe 3M™ Caviion™ Geavanceerde Huidbeschermer u de kracht geeft om incontinentie dermatitis (IAD) te voorkomen en te behandelen.

Ga voor meer informatie naar 3M.nl/EndIAD of 3M.be/EndIAD, of neem contact op met uw 3M Critical and Chronic Care Solutions vertegenwoordiger.

Bestelinformatie

3M™ Caviion™ Geavanceerde Huidbeschermer

Cat. no	Afmetingen	Aantal per doos
5050G	2,7 ml applicator	20



3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
3M.nl/EndIAD

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
3M.be/EndIAD

3M en Caviion zijn handelsmerken van het bedrijf 3M.
© 3M 2017. Alle rechten voorbehouden.