

**Описание продукта:**

Пластырь глазной Opticlude состоит из приятного для кожи, дышащего материала с нанесенным на него гипоаллергенным клейким слоем, комфортным даже для чувствительной кожи вокруг глаз, а также мягкой не прилипающей подкладки. Пластырь обеспечивает свободный доступ воздуха. Специальная анатомическая форма пластыря подходит к форме лица, обеспечивая удобную и надежную фиксацию. Материал прокладки может поглощать экссудаты (слезы) из глаз, но он не предназначен для использования в качестве сорбционного перевязочного материала и используется только для защиты глаз и ресниц от клейкого слоя.

Пластырь глазной Opticlude предназначен для использования профессионалами в ЛПУ, а также в домашних условиях. При использовании Opticlude в домашних условиях следуйте инструкциям по уходу за глазами вашего лечащего врача.

Opticlude поставляется нестерильным, предназначен для однократного применения.

**Показания к применению:**

Пластырь глазной Opticlude используется при косоглазии и амблиопии у детей.

**Меры предосторожности/ противопоказания:**

Перед применением глазного пластыря Opticlude проконсультируйтесь с врачом-окулистом. В случае возникновения каких-либо реакций на коже, следует прекратить использование продукта и проконсультироваться с врачом.

Не использовать при индивидуальной непереносимости компонентов.

Повторное использование продукции запрещено.

**Способ применения:**

Нанесение:

1. Для лучшей фиксации, кожа в месте наложения пластыря должна быть сухой и чистой. Удалите защитную бумажную подкладку с пластыря.
2. Аккуратно закройте оба глаза и расслабьте мышцы лица, чтобы вокруг глаз не было морщин.
3. Нанесите глазной пластырь Opticlude узкой частью со стороны носа. Не растягивайте пластырь и не оттягивайте кожу на лице.
4. Закрепите пластырь легкими прижатиями пальцев по периметру пластыря.

Удаление:

1. Аккуратным движением открепите пластырь у носовой части глаза.
2. Придерживая пальцами кожу, медленным движением удаляйте пластырь в направлении уха так, чтобы обратная сторона была как можно ближе к поверхности кожи. Удаляя глазной пластырь таким образом (под углом), Вы снижаете риск покраснения и раздражения кожи вокруг глаза.
3. После удаления пластыря придержите кожу вокруг глаза еще некоторое время.

**Форма выпуска:** 20, 30, 40, 50, 100 штук в картонной упаковке; цвет: бежевые или с рисунком; форма: овальная, овальная с надрезами; размеры: размер Mini (5,0 см x 6,0 см (длина надреза:  $6 \pm 1$  мм; ширина:  $1,6 \pm 0,5$  мм)); 5,0 см x 6,2 см), размер Midi (5,3 см x 7,0 см (длина надреза:  $7 \pm 1$  мм; ширина:  $2 \pm 0,5$  мм)), размер Maxi (5,7 см x 8,0 см (длина надреза:  $8 \pm 1$  мм; ширина:  $1,6 \pm 0,5$  мм)); 5,7 см x 8,2 см), допуск на размеры  $\pm 2$  мм.

**Состав (материалы изготовления):** основа – нетканый материал Micropore (вискоза CAS-Number: 61788-77-0 с акриловым адгезивом CAS-Number 9017-68-9), нетканная подкладка – вискоза CAS-Number: 61788-77-0, покрытая с двух сторон полиэтиленовой пленкой LDPE CAS-Number: 9002-88-4; защитная бумага – бумага с силиконовым покрытием CAS-Number: не применим.

**Хранение/транспортировка, срок годности:** Хранить и транспортировать в сухом месте при нормальной комнатной температуре. Срок годности 5 лет. Дата окончания срока годности указана на упаковке. Транспортирование осуществляется всеми видами




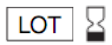



## Инструкция по применению

транспорта, упакованные изделия помещаются в транспортную тару – гофрокартонные коробки.

**Утилизация:** Утилизировать в соответствии с национальными, региональными, местными требованиями законодательства РФ. В домашних условиях и небольших объемах продукт утилизируется с обычным бытовым мусором.

**Гарантия:** За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания ЗМ не несет никакой ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность.

Разъяснение символов на упаковке:

	Не использовать повторно		
	Осторожно, смотрите информацию в инструкции по применению		Производитель
	Номер партии и дата окончания срока годности		Упаковка подлежит вторичной переработке
	Знак соответствия Европейской Директиве		номер по каталогу

**Уполномоченный представитель производителя в РФ:**

ЗАО "ЗМ Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474



Дата последнего пересмотра инструкции по применению 2016-07