

3M Medica
Haut schützen – Wundheilung unterstützen

Alles klar!



3M™ Tegaderm™ Absorbent
Die Wunde stets im Blick!

3M

Eine neue Generation der Wundverbände

3M™ Tegaderm™ Absorbent verbindet die absorbierenden Eigenschaften eines hydroaktiven Wundverbandes mit dem besonderen Vorteil der Transparenz – für kontrollierte Wundbeobachtung ohne Verbandwechsel.

- **Besondere Transparenz**

Das transparente Material ermöglicht eine ständige Wundbeobachtung und -kontrolle ohne Verbandwechsel.

- **Effiziente Absorption**

Deutlich höhere Absorptionsfähigkeit als die meisten Hydrokolloidverbände durch das innovative Wirkprinzip.

- **Dünnere und glatter Kleberand**

Guter und sicherer Halt des Verbandes auch an schwierigen Körperstellen und bei stärkeren Scherkräften, wie z. B. in der Sakralregion.

- **Unbegrenzte Tragedauer**

Kann länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben und gewährleistet ein idealfeuchtes Wundmilieu und Wundruhe.

- **Wirtschaftlich in der Anwendung**

Spart Materialkosten und Arbeitszeit für den Anwender.

Transparenz &



Klinische Beispiele

Chronische Wunden: Dekubitus¹



Behandlungsbeginn:
Wundgröße = 0,96 cm²

Angelegter Tegaderm Absorbent
Verband (sakral)

Woche 1:
Wundgröße = 0,32 cm²

Woche 5:
Wunde geschlossen

Akute Wunden: Hautablederung²



Behandlungsbeginn:
Dialysepflichtiger Patient, 74 Jahre

Angelegter Tegaderm Absorbent
Verband (oval) nach 5 Tagen

Verbandwechsel am 10. Tag

Nach etwa 30 Tagen:
Wunde geschlossen

Indikationen

3M™ Tegaderm™ Absorbent wird angewendet bei oberflächlichen und tiefen Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation wie beispielsweise Hautulcera im Stadium I und II, Abschürfungen, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Spende haut-Entnahmestellen, postoperative Wunden.

Absorption

Tipps & Tricks zur Anwendung

Allgemeine Hinweise

- Wählen Sie die Verbände so aus, dass das Acryl-Polymerkissen die intakte Haut um mindestens 1 cm überlappt.
- Der Verband kann länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Ein Verbandwechsel wird empfohlen, wenn der Wundzustand dieses erfordert oder der Verband sich löst.
- Die Acryl-Polymeraufflage darf nicht zerschnitten werden.
- Um die wundumgebende Haut vor Exsudat zu schützen, kann 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz als zuverlässiger, atmungsaktiver Langzeitbarriere-Film aufgetragen werden.

Sakralapplikation mit sicherem Halt



1. Die Haut muss trocken und fettfrei sein. Falten Sie den Verband in der Mitte.



2. Halten Sie den gefalteten Verband an den klebstofffreien Laschen und entfernen Sie das Trägerpapier.



3. Die Transparenz ermöglicht eine exakte Positionierung über der Wunde.



4. Platzieren Sie den Verband im steilen Winkel zuerst mittig in der Analfalte.



5. Modellieren Sie den Verband von der Mitte nach außen an.



6. Halten Sie den Kleberand ca. 10-15 Sekunden gedrückt, um die Klebkraft zu optimieren.



7. Ziehen Sie den Applikationsrahmen flach nach außen ab und streichen Sie die Kleberänder abschließend an.



8. Angelegter Tegaderm Absorbent Sakralverband.





9. Zur Entfernung überdehnen Sie den transparenten Kleberand waagrecht zur Haut und unterstützen Sie diese dabei mit leichtem Druck. Alternativ kann der Verband auch vorsichtig und flach abgezogen werden.



3M™ Tegaderm™ Absorbent

Das innovative Wirkprinzip

Das Wundexsudat wird durch den auf der Wunde liegenden perforierten Tegadermfilm in die Acryl-Polymeraufflage im Inneren der Wundaufflage absorbiert und über den äußeren Tegadermfilm als Wasserdampf teilweise wieder abgegeben – so bleibt ein idealefeuchtes Wundmilieu erhalten.

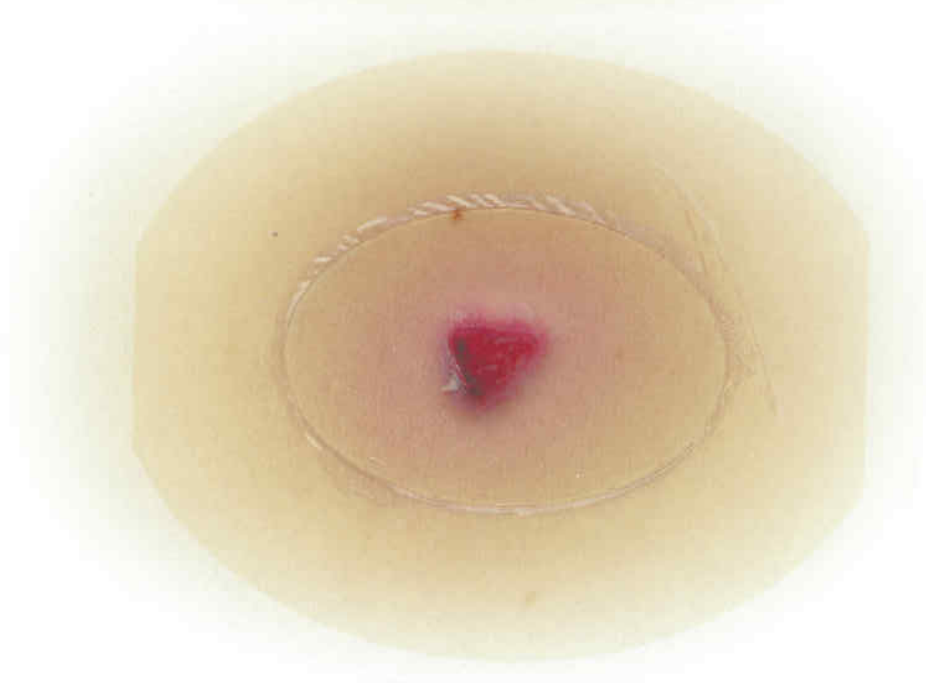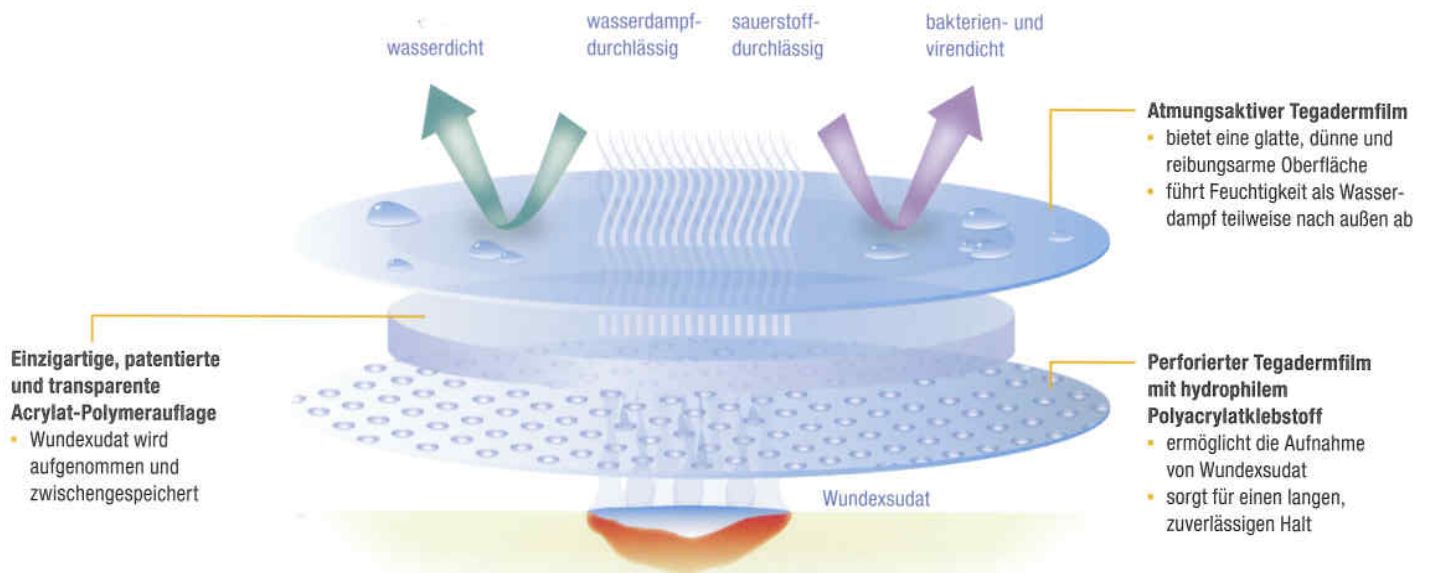

Absorption

3M™ Tegaderm™ Absorbent

Transparenter Hydroaktivverband



Bestellinformationen

	Bestell-Nr.	Größe Acrylauflage	Größe insgesamt	Verbände/ Schachtel	PZN
	90800 Oval	3,8 x 5,7 cm	7,6 x 9,5 cm	5	2929898
	90801 Oval	6,0 x 7,5 cm	11,1 x 12,7 cm	5	2930335
	90802 Rechteckig	10,1 x 10,1 cm	14,9 x 15,2 cm	5	2931889
	90803 Oval	8,5 x 10,7 cm	14,2 x 15,8 cm	5	2931895
	90805 Rechteckig	14,9 x 15,2 cm	20,0 x 20,3 cm	5	2932618
	90807 Sakral	11,6 x 14,5 cm	16,8 x 19,0 cm	5	2511584

Quelle:

¹ Marie Brown-Etris, RN, CWOCN and Marian Punchello, LPN, Etris Associates, Inc., Philadelphia, PA, USA; Use of a Transparent Absorbent Acrylic Dressing on a Stage II Pressure Ulcer of the Sacrum

² Fallbeispiel zur Verfügung gestellt von Dr. Walter Wetzel-Roth, Buchloe, Deutschland



3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11
41453 Neuss
Tel.: 02131 / 14-4414
Fax: 02131 / 14-4479
www.3Mmedica.de

3M, Tegaderm und Cavilon sind eingetragene Warenzeichen der Firma 3M.
© 3M Medica, 2008.

Weitere Informationen zu diesen und den zahlreichen Produkten aus dem innovativen Wundversorgungsprogramm der 3M Medica finden Sie auch unter www.3Mmedica.de