

Hurtig aflæsningsteknologi som giver resultat af den biologiske indikator på blot 4 timer.

3M's veletablerede teknologi for hurtig aflæsning af biologiske indikatorer er blevet udviklet til et nyt system til monitorering af sterilisationsprocesser med vaporiseret brintoverilte (også kendt som plasma). Det er godkendt af FDA til STERRAD og kan også anvendes til andre systemer såsom V-PRO.

3M™ Attest™ Rapid biologiske indikatorer gør det nemmere at overvåge hver eneste last. Som fremhævet i standarden DS/EN ISO 14161, giver dette system den højeste og mest konsekvente patientsikkerhed - uanset hvilken sterilisationsmetode der anvendes.



Placer Attest biologisk indikator i en pose eller endnu bedre i en specifik Process Challenge Devise (PCD).

Opfyld standarder.

Standarder angiver at hvis du ikke kan måle alle parametre, som bidrager til mikrobiologisk drab i en sterilisationsproces, skal du bekræfte processens effektivitet ved anvendelse af en biologisk indikator. Daglig praksis kræver en hurtig genbehandling af godset, hvilket kan gøre det vanskeligt at overholde gældende standarder. Med aflæsning inden for fire timer giver det brugeren mulighed for at få bekræftet at tilfredsstillende sterilisationsbetingelser er opnået, og dermed kan en biologisk indikator anvendes, som del af kvalitetssikringsprocessen ved frigivelse af en last inden godset sendes videre til operationsafdelingen.

Det er et spørgsmål om tillid.

I årtier har sterilcentraler støt på 3M's biologiske indikatorer til monitorering af dampsterilisationlaster, og mere end 850 millioner cyklusser over hele verden, er blevet monitoreret med Attest™ biologiske indikatorer.

Nu kan samme velkendte hurtigaflæselige teknologi anvendes inden for vaporiseret brintoverilte sterilisation.

Hurtigere resultat for en hurtigere respons.

Resultat inden for fire timer med 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikatorsystem for vaporiseret brintoverilte sterilisation giver dig den information du behøver for at frigive lasten.

Simplificér din arbejdsgang.

Med hurtigere resultat og den brugervenlige 3M™ Attest™ Auto-reader 490H, kan du dokumentere resultater samme dag, under samme vagt og måske med samme personale.

Med et resultat på fire timer bliver det muligt at forbedre din rutinemæssige kvalitetskontrol ved at inkludere en biologisk indikator i hver last.




Find ud af hvordan du kan indarbejde 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikatorsystem til vaporiseret brintoverilte sterilisation i din sterilcentral.

3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator anvender den samme velkendte teknologi, som Attest Rapid system for dampsterilisationsprocesser, og kan nu også give hurtigt resultat for sterilisationsprocesser med vaporiseret brintoverilte.

Anatomien i 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator.

I denne lille beholder findes mere end en million sporer *Geobacillus stearothermophilus*, som giver et utroligt hurtigt resultat inden for fire timer for vaporiseret brintoverilte sterilisation. Seks gange hurtigere end andre biologiske indikatorer til brintoveriltesterilisation (H2O2).

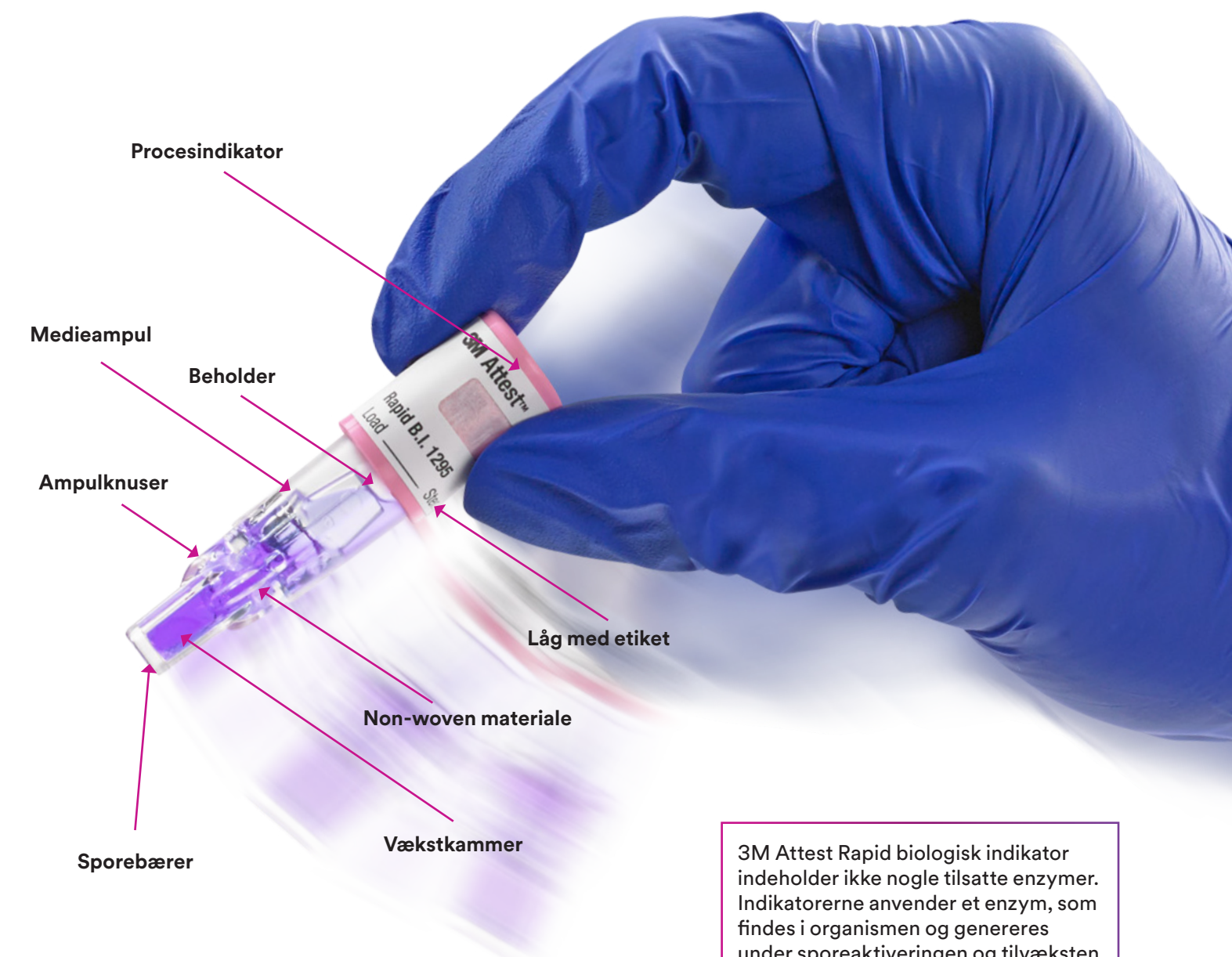

3M Attest Rapid biologisk indikator indeholder ikke nogle tilsatte enzymer. Indikatorerne anvender et enzym, som findes i organismen og genereres under sporeaktivering og tilvæksten for at give dig et hurtigt resultat inden du frigiver lasten.



Bedre nøjagtighed og effektiv dokumentation.

Undgå dokumentationsfejl.
Sterilcentraler med fuld aktivitet oplever ofte forstyrrelser, som kan medføre dokumentationsfejl. Optimér nøjagtigheden og effektivisér din dokumentation ved at tilslutte Attest Auto-reader 490H til dit instrumentsporingsystem. Biologisk indikator resultat og anden vigtig information kan automatisk overføres til dit system.**


For virksomheder som ikke i øjeblikket anvender software til instrumentsporing, er en webbaseret brugerflade til Attest Auto-reader 490H tilgængelig med mobile enheder og PC.

Brintoverilte sterilisation. En integreret monitoreringsmetode.

Opnå den kvalitetssikring af sterilisationsprocessen, som du behøver med kontrolprodukter fra 3M. Samme kemiske indikatorfarveforandring fra blå til pink vil ske for alle kontrolprodukter til vaporiseret brintoverilte sterilisation. Let at anvende, let at aflæse.


Indikatortape

3M™ Comply™ indikatortape 1228 bekræfter, at en pakke på vej til operationsafdelingen har været eksponeret for en vaporiseret brintoverilte sterilisationscyklus.

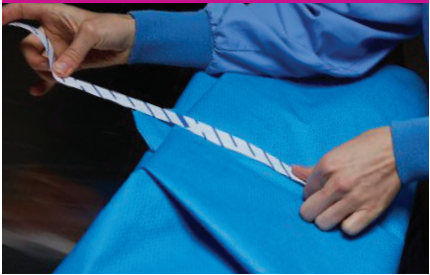


Kemiske indikatorer

3M™ Comply™ kemisk indikator til brintoverilte 1248 bekræfter for personalet at sterilisationsmediet er penetreret til punktet for placering.

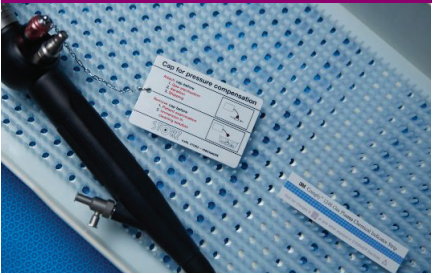

Biologiske indikatorer

3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator 1295 påviser, ved anvendelse af Attest Auto-reader 490H, dødelighed under sterilisationscyklussen.

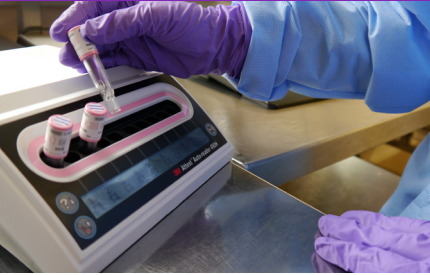

Tag kontrol og få mere ro i sindet.
Med det hurtige resultat inden for fire timer, kender du resultatet af en biologisk indikator før du frigiver lasten, hvilket øger patientsikkerheden på dit arbejdssted.

i Find ud af hvordan du kan indarbejde 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikatorsystem til vaporiseret brintoverilte sterilisation som en del af den rutinemæssige kvalitetssikring i din sterilcentral.

3M's løsninger til monitorering af sterilisationsprocesser med vaporiseret brintoverilte.

	Varenummer	Beskrivelse	Pakning	Forsendelseskarton
	1295	3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator til vaporiseret brintoverilte sterilisation	30 stk/pose	4 poser/karton
	490H	3M™ Attest™ Inkubator Til brug sammen med 3M Attest Rapid biologisk indikator til vaporiseret brintoverilte sterilisation 1295 Inkluderer Ethernet-kabel til internet tilslutning	1 stk/æske	1 æske/karton
	1248	3M™ Comply™ Kemisk indikator til brintoverilte Den kemiske indikator skifter farve fra blå til pink efter eksponering af vaporiseret brintoverilte 2,0cm x 10cm	250 stk/pose	4 poser/karton
	1228	3M™ Comply™ Indikatortape til brintoverilte De kemiske indikatorstreger skifter farve fra blå til pink efter eksponering af vaporiseret brintoverilte Hvid med blå striber 1,9cm x 55cm		24 ruller/karton

Kan anvendes til STERRAD autoklaver model 100NX (Standard, Flex, Express og Duo cyklusser), NX (Standard og Advanced cyklusser) og 100S

Kontakt din 3M konsulent eller besøg go.3M.com/VH202

KOMMER SNART!

Snart vil du kunne få biologisk indikator resultat for brintoverilte sterilisationsprocesser på blot 24 minutter.*

Efter FDA godkendelse vil alle kunder, som anvender vores 4 timers system til H2O2 kunne opgraderes til det nye system problemfrit.

* Afventer 510(k) godkendelse (FDA) efter 24 minutter
**Godkendt af FDA for STERRAD autoklaver model 100NX (Standard, Flex, Express og Duo cyklusser), NX (Standard og Advanced cyklusser), og 100S. Kan også anvendes til andre systemer såsom STERIS V-PRO.



3M a/s
Health Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Danmark
www.3M.dk/IPD

3M, Attest og Comply er varemærker tilhørende 3M Company. Sterrad er et varemærke under Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon US, LLC. V-Pro er et varemærke inden for STERIS Corporation.

3M 2017. Alle rettigheder reserverede. IPD-ST-H202-6016-2-EU-0716



3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Attest™ Rapid Biologisk indikator.

Løsninger til monitorering af vaporiseret brintoverilte sterilisation.

Effektivitet, pålidelighed og kontrol.

KOMMER SNART!
Få BI resultater for H2O2 inden for 24 minutter.*