

# 3M™ キャビロン™ 皮膚用リムーバー TP2 (ワイプタイプ) 使い方ガイド



## [製品特徴]

- ・狭い範囲や局所にも、ピンポイントで使用可能
- ・やわらかく、肌ざわりのよいワイプ素材
- ・個包装パッケージで衛生的

## [用途]


ストーマ装具類、サージカルテープ及び心電図用電極等の剥離

- ・火気厳禁
- ・本品は未滅菌品です。
- ・添付の取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

## 基本的な使い方 (剥離)



**1.** はくり剤がこぼれないようパウチをまっすぐ持って開封し、ワイプを取り出します。

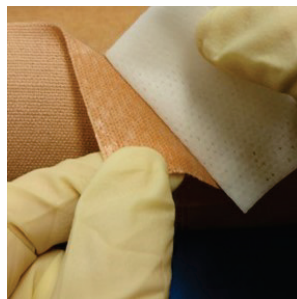

**2.** ワイプを皮膚と粘着剤の境目にあて、はくり剤を染み込ませて端部をめくります。



**3.** テープを180度に折り返し、ワイプ全体を皮膚に滑らせるようにして剥がします。



**4.** ワイプが乾いても、パウチに残っているはくり剤を注ぎ足して使用することができます。

## 注意事項



### はくり剤が粘膜に触れないように注意してください

写真のように折り返し部分を90度にして、皮膚と粘着剤の隙間にはくり剤を染み込ませます。



### 再貼付の前に清拭してください

剥がした後、アルコール綿ではくり剤をしっかりと拭き取ってから、十分乾燥させ貼付します。



### 皮膚とテープ粘着面の隙間からはくり剤を染み込ませてください


テープの表面側から染み込ませると、糊残りが多くなることがあります。必ず、皮膚と粘着面の隙間に染み込ませてください。

## 糊残りを拭き取る方法（チューブの例）


- ・広げると大きなワイプなので、広い面積をまとめて拭き取れます。
- ・ワイプが乾いても、パウチに残っているはくり剤を注ぎ足して使用することができます。



**1.** TP2を開封してワイプを取り出します。

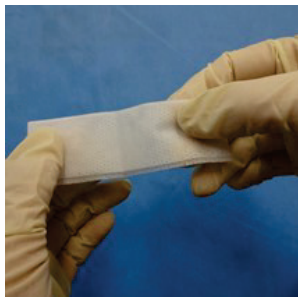


**2.** 糊残り部分の大きさにあわせて、ワイプを広げます。

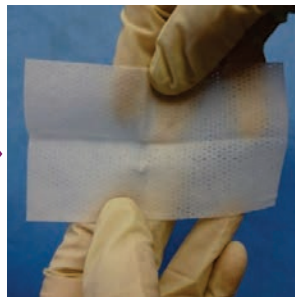

**3.** ワイプを糊残り部分に巻き着けます。




**4.** 5～10秒間しっかり握ります。(糊残りチューブの間にはくり剤を染み込ませるため)

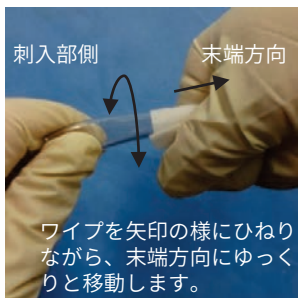

**5.** 刺入部側のチューブを動かないように押さえます。ワイプは図の様に動かし




**6.** 拭き取り具合が悪くになったら、ワイプの面を変え、残ったはくり剤をワイプに注ぎ足します。

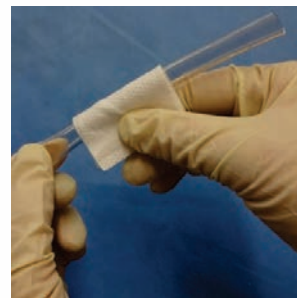

**7.** 仕上げとして、最後に全体を軽く拭き取ります。

## 糊残りを拭き取る方法（皮膚の例）

- ・やわらかいワイプ素材なので、肌にも優しく糊残りを拭き取れます。

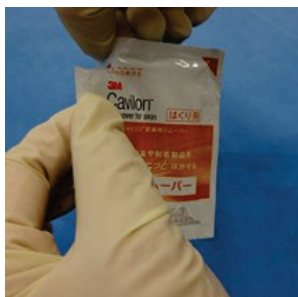

**1.** パウチを開封してワイプを取り出します。



**2.** ワイプを糊残り部分にあて、2～5秒間はくり剤を馴染ませます。



**3.** ワイプを皮膚にしっかりとあて、一方向にゆっくりと動かし、糊残りを写し取るように拭き取ります。

※本資料は使用方法の一例であり、完全に糊残りを除去出来ない場合もあります。  
その場合はオリーブオイル、ベビーオイル等で残った糊残りを除去してください。

3M、Cavilon、キャピロンは3M社の商標です。

2017年6月発行

スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー

皮膚創傷ケア製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.  
HPM-760-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45～17:15 / 月～金（土日祝年末年始は除く）  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます